

# 케어센스® 에어 연속혈당측정시스템

## 스마트 워치 앱 사용하기

### 참고

- 스마트폰과 스마트 워치는 각각 권장 사양을 모두 충족해야 합니다.
- 스마트 기기의 시스템 사양과 기종은 케어센스 에어 웹사이트 ([www.caresensair.com](http://www.caresensair.com)) 에서 확인하세요.
- Sens365 워치 앱도 동일한 방법으로 설치 가능합니다.  
(단, Step 2 '컴플리케이션 설정하기' 기능은 적용 불가)




호환성 확인



### Step 1 케어센스 에어 워치 앱 설치하기

- 앱을 처음 설치하는 경우, 스마트폰에 앱을 다운로드하면 스마트 워치에도 앱이 자동 설치됩니다.

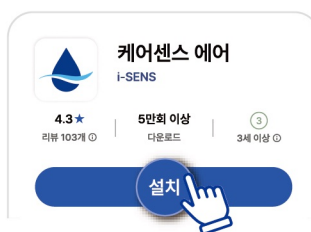

- 참고 : 스마트 워치는 센서가 아닌 스마트폰으로부터 혈당값을 수신합니다.  
따라서 ①센서와 스마트폰을 우선 연결하신 후, ②스마트폰과 스마트 워치를 연동하셔야 혈당값 수신이 가능합니다.

- 스마트폰 앱이 설치된 상태에서 워치 앱을 설치하는 경우, 아래 안내를 참고하세요.


- 스마트폰을 통해 워치에 앱을 설치하려면,

#### Android



구글 플레이에서 '케어센스 에어' 검색 후 하단에,  
'더 많은 기기에 설치 가능'에서 워치 앱 설치


#### iOS

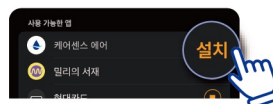

Watch 앱 하단에 '사용 가능한 앱' 목록에서  
워치 앱을 설치해 주세요.

- 스마트 워치에서 앱을 설치하려면, 구글 플레이/앱 스토어에서 '케어센스 에어'를 직접 검색하여 설치합니다.

## 위치 앱 화면 정보

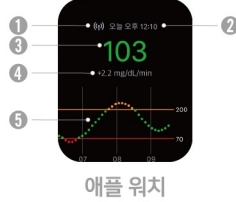


- ① 연결 상태
- ② 마지막 수신 시간
- ③ 혈당 수치
- ④ 혈당 변화량
- ⑤ 혈당 차트

· 스마트폰의 워치 설정 앱에서 시계 화면(위젯)을 설정해 보세요. 워치 앱에 들어가지 않고도 실시간 혈당 수치를 바로 확인할 수 있습니다.


## Step 2 시계 화면 설정하기

### Android

- ① 스마트폰에서 Wearable 앱을 실행하여 '시계 화면'을 클릭하세요.

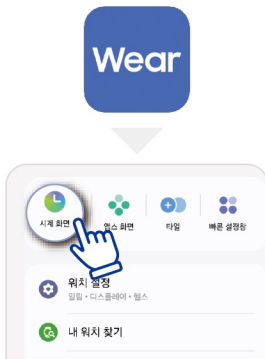

- ② 원하는 시계 화면을 선택하세요.

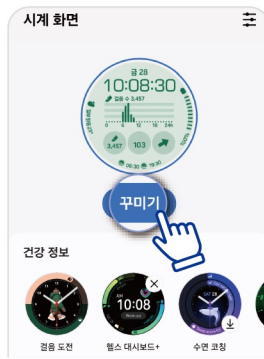

- ③ 원하는 컴플리케이션 선택 후 하단의 '저장'을 클릭하세요.



### iOS

- ① 스마트폰에서 Watch 앱을 실행하여 '페이스 갤러리'를 클릭하세요.



- ② 원하는 시계 페이스를 선택하세요.



- ③ 원하는 컴플리케이션 위치를 선택하세요.



참고 : 워치 페이스에 따라 지원하는 컴플리케이션의 종류가 다릅니다. 컴플리케이션 목록에서 케어센스 에어가 조회되지 않는 경우, 다른 시계 화면으로 변경하여 이용 부탁드립니다.

케어센스 에어 고객센터 080-910-0900

평일 09:00~18:00 (점심시간 12:30~13:30, 주말 및 공휴일 휴무)

케어센스 에어가 궁금하신가요?  
카카오톡 "채널 추가"하고 다양한 정보를 확인하세요!



케어센스 CGMS+