

PL

i.sens

Instrukcja obsługi

Sens 365

Strona internetowa



Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomoc w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej Sens365.

Aplikacja Sens365 łączy się z użytkownikami sensorów systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich środków ostrożności.

Uwaga

Przed użyciem strony internetowej Sens365 należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Nieprzestrzeganie instrukcji, ostrzeżeń i ostrzeżeń strony internetowej Sens365 może spowodować niewykrycie ciężkiej hipoglikemii lub hiperglikemii lub podjęcie nieprawidłowych decyzji dotyczących leczenia.

Spis treści

Przed użyciem.....	6
Konwencje dokumentu	7
Informacje o bezpieczeństwie	8
1 Zrozumienie strony internetowej Sens365.....	10
Mechanizm działania.....	10
2 Zalecane parametry techniczne dla strony internetowej Sens365	11
2.1 Zalecany system operacyjny	11
3 Korzystanie ze strony internetowej Sens365	12
3.1 Logowanie	13
Uruchamianie strony internetowej Sens365	13
Tworzenie konta	14
Resetowanie hasła	17
Logowanie	19
Wybór trybu użytkownika	20
3.2 Wyświetlanie listy użytkowników sensorów (tryb Lekarz/Opiekun)	22
Wyświetlanie raportu użytkownika sensora z listy	22
Dodawanie ulubionych	23
Dodawanie pulpitu nawigacyjnego	24
3.3 Zarządzanie grupami (tryb świadczeniodawcy)	25
Dodawanie grup	25
Edytowanie nazw grup.....	26
Dodawanie użytkowników sensorów	27
Zapraszanie użytkowników sensorów.....	28
Zapraszanie świadczeniodawców.....	30

Zarządzanie świadczeniodawcami.....	31
Usuwanie grup	33
3.4 Raport	34
Wyświetlanie raportów.....	34
3.5 Ustawienia.....	37
Zmiana informacji o profilu	37
Zarządzanie kontami i-SENS.....	38
Resetowanie hasła	39
Zarządzanie usługami połączonymi	40
Usuwanie kont.....	41
Zmiana trybu użytkownika.....	42
Udostępnianie moich danych.....	43
Przyjmowanie zaproszeń	45
Zmiana języków.....	47
Ustawianie progu dla typu cukrzycy	48
Konfigurowanie kryteriów raportu AGP	49
Dodatek A Najczęściej zadawane pytania	50
Dodatek B Informacje techniczne	56
B.1 Wydajność.....	56
B.2 Cyberbezpieczeństwo	58

Przed użyciem

- Ten produkt wykorzystuje wyłącznie dane osobowe, na których gromadzenie użytkownik wyraził zgodę.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego produktu, należy skontaktować się z producentem lub odwiedzić jego stronę internetową.
- Sprawdź, czy urządzenie używane do uruchamiania oprogramowania jest włączone i podłączone do sieci przewodowej/bezprzewodowej.

Uwaga

- Wszystkie wymienione normy i przepisy obowiązują w dniu wydania niniejszej instrukcji.
- Firma i-SENS, Inc. starannie przygotowała informacje zawarte w niniejszej instrukcji, aby były jak najdokładniejsze. Jednakże i-SENS nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia zawarte w instrukcji. i-SENS może zmienić produkt opisany w niniejszej instrukcji lub wszelkie powiązane aplikacje bez powiadomienia w celu zwiększenia niezawodności produktu, jego funkcji lub projektu.
- Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie lub modyfikowanie niniejszej instrukcji bez uprzedniej zgody firmy i-SENS jest surowo zabronione.

Konwencje dokumentu

Definicje symboli

Symbole te dostarczają nie tylko dodatkowych informacji o produkcie i jego użytkowaniu, ale także o bezpieczeństwie.

Symbol	Opis
	Oznakowanie CE
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej / Unii Europejskiej
	Wyrób medyczny
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub elektroniczną instrukcją obsługi
	Producent
	Numer modelu
	Unikalny identyfikator urządzenia

Informacje o bezpieczeństwie

Przeznaczenie

Sens365 jest przeznaczony do użytku przez użytkowników domowych i pracowników służby zdrowia, aby pomóc osobom chorym na cukrzycę i ich lekarzom w przeglądzie, analizie i ocenie historycznych danych dotyczących poziomu glukozy w celu wsparcia skutecznego leczenia cukrzycy.

Ważne informacje dla użytkownika

- Aby korzystać z Sens365, należy utworzyć konto i-SENS.
- Sens365 jest dodatkową przeglądarką dla systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air i nie jest przeznaczona do podejmowania decyzji dotyczących leczenia ani do stosowania jako substytut profesjonalnej porady medycznej. Sens365 nie gwarantuje odbioru danych dotyczących poziomu glukozy w czasie rzeczywistym przez użytkownika systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air.
- Ostrzeżenia i przestrogi muszą zostać przeczytane i zrozumiane przed użyciem Sens365 i muszą być ściśle przestrzegane. Sens365 musi być używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia

- Użytkownicy systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air oraz członkowie ich rodzin i opiekunowie nie mogą podejmować decyzji dotyczących leczenia w oparciu o dane dotyczące poziomu glukozy uzyskane z Sens365. Ponadto Sens365 nie oferuje żadnych porad medycznych i nie może być wykorzystywany w tym celu. Aby podjąć decyzję o leczeniu, należy skonsultować się z lekarzem.
- Instytucje medyczne i lekarze nie mogą wykorzystywać wyłącznie danych dotyczących poziomu glukozy dostarczonych przez Sens365 do podejmowania decyzji dotyczących leczenia lub analizy.

Środki ostrożności

- Użytkownik systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air musi włączyć funkcję udostępniania, aby wysyłać dane dotyczące poziomu glukozy do swoich świadczeniodawców (członków rodziny, opiekuna prawnego, instytucji medycznych, personelu medycznego), a jeśli świadczeniodawcy chcą wyświetlić udostępnioną zawartość, muszą pobrać aplikację Sens365 i połączyć się z użytkownikiem systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air.
- Świadczeniodawcy muszą być połączeni z użytkownikiem systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air, a urządzenia inteligentne świadczeniodawców muszą być połączone z Internetem, aby móc przeglądać informacje użytkownika systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air za pośrednictwem Sens365.
- Jeśli urządzenie inteligentne użytkownika systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air lub świadczeniodawcę (członka rodziny, opiekuna prawnego, placówki medycznej, personelu medycznego) jest wyłączone, znajduje się w trybie samolotowym lub nie jest połączone z Internetem, dane dotyczące poziomu glukozy mogą nie zostać wysłane lub odebrane.
- Świadczeniodawcy (członkowie rodziny, opiekunowie prawni, instytucje medyczne, personel medyczny) nie mogą zarządzać poziomem glukozy użytkowników systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air. Użytkownik systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air musi być podmiotem zarządzającym poziomem glukozy i nie może być zależny od świadczeniodawców (członków rodziny, opiekunów prawnych, instytucji medycznych, personelu medycznego) w zakresie podejmowania niezbędnych działań.
- Jeśli świadczeniodawcy (członek rodziny, opiekun prawny, instytucja medyczna, personel medyczny) przerwą połączenie, treści przesyłane przez użytkownika systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air nie będą mogły być przeglądane.

1 Zrozumienie strony internetowej Sens365

Mechanizm działania

Niniejszy produkt jest dodatkowym oprogramowaniem wyświetlającym, które zbiera i zapisuje przetworzone dane dotyczące poziomu glukozy za pomocą systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air firmy i-SENS. System jest w stanie wysyłać dane i wyświetlać informacje na inteligentnych urządzeniach z systemem Android i iOS. Dane dotyczące poziomu glukozy zebrane i przetworzone przez system ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air firmy i-SENS mogą być bezpiecznie przesyłane do świadczeniodawców (w tym członków rodziny, opiekunów prawnych, instytucji medycznych i personelu medycznego) za pomocą protokołu szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL).

2 Zalecane parametry techniczne dla strony internetowej Sens365

Następujące systemy operacyjne zostały zweryfikowane jako kompatybilne przez ich producentów.

2.1 Zalecany system operacyjny

Uwaga

Należy upewnić się, że używany system operacyjny spełnia zalecane wymagania. Prawidłowe działanie strony internetowej Sens365 nie jest gwarantowane w przypadku systemów operacyjnych, które nie zostały zweryfikowane jako kompatybilne.

System operacyjny	Rozdzielczość
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari	1280 x 800

3 Korzystanie ze strony internetowej Sens365

Stronę internetową Sens365 można uruchomić i monitorować odczyty poziomu glukozy zmierzone przez podłączony system ciągłego monitorowania glukozy. Aby zalogować się do strony internetowej Sens365, należy utworzyć konto. Korzystanie z różnych funkcji oferowanych przez stronę internetową Sens365 zwiększa efektywność zarządzania cukrzycą.


Ta sekcja pomoże:

1. Zarejestrować się i zalogować do strony internetowej Sens365.
2. Wyświetlić listę użytkowników sensorów.
3. Zarządzać grupami, użytkownikami sensorów i świadczeniodawcami.
4. Wyświetlać ekran raportów i raporty dotyczące poziomu glukozy.
5. Edytować podstawowe informacje i zarządzać kontami i-SENS, zmieniając ustawienia.

3.1 Logowanie

Uruchamianie strony internetowej Sens365

- 1 Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres URL strony internetowej Sens365.
Adres URL: <https://sens365.com>
- 2 Wyświetlony zostanie ekran startowy strony internetowej Sens365.

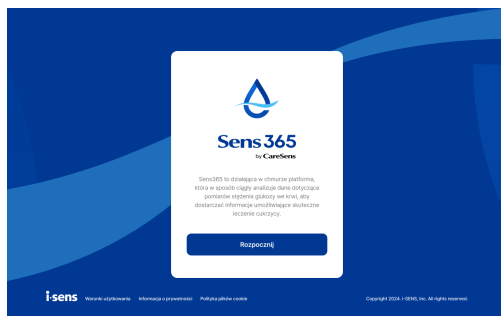

Tworzenie konta

Jeśli nie masz konta Sens365, przejdź do ekranu Utwórz konto na ekranie Zaloguj się, aby się zarejestrować.

1 Kliknij **Uruchom Sens365** na ekranie startowym witryny Sens365.


2 Po wyświetleniu ekranu logowania kliknij przycisk **Utwórz konto**.

- Nawet jeśli zdecydujesz się skorzystać z prostego procesu logowania, możesz zarejestrować się za pomocą konta i-SENS.
- Aby zarejestrować się przy użyciu prostego procesu logowania, wprowadź swój kraj zamieszkania, język i informacje o użytkowniku oraz zaakceptuj wymagane warunki.

Uwaga

W razie potrzeby zmień język w prawym górnym rogu.

3 Wybierz swój kraj, a następnie kliknij przycisk **Ok**.

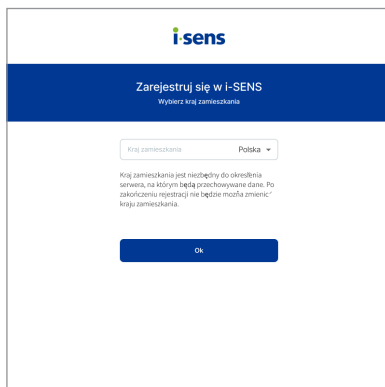

The screenshot shows the i-sens registration interface. At the top is the i-sens logo. Below it is a dark blue header with the text "Zarejestruj się w i-SENS" and "Wybierz kraj zamieszkania". The main area contains a dropdown menu labeled "Kraj zamieszkania" with "Polska" selected. Below the dropdown is a warning message: "Kraj zamieszkania jest niezbędny do określania serwera, na którym będą przechowywane dane. Po zakończeniu rejestracji nie będzie można zmienić kraju zamieszkania." At the bottom is a blue button labeled "Ok".

4 Zweryfikuj swój adres e-mail.



The screenshot shows the i-sens registration interface for email verification. At the top is the i-sens logo. Below it is a dark blue header with the text "Zarejestruj się w i-SENS" and "Zweryfikuj adres e-mail, aby się zarejestrować." The main area contains an "Email" field with "CareSens@i-sens.com" entered. Below the field is a message: "Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny." Below this is a grey button labeled "Wyślij ponownie". Further down is a "Kod weryfikacyjny 5:00" field with "123456" entered. At the bottom is a blue button labeled "Zweryfikuj".

5 Zaakceptuj wymagane warunki.



Zarejestruj się w i-SENS
Zapoznaj się z warunkami użytkownika i-SENS i wyraz na nie zgodę.

☒ Wyraz zgodę na wszystko

Zgoda na udostępnienie i-SENS

☒ Warunki użytkowania zintegrowanego członkostwa i-SENS
Wyrażam zgodę

☒ Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
Wyrażam zgodę

Zgoda na CareSens Air

☒ Warunki użytkowania systemu do ciągłego monitorowania glikemii i-SENS
Wyrażam zgodę

☒ Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
Wyrażam zgodę

☒ Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych
Wyrażam zgodę

Ok

6 Wprowadź hasło i wypełnij wszystkie informacje, a następnie zakończ rejestrację konta.



Zarejestruj się w i-SENS

Email

CareSens@i-sens.com

Hasło

••••••••

Potwierdź hasło

••••••••

Nazwa

CareSens

Data urodzenia

1984-02-11

Płeć


Wolę nie odpowiadać

Ok

Resetowanie hasła


Jeśli zapomnisz hasła lub musisz je zmienić ze względów bezpieczeństwa, możesz je zresetować.

- 1 Kliknij **Uruchom Sens365** na ekranie startowym witryny Sens365.
- 2 Po wyświetleniu ekranu logowania kliknij przycisk **Nie pamiętasz hasła?**.

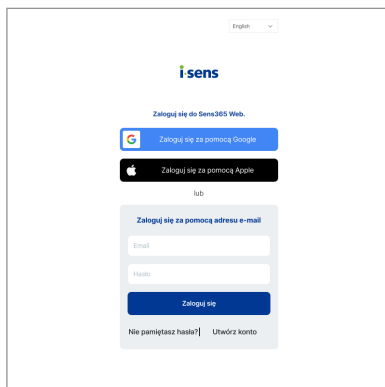


The screenshot shows the Sens365 login interface. At the top right is a language dropdown menu set to 'English'. The 'i-sens' logo is centered. Below it is the text 'Zaloguj się do Sens365 Web.' followed by three login options: 'Zaloguj się za pomocą Google' (with a Google logo), 'Zaloguj się za pomocą Apple' (with an Apple logo), and 'lub' (or). Below these is a section titled 'Zaloguj się za pomocą adresu e-mail' containing input fields for 'Email' and 'Hasło' (Password), and a 'Zaloguj się' button. At the bottom of this section are links for 'Nie pamiętasz hasła?' and 'Utwórz konto'.

- 3 Zweryfikuj swój adres e-mail.

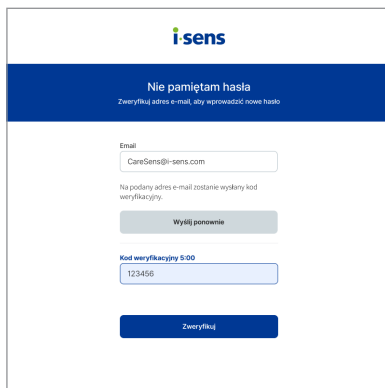

The screenshot shows the password reset verification page. It has a dark blue header with the 'i-sens' logo and the title 'Nie pamiętam hasła'. Below the header, the text 'Zweryfikuj adres e-mail, aby wprowadzić nowe hasło' is displayed. The main form area includes an 'Email' input field with the value 'CareSens@i-sens.com', a message 'Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny.' (A verification code will be sent to the specified email address.), a 'Wyślij ponownie' (Resend) button, a 'Kod weryfikacyjny 5:00' (Verification code 5:00) label, an input field for the code with the value '123456', and a 'Zweryfikuj' (Verify) button.

4 Ustaw nowe hasło.

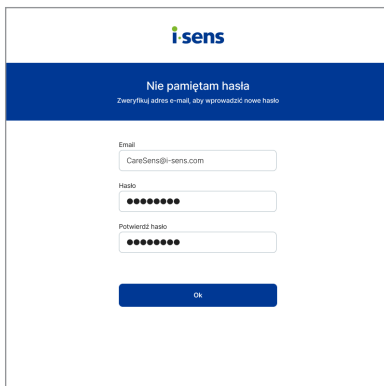

The screenshot shows a web form for resetting a password. At the top is the i.sens logo. Below it is a blue header bar with the text 'Nie pamiętam hasła' and a subtext 'Zweryfikuj adres e-mail, aby wprowadzić nowe hasło'. The form contains three input fields: 'Email' with the value 'CareSens@i-sens.com', 'Hasło' (password) with 10 dots, and 'Pówtwórz hasło' (confirm password) with 10 dots. A blue 'Ok' button is at the bottom.

i.sens

Nie pamiętam hasła
Zweryfikuj adres e-mail, aby wprowadzić nowe hasło

Email
CareSens@i-sens.com

Hasło
●●●●●●●●●●

Pówtwórz hasło
●●●●●●●●●●


Ok

5 Zaloguj się na swoje konto przy użyciu nowego hasła.

Logowanie

Jeśli masz konto Sens365, zaloguj się do Sens365 na ekranie logowania.

- 1 Kliknij **Uruchom Sens365** na ekranie startowym witryny Sens365.
- 2 Po wyświetleniu ekranu logowania do konta wprowadź zarejestrowany adres e-mail i hasło.
 - Jeśli zarejestrowano się za pomocą Logowania za pomocą serwisów społecznościowych, użyj tego samego konta, które wybrano w Logowaniu za pomocą serwisów społecznościowych.

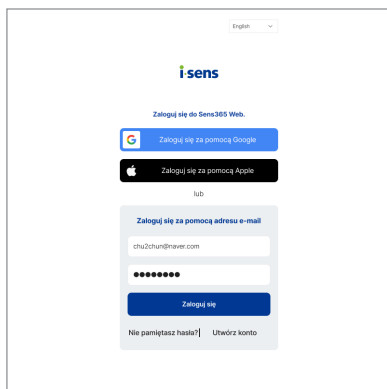

Wylogowanie

- 1 Kliknij **Wyloguj** po wybraniu profilu w prawym górnym rogu ekranu, aby się wylogować.




- 2 Jeśli wylogowanie przebiegło prawidłowo, nastąpi przekierowanie do ekranu startowego Sens365.

Wybór trybu użytkownika

Ekran wyboru trybu użytkownika zostanie wyświetlony po pierwszym zalogowaniu się do Sens365.


- Użytkownicy CareSens Air powinni wybrać tryb użytkownika Sensora.
- Świadczeniodawcy korzystający z CareSens Air powinni wybrać tryb świadczeniodawcy.

1 Ekran wyboru trybu użytkownika zostanie wyświetlony po pierwszym zalogowaniu się do strony internetowej Sens365.

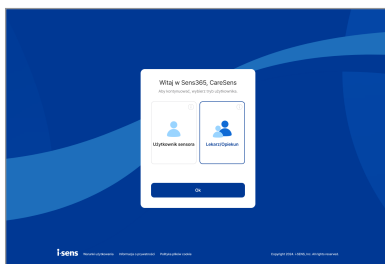


2 Wybierz **Użytkownik sensora** lub **Leczący/Opiekun** w zależności od celu użytkowania.

3 W przypadku użytkownika sensora na ekranie startowym pojawi się raport.

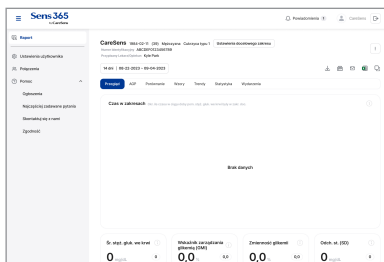


W przypadku świadczeniodawcy na ekranie startowym wyświetlana jest lista użytkowników sensorów.

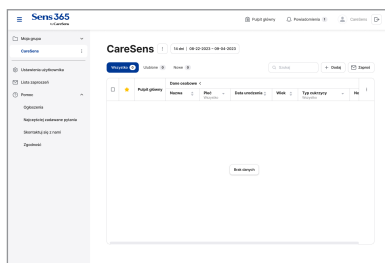


3.2 Wyświetlanie listy użytkowników sensorów (tryb Lekarz/Opiekun)

Wyświetlanie raportu użytkownika sensora z listy

- Po wybraniu opcji Grupa z menu po lewej stronie wyświetlana jest lista użytkowników sensorów wybranej grupy.

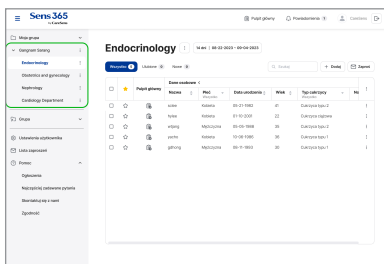


- Po wybraniu wiersza użytkownika sensora na liście użytkowników sensorów można wyświetlić raport dotyczący wybranego użytkownika sensora.

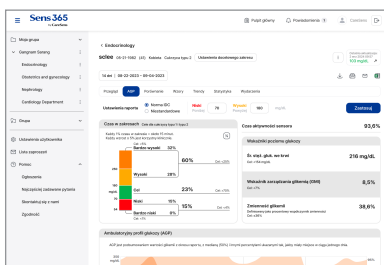


Dodawanie ulubionych

Często wyszukiwanych użytkowników sensorów z listy użytkowników sensorów można dodać do listy ulubionych.

- 1 Kliknij ☆ po lewej stronie żądanego użytkownika sensora z listy użytkowników sensorów.
Po dodaniu do ulubionych ☆ zmieni kolor na żółty.

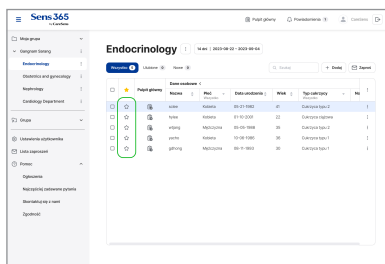

- 2 Sprawdź dodanego użytkownika sensora na liście ulubionych.

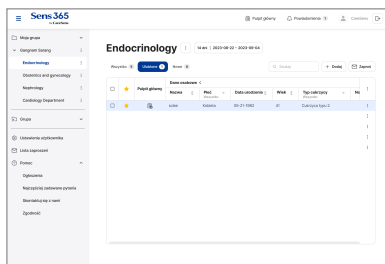

- 3 Po dodaniu użytkownika sensora do listy ulubionych, ponowne kliknięcie ☆ usuwa go z listy ulubionych.


Dodawanie pulpitu nawigacyjnego

Sens365 oferuje funkcję pulpitu nawigacyjnego, aby móc szybko przeglądać raporty wielu użytkowników sensorów.


- 1 Pulpit główny można wyświetlić, klikając **Pulpit główny** w prawym górnym rogu ekranu.



- 2 Kliknij **Pulpit główny** żądanego użytkownika z listy użytkowników sensorów, aby dodać użytkownika sensora do pulpitu nawigacyjnego.

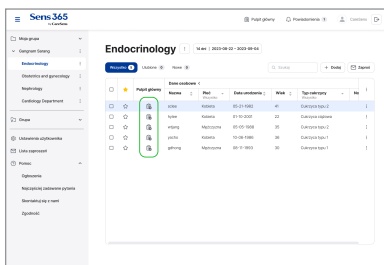

- 3 Otwórz „Pulpit główny” i sprawdź, czy wybrany użytkownik sensora został dodany.

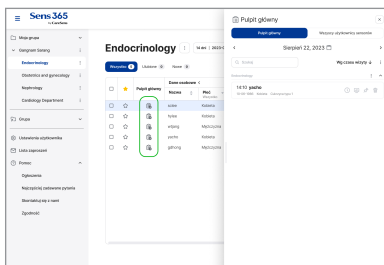

- 4 Kliknij , aby usunąć użytkownika sensora z pulpitu nawigacyjnego.
- 5 Aby wyczyścić pulpit główny, kliknij  i **Wyczyść listę oczekujących**.

Uwaga


Kliknij , aby przypiąć użytkowników sensora do listy oczekujących.

Użytkownicy sensorów przypięci do listy oczekujących nie są z niej usuwani.


3.3 Zarządzanie grupami (tryb świadczeniodawcy)

Dodawanie grup


1 Kliknij **Grupy** w menu po lewej stronie i kliknij **Dodaj grupę**.

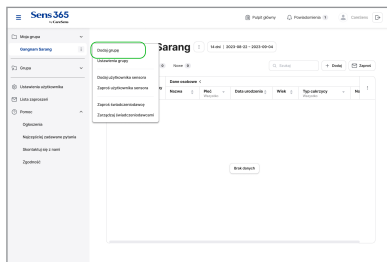

2 Wprowadź nazwę grupy, którą chcesz dodać.

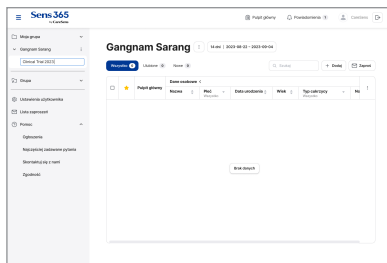


3 Utworzona zostanie grupa o wprowadzonej nazwie.

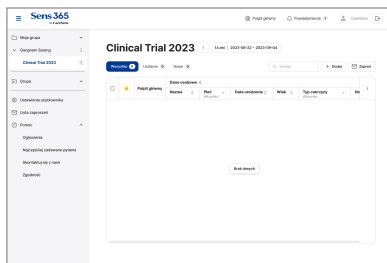


Edytowanie nazw grup


- 1 Aby edytować nazwę grupy, kliknij  grupy, którą chcesz edytować, a następnie kliknij **Ustawienia grupy**.

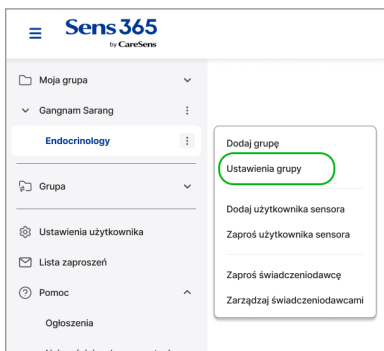

- 2 Wprowadź nową nazwę grupy.

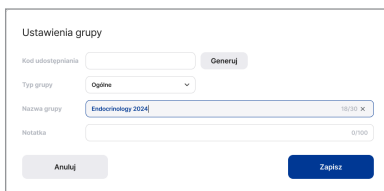The screenshot shows the 'Ustawienia grupy' (Group Settings) form. It includes fields for 'Kod udostępniania' (with a 'Generuj' button), 'Typ grupy' (set to 'Opłata'), 'Nazwa grupy' (containing 'Endocrinology 2024' with a character count '18/30'), and 'Notatka' (with a character count '0/100'). At the bottom are 'Anuluj' and 'Zapisz' buttons.

- 3 Sprawdź edytowaną nazwę grupy.

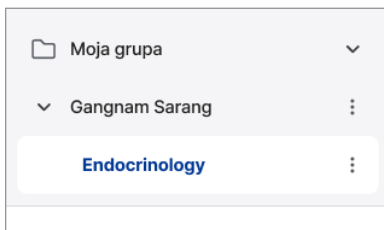


Dodawanie użytkowników sensorów

- 1 Aby dodać nowego użytkownika sensora do listy grup, kliknij **Dodaj** w prawym górnym rogu listy.



- 2 Wprowadź kod udostępniania dodawanego użytkownika sensora i kliknij **Ok**.

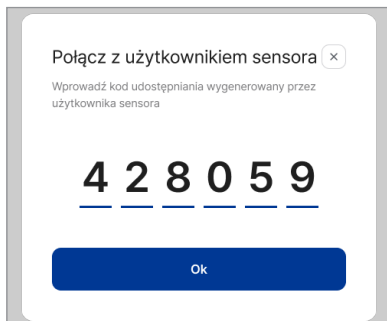


Uwaga

Kod udostępniania można utworzyć w aplikacji CareSens Air używanej przez użytkownika sensora. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji CareSens Air.

- 3 Jeśli wprowadzony kod udostępniania jest prawidłowy, użytkownik sensora zostanie dodany do listy.

Zapraszanie użytkowników sensorów

- 1 Aby zaprosić użytkownika sensora do grupy, kliknij  grupy i kliknij **Zaproś użytkownika sensora**.

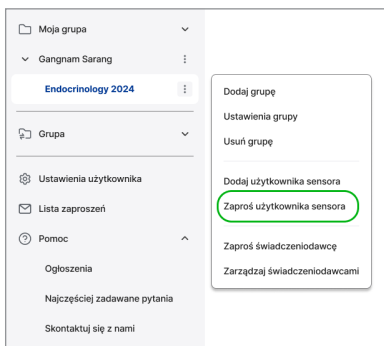

- 2 Wprowadź nazwę grupy, która ma być wyświetlana zaproszonemu użytkownikowi sensora, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

Zrzutek ekranu przedstawiający formularz o tytule 'Przypomnienie!'. Treść formularza informuje, że nazwa grupy jest widoczna dla innych i sugeruje zmianę nazwy. Poniżej znajduje się pole tekstowe z tytułem 'Nazwa grupy' i zawartością 'Endocrinology 2024'. Po prawej stronie pola widoczny jest limit znaków '18/30' oraz ikona 'X'. Na dole formularza znajdują się dwa przyciski: 'Anuluj' i 'Dalej'.

Uwaga

Wprowadzona nazwa grupy będzie widoczna dla zaproszonego użytkownika sensora.

- 3** Sprawdź utworzony kod udostępniania i kliknij **Zaproszenie przez e-mail**.

Kod udostępniania

Poproś użytkownika sensora o wprowadzenie kodu udostępniania w aplikacji CareSens Air lub na stronie internetowej Sens365.

123456 ↺

Kopiuuj

Zaproszenie przez e-mail

- 4** Wprowadź adres e-mail użytkownika sensora, którego chcesz zaprosić i kliknij **Wyślij**.

Zaproszenie przez e-mail

Wyślij zaproszenie na adres e-mail

Wprowadź adres e-mail, aby wysłać kod udostępniania. 3/10

parkceon@naver.com × kpark@i-sens.com × kyle

Wyślij

- 5** Wiadomość e-mail z zaproszeniem zostanie wysłana na podany adres e-mail.

Sens365
i.sens

"CareSens@i-sens.com" zaprasza Cię do dołączenia do grupy.

Wprowadź kod udostępniania poniżej w aplikacji CareSens Air (Ustawienia > Połączenia > Świadczeniowcy > Połącza > Wprowadź kod udostępniania) w sieci Sens365 (Ustawienia > Połączenia > Wprowadź kod udostępniania).

Nazwa grupy	Endocrinology 2024
Kod udostępniania	017B12


Po wprowadzeniu kodu udostępniania Twoje dane zostaną udostępnione grupie.

Nie odpowiadaj na tę wiadomość e-mail.
Copyright 2024. i-SENS, Inc. all rights reserved.


i.sens
www.i-sens.com

Zapraszanie świadczeniodawców

- 1 Aby zaprosić świadczeniodawcę do grupy, kliknij  grupy i kliknij **Zaproś świadczeniodawcę**.

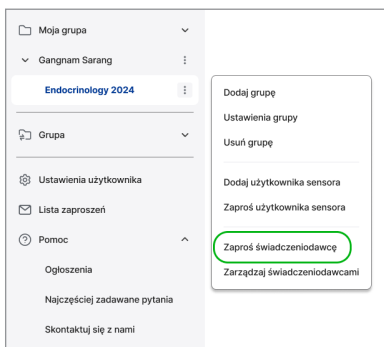


- 2 Wprowadź adres e-mail świadczeniodawcy, którego chcesz zaprosić, i kliknij **Wyślij**.

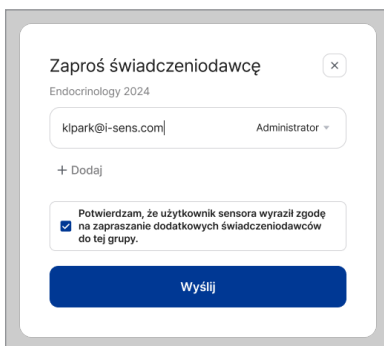
The screenshot shows a modal window titled 'Zaproś świadczeniodawcę' (Invite Provider) with a close button (X) in the top right corner. Below the title, the group name 'Endocrinology 2024' is displayed. There is a text input field containing the email address 'klpark@i-sens.com' and a dropdown menu showing 'Administrator'. Below these fields is a '+ Dodaj' (Add) button. At the bottom, there is a checkbox with a checkmark and the text 'Potwierdzam, że użytkownik sensora wyraził zgodę na zapraszanie dodatkowych świadczeniodawców do tej grupy.' (I confirm that the sensor user has agreed to invite additional providers to this group.). A large blue button labeled 'Wyślij' (Send) is at the bottom.

Zarządzanie świadczeniodawcami


- 1** Aby zarządzać świadczeniodawcami w grupie, kliknij **⋮** grupy i kliknij **Zarządzaj świadczeniodawcami**.

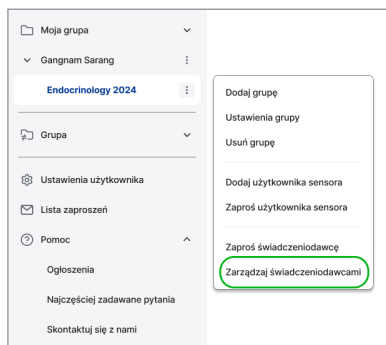


- 2** Wybierz grupę do zarządzania z grup wyświetlanych na liście zarządzania świadczeniodawcami grupy.

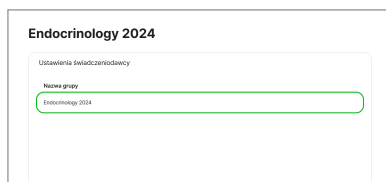

- 3** Zostaną wyświetleni świadczeniodawcy należący do wybranej grupy.

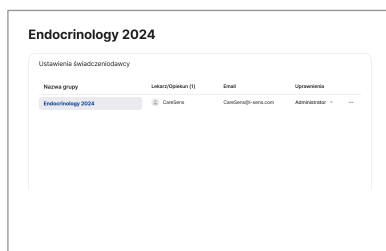


- 4 Aby zmienić uprawnienia świadczeniodawców w grupie, kliknij ▼ dla uprawnień świadczeniodawcy i wybierz uprawnienie do zmiany.

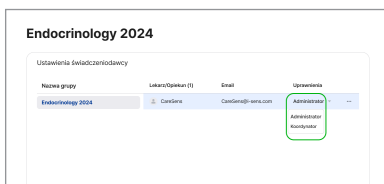

Uwaga

Dostępne są uprawnienia administratora i koordynatora.

- 5 Aby usunąć świadczeniodawcę z grupy, kliknij *** po prawej stronie świadczeniodawcy do usunięcia i kliknij **Usuń**.

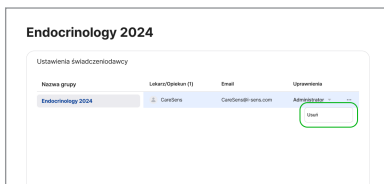


Usuwanie grup

Uwaga

Grupy można usuwać, jeśli nie ma w nich zarejestrowanych użytkowników sensorów.

- 1 Aby usunąć grupę, kliknij  grupy do usunięcia w menu po lewej stronie, a następnie kliknij **Usuń grupę**.

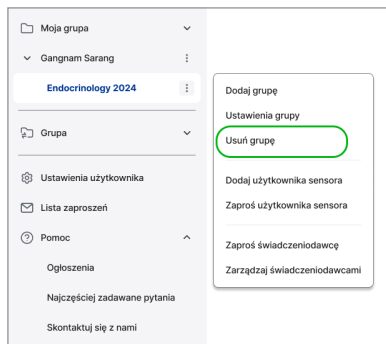

- 2 Kliknij **Ok** gdy pojawi się wyskakujące okienko z potwierdzeniem usunięcia. Wybrana grupa zostanie usunięta.




3.4 Rapport

Wyświetlanie raportów

1 Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić raport.

- Tryb użytkownika sensora: Kliknij  **Raport** w lewym górnym menu.
- Tryb świadczeniodawcy: Kliknij wierszżądanego użytkownika z listy użytkowników sensorów.

2 Wyświetlony zostanie ekran „Raport”.

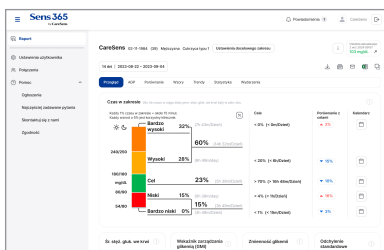

 Uwaga

- W trybie użytkownika sensora najpierw wyświetlany jest ekran „Przegląd”.
- W trybie świadczeniodawcy najpierw wyświetlany jest ekran „AGP”.

3 Każdy raport składa się z następujących elementów.

Raport	Treść
Przegląd	Dostępne są następujące informacje dotyczące wybranego okresu. • Czas w zakresach • Średni poziom glukozy • Wskaźnik zarządzania poziomem glukozy (GMI) • Zmienność stężenia glukozy • Odchylenie standardowe • Średni dzienny poziom glukozy • Insulina • Dzienny czas w zakresach • Czas aktywności CGM • Informacje o urządzeniu • Sensor • Min./Maks. stężenie glukozy wg wydarzenia (pomiar z palca) • Ketony • GKI • Średni posiłek dziennie • Ćwiczenia
AGP	Podany jest standard AGP dla wybranego okresu.
Porównanie	Tabela i wykres służą do porównywania poziomów glukozy w poszczególnych okresach. • Porównanie poziomu glukozy w granicach celu • Porównanie (zmienność stężenia glukozy, odchylenie standardowe, wskaźnik zarządzania stężeniem glukozy (GMI), średni poziom glukozy) • Porównanie wzorców
Wzorce	Wyświetlane są dzienne wykresy i informacje o wydarzeniach dotyczące obszarów, w których w wybranym okresie wystąpił niski poziom glukozy, czas w zakresach i wysoki poziom glukozy.
Trendy	Wyświetlane są wykresy dzienne i tygodniowe dla wybranego okresu.

Raport	Treść
Statystyki	Dostępne są następujące informacje dotyczące wybranego okresu. • Czas w zakresach • Średni poziom glukozy • Średnia zmienność poziomu glukozy • Średni czas aktywności CGM • Godzinowy czas w zakresach • Średnia godzinowa wartość glukozy • Średnia godzinowa zmienność poziomu glukozy • Średni godzinowy czas aktywności CGM
Wydarzenia	Wydarzenia wprowadzone przez użytkownika w wybranym okresie są przedstawione w tabeli.

- 4 Aby zapisać raport, kliknij  w prawym górnym rogu.
Można wybrać raport i zapisać go jako plik PDF.
- 5 Aby wydrukować raport, kliknij  w prawym górnym rogu.
Można wybrać raport i wydrukować go.
- 6 Aby wysłać raport pocztą e-mail, kliknij  w prawym górnym rogu.
Możesz wysłać plik PDF raportu na określony adres e-mail.

Zarządzanie kontami i-SENS

- 1 Aby zarządzać kontem, kliknij opcję **Przejdź do ustawień konta i-SENS** na ekranie podstawowych informacji.

Profil

Dane osobowe

Nazwa	CareSens	Email	CareSens@i-sens.com
Data urodzenia	02-11-1984	Wiek	38
Płeć	Mężczyzna	Telefon	010-1234-5678
Typ użytkownika	Całkowicie typ 1	Ustawienia	Wybierz ustawienia domyślne

Przejdź do ustawień konta i-SENS

- 2 Kliknij **Edytuj profil** i sprawdź informacje wprowadzone podczas tworzenia konta.

CareSens
CareSens@i-sens.com

- Edytuj profil
- Zmień hasło
- Zarządzaj usługami łączności
- Usuń konto
- Wyloguj się

Edytuj profil

Zmień zdjęcie | Usuń

E-mail
CareSens@i-sens.com

Nazwa
CareSens


Data urodzenia
1984-02-11

Płeć
Wolę nie odpowiadać


Ok

Resetowanie hasła

- 1 Aby zmienić hasło do konta, kliknij **Zmień hasło** na ekranie Przejdź do ustawień konta.

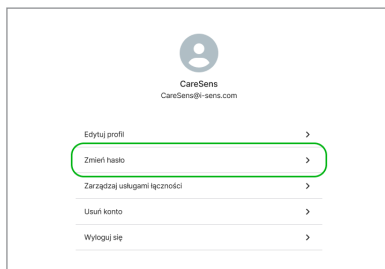

- 2 Wprowadź bieżące hasło, a następnie wprowadź nowe hasło.

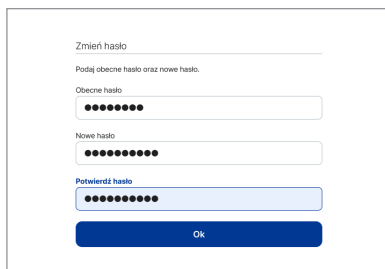


The screenshot shows the 'Zmień hasło' (Change Password) form. It includes the following fields and elements:


- Title: Zmień hasło
- Instruction: Podaj obecne hasło oraz nowe hasło.
- Field: Obecne hasło (Current password) with a masked input field.
- Field: Nowe hasło (New password) with a masked input field.
- Field: Potwierdź hasło (Confirm password) with a masked input field.
- Button: Ok

Zarządzanie usługami połączonymi

- 1** Aby zarządzać usługami podłączonymi, kliknij **Zarządzaj usługami łączności** na ekranie **Przejdź do ustawień konta**.

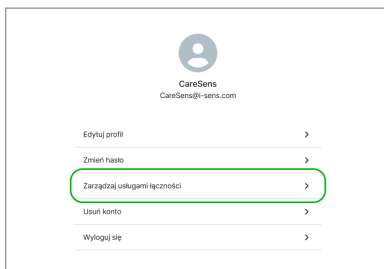


- 2** Możesz sprawdzić listę usług używanych z bieżącym kontem.

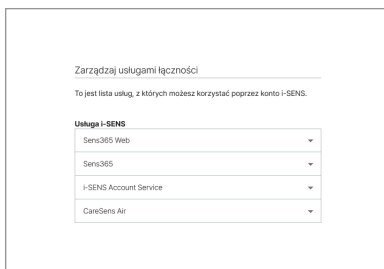


Usuwanie kont

- 1** Aby usunąć konto, kliknij **Usuń konto** na ekranie **Przejdź do ustawień konta**.

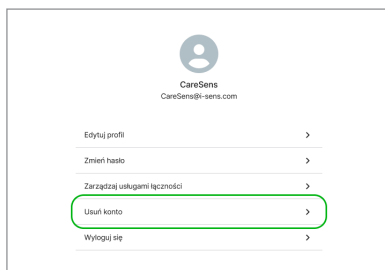


- 2** Podczas usuwania konta sprawdź powiadomienie i kliknij **Zgadzam się** i **Ok**, aby zakończyć proces.

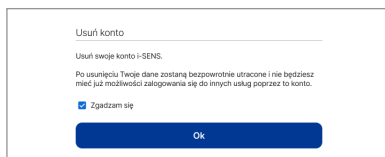


Zmiana trybu użytkownika

- 1 Aby zmienić tryb pracy, kliknij **Przełącz tryb użytkownika** na ekranie informacji podstawowych.

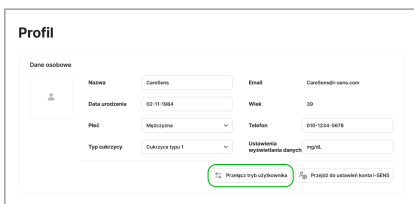

- 2 Po wyświetleniu wyskakującego okienka „Przełącz tryb użytkownika” wybierz tryb użytkownika, na który chcesz zmienić, i kliknij **Ok**.

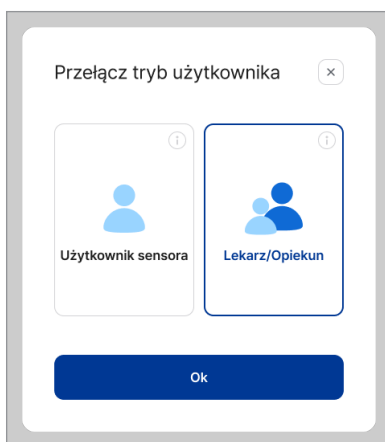


- 3 Układ ekranu zostanie zmieniony zgodnie z wybranym trybem użytkownika.

Udostępnianie moich danych


Uwaga

Aby wprowadzić kod udostępniania danych dotyczących glukozy, tryb musi być ustawiony na użytkownika sensora.


- 1 Aby udostępnić dane dotyczące glukozy nowemu świadczeniodawcy, kliknij **Połączenia**. Zostanie wyświetlona lista świadczeniodawców, którzy otrzymają udostępnione dane.

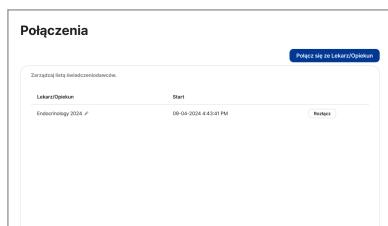

- 2 Aby wprowadzić kod udostępniania, kliknij **Połącz się ze Lekarzem/Opiekunem** w prawym górnym rogu.
- 3 Po wprowadzeniu kodu udostępniania świadczeniodawcy, który ma otrzymać udostępnione dane, kliknij **Ok**.

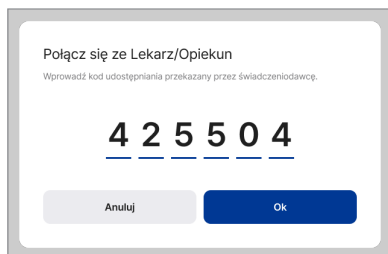


- 4 Jeśli wprowadzony kod udostępniania jest prawidłowy, grupa zostanie dodana do listy świadczeniodawców.

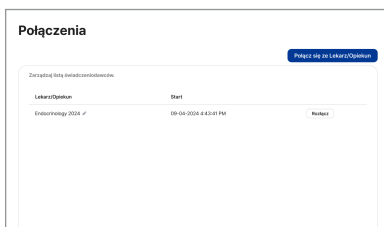

- 5 Aby przerwać udostępnianie danych istniejącemu świadczeniodawcy, kliknij **Rozłącz** po prawej stronie świadczeniodawcy.




- 6 Kliknij **Ok**, gdy pojawi się wyskakujące okienko z potwierdzeniem zatrzymania udostępniania. Udostępnianie wybranemu świadczeniodawcy zostanie zatrzymane.

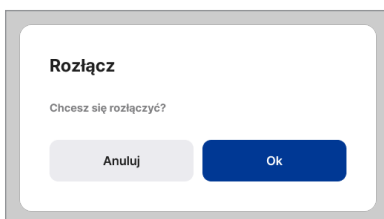


Przyjmowanie zaproszeń


- 1 Jeśli otrzymasz zaproszenie do grupy jako zarządzający opieką zdrowotną, informacje o zaproszeniu zostaną wyświetlone w **Lista zaproszeń**.

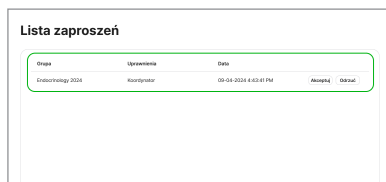

- 2 Aby zaakceptować zaproszenie, kliknij przycisk **Akceptuj**.
- 3 Kliknij **Ok**, gdy pojawi się wyskakujące okienko potwierdzenia akceptacji.

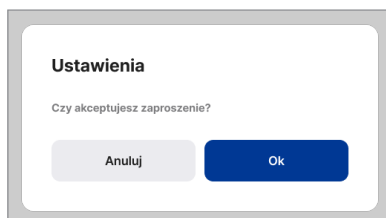


- 4 Zaproszona grupa zostanie wyświetlona w menu po lewej stronie.

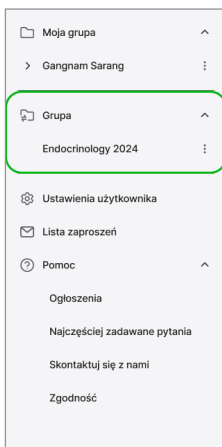


- 5 Aby odrzucić zaproszenie, kliknij **Odrzuć**.

- 6 Kliknij **Ok**, gdy pojawi się wyskakujące okienko z potwierdzeniem odrzucenia. Zaproszona grupa nie zostanie dodana do menu.

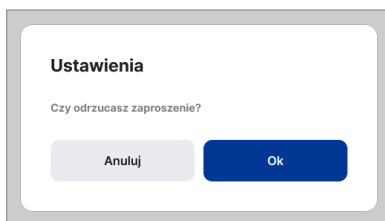

Zmiana języków

- 1 Aby zmienić język, kliknij kolejno Kliknij  w prawym dolnym rogu ekranu.
- 2 Wybierz żądany język na ekranie wyboru języka.

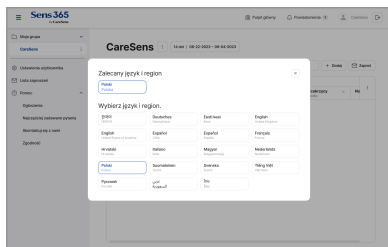

Ustawianie progu dla typu cukrzycy

- 1 Aby ustawić próg dla docelowego zakresu glukozy dla cukrzycy, kliknij kolejno **Raport > Ustawienia docelowego zakresu**.
- 2 Po wyświetleniu strony „Ustawienia docelowego zakresu” należy ustawić docelowy poziom glukozy dla danego obszaru.


Uwaga

- Kliknięcie przycisku **Reset** powoduje zresetowanie progu dla danego typu cukrzycy.
- Zmiana ustawień docelowego zakresu glukozy dotyczy Czasu w zakresach użytkownika sensora. (AGP, Porównanie wyłączone)

- 3 Jeśli konieczna jest zmiana czasu aplikacji dzień/noc, Czas rozpoczęcia dnia i Czas rozpoczęcia nocy można skonfigurować w sekcji Dzień i noc.

Konfigurowanie kryteriów raportu AGP

- 1 Aby ustawić niestandardowy zakres raportu AGP, kliknij **Raport > AGP**.
- 2 W przypadku ustawienia kryteriów raportu w górnej części ekranu ustawień użytkownika można zmienić kryteria dolne lub górne.

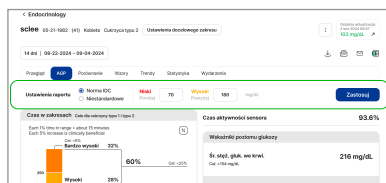

- 3 Po kliknięciu przycisku **Zastosuj**, raport AGP na ekranie zostanie wyświetlony w oparciu o ustawioną wartość.

Dodatek A Najczęściej zadawane pytania

Niniejszy rozdział przedstawia sytuacje, które mogą wystąpić podczas korzystania z CareSens Air oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia. Jeśli zaistnieje jakiegokolwiek sytuacja, która nie została przedstawiona w tym rozdziale, lub jeśli wystąpi problem, którego nie można rozwiązać samodzielnie, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Ta sekcja pomoże:

- Zidentyfikować przyczyny problemów występujących podczas korzystania z CareSens Air.
- Rozwiązać problemy występujące podczas korzystania z CareSens Air.

Pulpit główny

Lekarz/Opiekun

Jak wyszukać użytkowników sensorów?

Użytkowników sensorów można wyszukiwać według nazw, notatek i tagów zawartych na liście.

Jak mogę zarządzać lub monitorować określonego użytkownika sensora?

Klikając ★ dla użytkownika na liście użytkowników sensorów, można ustawić go jako ulubionego. Następnie można zarządzać nim osobno w zakładce ulubionych.

Jak mogę filtrować listę użytkowników sensorów?

Listę użytkowników sensorów można przeglądać, stosując opcje filtrowania lub sortowania dostępne w nagłówku tabeli na liście użytkowników sensorów.

Czym jest lista użytkowników sensorów?

Jest to lista użytkowników sensorów połączonych w celu zarządzania w danej grupie. Można sprawdzić informacje o glukozie w czasie rzeczywistym użytkowników sensorów w grupie.

Ogólne

Użytkownik sensora

Jak przesłać dane dotyczące poziomu glukozy?

Odczyty poziomu glukozy w aplikacji CareSens Air będą przesyłane automatycznie. Dane można również przesłać ręcznie w aplikacji CareSens Air > **Ustawienia** > **Prześlij teraz**. Dane można jednak przysyłać tylko wtedy, gdy masz połączenie z Internetem.

Jakie są zasady dotyczące nieaktywnych kont Sens365?

Jeśli użytkownik nie korzysta z Sens365 przez rok, jego konto zostanie sklasyfikowane jako nieaktywne, a jego dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane oddzielnie. Te informacje będą przechowywane przez rok i mogą zostać usunięte, jeśli nie ma prawnego wymogu ich przechowywania. i-SENS powiadomi nieaktywnych użytkowników 30 dni przed dezaktywacją ich konta i przekaze informacje o przechowywanych danych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje konto zostało dezaktywowane, po prostu zaloguj się przed upływem okresu dezaktywacji. Nawet jeśli konto zostanie dezaktywowane, o ile dane osobowe nie zostały usunięte, można się zalogować, uzyskać zgodę użytkownika, przywrócić dezaktywowane konto i kontynuować korzystanie z usługi.

Jak mogę zapewnić, że dane przechowywane w Sens365 są chronione?

Dane osobowe i wrażliwe przechowywane w Sens365 są szyfrowane. Podczas transmisji danych protokół szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) zapewnia poufność i integralność danych, chroniąc je przed podsłuchem i zmianami.

Lekarz/Opiekun

Jakie są zasady dotyczące nieaktywnych kont Sens365?

Jeśli użytkownik nie korzysta z Sens365 przez rok, jego konto zostanie sklasyfikowane jako nieaktywne, a jego dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane oddzielnie. Te informacje będą przechowywane przez rok i mogą zostać usunięte, jeśli nie ma prawnego wymogu ich przechowywania. i-SENS powiadomi nieaktywnych użytkowników 30 dni przed dezaktywacją ich konta i przekaze informacje o przechowywanych danych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje konto zostało dezaktywowane, po prostu zaloguj się przed upływem okresu dezaktywacji. Nawet jeśli konto zostanie dezaktywowane, o ile dane osobowe nie zostały usunięte, można się zalogować, uzyskać zgodę użytkownika, przywrócić dezaktywowane konto i kontynuować korzystanie z usługi.

Czy dane dodanego do grupy użytkownika sensora są bezpieczne?

Dane są bezpiecznie przesyłane podczas transmisji za pomocą protokołu szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer), a dane osobowe i wrażliwe są przechowywane w stanie zaszyfrowanym. Dostęp do danych dodanych użytkowników sensorów w grupie mają wyłącznie świadczeniodawcy należący do grupy.

Grupa

Lekarz/Opiekun

Jak mogę dołączyć do grupy innej osoby?

Lekarz/Opiekun grupy, do której chcesz zostać zaproszony(a), może kliknąć obok tej grupy i kliknąć przycisk **Zaproś świadczeniodawcę**, aby wysłać zaproszenie pocztą e-mail. Klikając  łączy e-mail z zaproszeniem, możesz zaakceptować zaproszenie i dołączyć do grupy. Ponadto możesz zaakceptować zaproszenie z list zaproszeń w menu **Ustawienia > Profil**. Adres e-mail do zapraszania musi jednak odpowiadać kontu logowania Sens365 świadczeniodawcy.

Ilu użytkowników sensorów lub świadczeniodawców może należeć do jednej grupy?

Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników sensorów i świadczeniodawców, których można dodać do grupy.

Kogo mogę zaprosić do grupy?

Możesz zaprosić użytkowników sensorów do grupy, aby zarządzać ich poziomami glukozy, a także możesz zaprosić innych świadczeniodawców do współzarządzania użytkownikami sensorów w grupie.

Co to jest kod udostępniania grupy i jak mogę go sprawdzić?

Kod udostępniania grupy to unikalny kod generowany dla każdej grupy w celu zapraszania użytkowników sensorów i zarządzania nimi. Kod udostępniania grupy można sprawdzić, klikając  w menu grupy i wybierając opcję **Zaproś użytkownika sensora**. Należy pamiętać, że każda grupa ma unikalny kod udostępniania, a raz przypisany kod udostępniania nie ulega zmianie. Jeśli chcesz go zmienić, kliknij  obok kodu udostępniania.

Jakie funkcje są dostępne w grupie?

Świadczeniodawcy tworzą grupy w celach organizacyjnych i zarządczych, aby efektywnie zarządzać użytkownikami sensorów. Gdy po raz pierwszy dołączysz do Sens365, domyślna grupa zostanie automatycznie utworzona pod Twoją nazwą. Możesz dowolnie zmieniać nazwę grupy, tworzyć podgrupy i zarządzać użytkownikami sensorów. Ponadto w ramach grupy można zapraszać lub dodawać użytkowników sensorów w celu sprawdzania ich raportów, a także zapraszać świadczeniodawców do grupy w celu współzarządzania użytkownikami sensorów.

Tryb

Użytkownik sensora

Jak skonfigurować Sens365 w trybie użytkownika sensora lub świadczeniodawcy?

Po zarejestrowaniu się w Sens365 podczas pierwszego logowania pojawi się ekran wyboru trybu. Wybierz tryb użytkownika sensora lub świadczeniodawcy, a Sens365 będzie działać w tym trybie. Tryb użytkownika można później zmienić w sekcji Profil w menu Ustawienia.

Lekarz/Opiekun

Jak mogę skonfigurować się jako użytkownik sensora lub jako Lekarz/Opiekun?

Po zarejestrowaniu się w Sens365 podczas pierwszego logowania pojawi się ekran wyboru trybu. Na tym ekranie można wybrać tryb użytkownika sensora lub świadczeniodawcy, a aplikacja Sens365 będzie działać w wybranym trybie. Później można zmienić tryb użytkownika w menu Ustawienia w sekcji Profil.

Raporty

Użytkownik sensora

Jak mogę udostępniać raporty?

Raporty można udostępniać poprzez połączenie ze Lekarz/Opiekun na dwa sposoby:

- Wprowadzić kod udostępniania dostarczony przez świadczeniodawcę w menu **Ustawienia > Połączenia > Połącz nowego użytkownika sensora**.
- Udostępnić świadczeniodawcy kod udostępniania wygenerowany w aplikacji CareSens Air (aplikacja CareSens Air > **Ustawienia > Świadczeniodawcy > Połącz > Wygeneruj kod udostępniania**).

Jak sprawdzić raporty?

Kliknij menu Raport w lewym górnym rogu. Jeśli chcesz wydrukować raport, kliknij  lub  w prawym górnym rogu ekranu raportu, aby wyświetlić raport w formacie PDF.

Lekarz/Opiekun

Jak pobrać nieprzetworzone dane dotyczące glukozy użytkownika sensora?

Nieprzetworzone dane dotyczące glukozy można pobrać w formacie CSV, klikając  w prawym górnym rogu ekranu raportu użytkownika sensora.

Jak porównać dane dotyczące poziomu glukozy użytkownika sensora?

Dane dotyczące poziomu glukozy można porównać, ustawiając dwa okresy w zakładce Porównanie na ekranie raportu użytkownika sensora.

Jak mogę sprawdzić raport?

Po kliknięciu użytkownika sensora w grupie można wyświetlić jego raport dotyczący poziomu glukozy. Jeśli chcesz wydrukować raport, kliknij ,  lub  w prawym górnym rogu ekranu raportu, aby wyświetlić raport w formacie PDF.

Udostępnianie danych

Użytkownik sensora

Co należy zrobić, jeśli nie mogę połączyć się ze Lekarz/Opiekun?

Sprawdź, czy kod udostępniania otrzymany od świadczeniodawcy jest prawidłowy.

Jak mogę przestać udostępniać swoje dane?

Aby przerwać udostępnianie danych świadczeniodawcy, przejdź do opcji Ustawienia > Połączenia i wybierz opcję rozłączenia.

Lekarz/Opiekun

W jaki sposób Lekarz/Opiekun może wyświetlić dane dotyczące poziomu glukozy przesłane przez użytkownika sensora?

Aby wyświetlić dane dotyczące poziomu glukozy przesłane przez użytkownika sensora, Lekarz/Opiekun musi być połączony z użytkownikiem sensora za pośrednictwem jego grupy stowarzyszonej. Można to zrobić na dwa sposoby:

- Pierwsza metoda polega na kliknięciu w menu grupy, gdzie zarządza się użytkownikami sensorów. Następnie kliknij przycisk **Zaproś użytkownika sensora**. Po czym należy bezpośrednio podać lub wysłać e-mailem kod udostępniania tej grupy do użytkownika sensora. Następnie użytkownik sensora wprowadza kod udostępniania grupy (aplikacja CareSens Air > **Ustawienia** > **Świadczeniodawcy** > **Połącz** > **Wprowadź kod udostępniania**). Należy pamiętać, że każda grupa ma unikalny kod udostępniania, a raz przypisany kod udostępniania nie ulega zmianie. Jeśli chcesz go zmienić, kliknij obok kodu udostępniania.
- Druga metoda polega na kliknięciu grupy zarządzającej użytkownikami sensorów, kliknięciu Dodaj użytkownika sensora, a następnie wprowadzeniu kodu udostępniania utworzonego w aplikacji CareSens Air (aplikacja CareSens Air > **Ustawienia** > **Świadczeniodawcy** > **Połącz** > **Wygeneruj kod udostępniania**) w celu dodania użytkownika sensora.

Dodatek B Informacje techniczne

B.1 Wydajność

Przeglądarka internetowa: HS-FE-01

Nazwa produktu	Sens365
Kompatybilne urządzenia medyczne	- Nazwa produktu: System ciągłego monitorowania glukozy CareSens Air - Model: CGM-ST-002
Środowisko komunikacyjne	Protokół komunikacyjny: HTTPS
Środowisko pracy	- Zalecana przeglądarka: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari - Rozdzielczość: 1280 x 800
Przesyłane i odbierane dane	- Ciągłe wartości glukozy użytkownika ze zgodnego urządzenia medycznego, dane wejściowe użytkownika (posiłki, insulina, ćwiczenia itp.) - Statystyki danych użytkownika i raporty obejmujące poziom glukozy użytkownika kompatybilnego urządzenia medycznego

Kluczowa wydajność	• Świadczeniodawcy (członkowie rodziny, kuratorzy, instytucje medyczne) korzystający z aplikacji mogą otrzymywać udostępnione dane, łącząc się z witryną użytkownika kompatybilnego urządzenia medycznego. • Wyświetla statystyki danych użytkownika zgodnego urządzenia medycznego i zapisuje raporty. • Wyświetla ciągłe wartości stężenia glukozy użytkownika ze zgodnego urządzenia medycznego oraz dane wprowadzone przez użytkownika.
Wersja oprogramowania	Wersja: 1.0.x

B.2 Cyberbezpieczeństwo

Przestrogi dotyczące cyberzagrożeń

- Należy zainstalować ochronę antywirusową lub program antywirusowy na urządzeniu inteligentnym, niezależnie od tego, czy jest to urządzenie z systemem Windows, Mac OS czy tablet, aby uniemożliwić złośliwym programom dostęp do informacji urządzenia.
- Jeśli mimo wprowadzenia kodu udostępniania nie można odbierać danych dotyczących poziomu glukozy od użytkowników sensora, należy upewnić się, że sześciocyfrowy kod udostępniania został wprowadzony prawidłowo. Jeśli ten sam problem występuje pomimo wprowadzenia prawidłowego kodu udostępniania, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta (080-910-0900).
- Jeśli użytkownik zostanie wylogowany z powodu zalogowania się innego urządzenia, należy zmienić hasło, jeśli to nie on próbował się zalogować.
- Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło więcej niż pięć razy, zresetuj je.
- Jeśli konto nie było używane przez ponad rok, staje się nieaktywne. Jeśli konto stało się nieaktywne, należy je ponownie aktywować.
- Jeśli dojdzie do incydentu cyberbezpieczeństwa związanego z aplikacją Sens365, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym dystrybutorem i właściwym organem.

Bezpieczeństwo związane z cyberzagrozeniami

- Token jest wydawany użytkownikowi, gdy jego dane uwierzytelniające zostaną zweryfikowane jako prawidłowe.
- Dla każdego żądania weryfikowana jest ważność tokena, a następnie przetwarzane jest uwierzytelnienie.
- Do wysyłania danych używana jest metoda komunikacji SSL.
- Kodowanie AES jest używane do szyfrowania danych osobowych, a dane są zapisywane w bazie danych.
- Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło więcej niż pięć razy, musisz je zresetować.
- Jeśli konto nie było używane przez ponad rok, staje się nieaktywne. Jeśli konto stało się nieaktywne, należy je ponownie aktywować.

i·sens



i-SENS, Inc.

43, Banpo-daero 28-gil
Seocho-gu, Seoul 06646, Korea
CareSensAir.com

EC REP

**Medical Technology Promedt
Consulting GmbH**

Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert, Niemcy

© 2024 i-SENS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PCGAA-000071 REV0 2024-10

