

PL

i.sens

Instrukcja obsługi

# Sens 365

## Aplikacja



Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomoc w prawidłowym korzystaniu z aplikacji Sens365. Aplikacja Sens365 łączy się z użytkownikami sensorów systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich środków ostrożności.

### Uwaga

Przed użyciem aplikacji Sens365 należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Nieprzestrzeganie instrukcji, ostrzeżeń i ostrzeżeń aplikacji Sens365 może spowodować niewykrycie ciężkiej hipoglikemii lub hiperglikemii lub podjęcie nieprawidłowych decyzji dotyczących leczenia.

# Spis treści

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Przed użyciem.....</b>                                                              | <b>6</b>  |
| Konwencje dokumentu .....                                                              | 7         |
| Informacje o bezpieczeństwie .....                                                     | 8         |
| <b>1 Zrozumienie aplikacji Sens365.....</b>                                            | <b>10</b> |
| Mechanizm działania.....                                                               | 10        |
| <b>2 Instalowanie aplikacji Sens365 .....</b>                                          | <b>11</b> |
| Zalecane specyfikacje urządzenia inteligentnego .....                                  | 11        |
| <b>2.1 Instalowanie aplikacji na urządzeniu inteligentnym z systemem Android .....</b> | <b>12</b> |
| <b>2.2 Instalowanie aplikacji na urządzeniu inteligentnym z systemem iOS.....</b>      | <b>12</b> |
| <b>3 Korzystanie z aplikacji.....</b>                                                  | <b>13</b> |
| <b>3.1 Logowanie.....</b>                                                              | <b>14</b> |
| Dla nowych użytkowników .....                                                          | 14        |
| Wcześniej zarejestrowani użytkownicy .....                                             | 19        |
| Resetowanie hasła .....                                                                | 20        |
| <b>3.2 Łączenie użytkownika sensora .....</b>                                          | <b>22</b> |
| Tworzenie kodu udostępniania .....                                                     | 22        |
| Wprowadzanie kodu udostępniania .....                                                  | 25        |
| Połączenie danych użytkownika czujnika .....                                           | 26        |
| <b>3.3 Zrozumienie ekranu głównego.....</b>                                            | <b>27</b> |
| Podstawowe informacje .....                                                            | 28        |
| Menu dolne.....                                                                        | 29        |
| Dane dotyczące glukozy.....                                                            | 31        |
| Strzałki trendu poziomu glukozy.....                                                   | 33        |
| <b>3.4 Przeglądanie funkcji aplikacji.....</b>                                         | <b>34</b> |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Przełączanie użytkowników sensorów .....                   | 35        |
| Sprawdzanie dziennika ostrzeżeń .....                      | 36        |
| Przeglądanie dziennika .....                               | 40        |
| Wyświetlanie raportów .....                                | 42        |
| <b>3.5 Zmiana ustawień .....</b>                           | <b>43</b> |
| Edytowanie i sprawdzanie profilu .....                     | 45        |
| Edytuj informacje o połączeniu .....                       | 46        |
| Wyświetlanie listy użytkowników sensorów .....             | 47        |
| Ustawianie nazwy użytkownika sensora .....                 | 48        |
| Ustawianie ostrzeżeń dla każdego użytkownika sensora ..... | 49        |
| Rozłączanie .....                                          | 50        |
| Ustawianie wysokości wykresu .....                         | 51        |
| Ustawianie kodu dostępu .....                              | 52        |
| Wyświetlanie samouczka .....                               | 53        |
| Wyświetlanie najczęściej zadawanych pytań .....            | 53        |
| Skontaktuj się z nami .....                                | 54        |
| Aktualizacja aplikacji .....                               | 56        |
| <b>3.6 Wylogowanie .....</b>                               | <b>57</b> |
| Ładowanie poprzednich danych .....                         | 58        |
| <b>Dodatek A Najczęściej zadawane pytania .....</b>        | <b>59</b> |
| <b>Dodatek B Informacje techniczne .....</b>               | <b>65</b> |
| <b>B.1 Wydajność .....</b>                                 | <b>65</b> |
| <b>B.2 Cyberbezpieczeństwo .....</b>                       | <b>68</b> |

# Przed użyciem

- Ten produkt wykorzystuje wyłącznie dane osobowe, na których gromadzenie użytkownik wyraził zgodę.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego produktu, należy skontaktować się z producentem lub odwiedzić jego stronę internetową.
- Sprawdź, czy urządzenie używane do uruchamiania oprogramowania jest włączone i podłączone do sieci przewodowej/bezprzewodowej.

## Uwaga

- Wszystkie wymienione normy i przepisy obowiązują w dniu wydania niniejszej instrukcji.
- Firma i-SENS, Inc. starannie przygotowała informacje zawarte w niniejszej instrukcji, aby były jak najdokładniejsze. Jednakże i-SENS nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia zawarte w instrukcji. i-SENS może zmienić produkt opisany w niniejszej instrukcji lub wszelkie powiązane aplikacje bez powiadomienia w celu zwiększenia niezawodności produktu, jego funkcji lub projektu.
- Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie lub modyfikowanie niniejszej instrukcji bez uprzedniej zgody firmy i-SENS jest surowo zabronione.

# Konwencje dokumentu

## Definicje symboli

Symbole te dostarczają nie tylko dodatkowych informacji o produkcie i jego użytkowaniu, ale także o bezpieczeństwie.

| Symbol                                                                            | Opis                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Oznakowanie CE                                                             |
|   | Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej / Unii Europejskiej |
|  | Wyrób medyczny                                                             |
|  | Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub elektroniczną instrukcją obsługi     |
|  | Producent                                                                  |
|  | Numer modelu                                                               |
|  | Unikalny identyfikator urządzenia                                          |

# Informacje o bezpieczeństwie

## Przeznaczenie

Sens365 jest przeznaczony do użytku przez użytkowników domowych i pracowników służby zdrowia, aby pomóc osobom chorym na cukrzycę i ich lekarzom w przeglądzie, analizie i ocenie historycznych danych dotyczących poziomu glukozy w celu wsparcia skutecznego leczenia cukrzycy.

## Ważne informacje dla użytkownika

- Aby korzystać z Sens365, należy utworzyć konto i-SENS.
- Sens365 jest dodatkową przeglądarką dla systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air i nie jest przeznaczona do podejmowania decyzji dotyczących leczenia ani do stosowania jako substytut profesjonalnej porady medycznej. Sens365 nie gwarantuje odbioru danych dotyczących poziomu glukozy w czasie rzeczywistym przez użytkownika systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air.
- Ostrzeżenia i przestrogi muszą zostać przeczytane i zrozumiane przed użyciem Sens365 i muszą być ściśle przestrzegane. Sens365 musi być używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## Ostrzeżenia

- Użytkownicy systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air oraz członkowie ich rodzin i opiekunowie nie mogą podejmować decyzji dotyczących leczenia w oparciu o dane dotyczące poziomu glukozy uzyskane z Sens365. Ponadto Sens365 nie oferuje żadnych porad medycznych i nie może być wykorzystywany w tym celu. Aby podjąć decyzję o leczeniu, należy skonsultować się z lekarzem.
- Instytucje medyczne i lekarze nie mogą wykorzystywać wyłącznie danych dotyczących poziomu glukozy dostarczonych przez Sens365 do podejmowania decyzji dotyczących leczenia lub analizy.

## Środki ostrożności

- Użytkownik systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air musi włączyć funkcję udostępniania, aby wysyłać dane dotyczące poziomu glukozy do swoich świadczeniodawców (członków rodziny, opiekuna prawnego, instytucji medycznych, personelu medycznego), a jeśli świadczeniodawcy chcą wyświetlić udostępnioną zawartość, muszą pobrać aplikację Sens365 i połączyć się z użytkownikiem systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air.
- Świadczeniodawcy muszą być połączeni z użytkownikiem systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air, a urządzenia inteligentne świadczeniodawców muszą być połączone z Internetem, aby móc przeglądać informacje użytkownika systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air za pośrednictwem Sens365.
- Jeśli urządzenie inteligentne użytkownika systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air lub świadczeniodawcę (członka rodziny, opiekuna prawnego, placówki medycznej, personelu medycznego) jest wyłączone, znajduje się w trybie samolotowym lub nie jest połączone z Internetem, dane dotyczące poziomu glukozy mogą nie zostać wysłane lub odebrane.
- Świadczeniodawcy (członkowie rodziny, opiekunowie prawni, instytucje medyczne, personel medyczny) nie mogą zarządzać poziomem glukozy użytkowników systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air. Użytkownik systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air musi być podmiotem zarządzającym poziomem glukozy i nie może być zależny od świadczeniodawców (członków rodziny, opiekunów prawnych, instytucji medycznych, personelu medycznego) w zakresie podejmowania niezbędnych działań.
- Jeśli świadczeniodawcy (członek rodziny, opiekun prawny, instytucja medyczna, personel medyczny) przerwą połączenie, treści przesyłane przez użytkownika systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air nie będą mogły być przeglądane.

# 1 Zrozumienie aplikacji Sens365

## **Mechanizm działania**

Niniejszy produkt jest dodatkowym oprogramowaniem wyświetlającym, które zbiera i zapisuje przetworzone dane dotyczące poziomu glukozy za pomocą systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air firmy i-SENS. System jest w stanie wysyłać dane i wyświetlać informacje na inteligentnych urządzeniach z systemem Android i iOS. Dane dotyczące poziomu glukozy zebrane i przetworzone przez system ciągłego monitorowania poziomu glukozy CareSens Air firmy i-SENS mogą być bezpiecznie przesyłane do świadczeniodawców (w tym członków rodziny, opiekunów prawnych, instytucji medycznych i personelu medycznego) za pomocą protokołu szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL).

## 2 Instalowanie aplikacji Sens365

Aplikację Sens365 i aplikację CareSens Air można połączyć w celu monitorowania odczytów poziomu glukozy mierzonych przez aplikację CareSens Air.

Do zainstalowania aplikacji wymagane są następujące specyfikacje urządzenia inteligentnego.

### Zalecane specyfikacje urządzenia inteligentnego

Aby zainstalować i korzystać z aplikacji na urządzeniu inteligentnym, muszą być spełnione następujące minimalne wymagania systemowe.

| System operacyjny | Wersja                 | Rozdzielczość                |
|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Android           | Android 8.0 lub nowszy | 360 x 640 pikseli lub wyższa |
| iOS               | iOS 13.2 lub nowszy    | 375 x 667 pikseli lub wyższa |

#### Uwaga

- Przed zainstalowaniem aplikacji należy sprawdzić minimalne wymagania dla urządzenia inteligentnego. Aplikacja może nie działać prawidłowo w przypadku aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia inteligentnego po jej zainstalowaniu.
- Odwiedź oficjalną stronę CareSens Air ([www.caresensair.com](http://www.caresensair.com)), aby znaleźć urządzenia inteligentne, które przeszły nasz test zgodności. Aplikacja może nie działać prawidłowo na urządzeniach inteligentnych, które nie zostały przetestowane pod kątem zgodności.
- Datę i godzinę można ustawić automatycznie w menu Ustawienia urządzenia inteligentnego. Jeśli data i godzina nie zostaną ustawione automatycznie, należy ustawić je ręcznie w przypadku podróży do innej strefy czasowej.
- Nie należy instalować aplikacji na urządzeniu inteligentnym, na którym doszło do włamania. Aplikacja może nie działać prawidłowo.

## 2.1 Instalowanie aplikacji na urządzeniu inteligentnym z systemem Android

- 1 Naciśnij , aby uruchomić aplikację Sklep Play na urządzeniu inteligentnym z systemem Android.
- 2 Wpisz „Sens365” w pasku wyszukiwania Sklepu Play i naciśnij .
- 3 Wybierz aplikację Sens365 w wynikach wyszukiwania aplikacji i naciśnij **Zainstaluj**.
- 4 Poczekaj na zakończenie instalacji, a następnie naciśnij **Otwórz**. Zostanie uruchomiona aplikacja Sens365.

## 2.2 Instalowanie aplikacji na urządzeniu inteligentnym z systemem iOS

- 1 Naciśnij , aby otworzyć App Store na urządzeniu inteligentnym z systemem iOS.
- 2 Naciśnij  w App Store i wpisz „Sens365” w pasku wyszukiwania.
- 3 Wybierz aplikację Sens365 w wynikach wyszukiwania aplikacji i naciśnij **Zainstaluj**.
- 4 Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.
- 5 Poczekaj na zakończenie instalacji, a następnie naciśnij **Otwórz**. Zostanie uruchomiona aplikacja Sens365.

# 3 Korzystanie z aplikacji

Aplikację Sens365 można uruchomić na urządzeniu inteligentnym i monitorować odczyty poziomu glukozy zmierzone przez podłączony system ciągłego monitorowania glukozy. Aby zalogować się do aplikacji Sens365, należy utworzyć konto. Jeśli wszystkie dane zapisane w aplikacji Sens365 są synchronizowane, są one zapisywane na serwerze w chmurze w zaszyfrowanej formie.

W przypadku utraty danych można je odzyskać z kopii zapasowej przechowywanej na serwerze w chmurze.

Zrozumienie i wykorzystanie strzałki wahań glukozy, trendu glukozy, wydarzeń i wartości kalibracji dostarczanych przez aplikację zwiększa efektywność zarządzania cukrzycą.

Ta sekcja pomoże:

1. Zarejestrować się i zalogować do aplikacji.
2. Włączyć udostępnianie danych glukozy za pomocą aplikacji CareSens Air.
3. Skonfigurować środowisko monitorowania glukozy użytkownika CareSens Air w aplikacji.
4. Nauczyć się interpretować poziomy glukozy i trendy glukozy wyświetlane w aplikacji.
5. Zapoznać się z funkcjami dostępnymi w aplikacji i korzystać z nich.

## Środki ostrożności

Usunięcie aplikacji na urządzeniu inteligentnym, gdy jest ona używana, powoduje utratę wszystkich danych związanych z aplikacją. W przypadku konieczności usunięcia aplikacji lub zmiany urządzenia inteligentnego należy zsynchronizować wszystkie ważne dane z serwerem w chmurze i utworzyć kopię zapasową plików na osobnym urządzeniu pamięci masowej.

## Uwaga

Urządzenie inteligentne wymaga następujących uprawnień do korzystania z aplikacji Sens365:

- Android: Android 13 lub nowszy: Ostrzeżenia (wymagane), Aparat (opcjonalnie)  
Dla systemu Android poniżej wersji 13: Pamięć masowa (opcjonalnie)
- iOS: Ostrzeżenia (wymagane), Aparat (opcjonalnie)

## 3.1 Logowanie

Aby korzystać z aplikacji Sens365, należy zarejestrować konto i zalogować się do niego. Podczas rejestracji konta należy wprowadzić informacje o użytkowniku, a następnie zweryfikować adres e-mail. Aplikacja udostępnia dane tylko aktualnie zalogowanego użytkownika.

### Dla nowych użytkowników


Jeśli nie masz konta Sens365, przejdź do ekranu Utwórz konto na ekranie Zaloguj się, aby się zarejestrować.

- 1 Uruchom aplikację **Sens365** na swoim urządzeniu inteligentnym.
- 2 Naciśnij **Rozpocznij** na ekranie startowym.




### 3 Przejdź do ekranu logowania i-SENS. Naciśnij **Utwórz konto**.


- Nawet jeśli zdecydujesz się skorzystać z prostego procesu logowania, możesz zarejestrować się za pomocą konta i-SENS.
- Aby zarejestrować się przy użyciu prostego procesu logowania, wprowadź swój kraj zamieszkania, język i informacje o użytkowniku oraz zaakceptuj wymagane warunki.

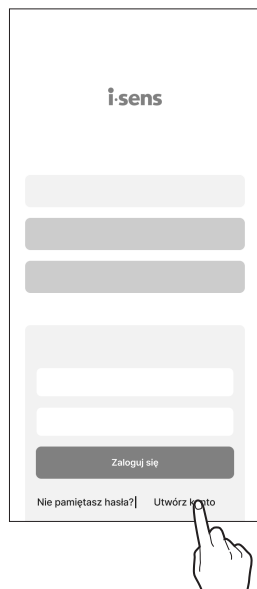

### 4 Wybierz kraj zamieszkania i język, a następnie naciśnij **Ok**.

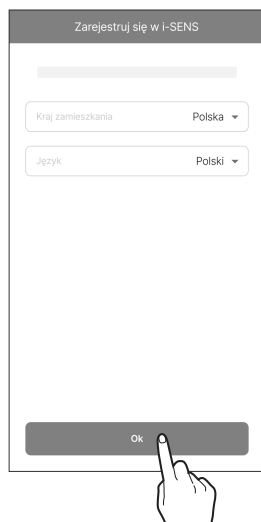

- 5** Wprowadź swój adres e-mail, aby się zarejestrować i naciśnij **Wyślij**.  
Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny.

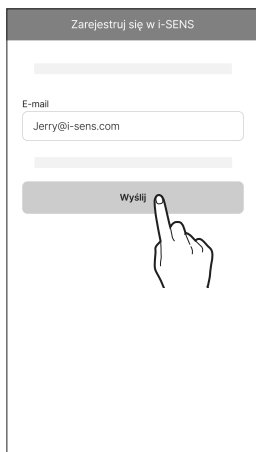


Zarejestruj się w i-SENS

E-mail

Jerry@i-sens.com

Wyślij

- 6** Wprowadź sześciocyfrowy kod z weryfikacyjnej wiadomości e-mail i naciśnij **Zweryfikuj**.

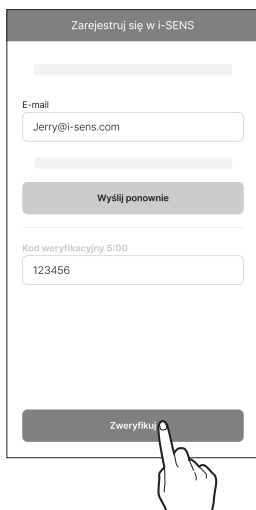

Zarejestruj się w i-SENS

E-mail

Jerry@i-sens.com

Wyślij ponownie

Kod weryfikacyjny 5:00

123456

Zweryfikuj

### Uwaga

- Kod należy wprowadzić w ciągu 5 minut od wysłania wiadomości e-mail. Naciśnij **Wyślij ponownie**, aby wydać nowy kod, jeśli nie wprowadzisz kodu w wyznaczonym czasie.
- Nie można utworzyć konta bez ukończenia weryfikacji.

**7** Zaakceptuj wymagane warunki i naciśnij **Ok**.

Zarejestruj się w i-SENS

☒ Wyraż zgodę na wszystko

☒

☒

☒

Ok



**8** Wprowadź informacje o użytkowniku i naciśnij **Ok**.

Zarejestruj się w i-SENS

E-mail

Hasło

Potwierdź hasło

Nazwa

Data urodzenia

Płeć

Ok



- 9 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu rejestracji członka, naciśnij **Ok**.



- 10 Wprowadź swój adres e-mail i hasło na ujednoliconym ekranie logowania członków, a następnie naciśnij **Zaloguj się**.

- Jeśli zarejestrowano się za pomocą Logowania za pomocą serwisów społecznościowych, użyj tego samego konta, które wybrano w Logowaniu za pomocą serwisów społecznościowych.



## Wcześniej zarejestrowani użytkownicy

Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, wykonaj następujące kroki, aby zalogować się do aplikacji Sens365.

- 1 Naciśnij aplikację Sens365 na swoim urządzeniu inteligentnym.
- 2 Naciśnij **Rozpocznij** na ekranie startowym.
- 3 Wprowadź **adres e-mail** i **hasło**, a następnie naciśnij **Zaloguj się**.
  - Jeśli zarejestrowano się za pomocą Logowania za pomocą serwisów społecznościowych, użyj tego samego konta, które wybrano w Logowaniu za pomocą serwisów społecznościowych.



- 4 Jeśli logowanie nie powiedzie się, wykonaj następujące czynności.
  - Jeśli adres e-mail nie jest zgodny, oznacza to, że adres e-mail nie został zarejestrowany i należy zarejestrować się ponownie.
  - Jeśli hasło jest nieprawidłowe, naciśnij **Nie pamiętasz hasła?**. Więcej informacji na temat resetowania hasła można znaleźć w sekcji „[Resetowanie hasła](#)”.
  - Nie możesz się zalogować, dopóki Twój adres e-mail nie zostanie zweryfikowany, nawet jeśli wprowadzony adres e-mail i hasło są prawidłowe. Zaloguj się ponownie po zakończeniu weryfikacji na ekranie „Zweryfikuj kod”.


### Uwaga

Jeśli aplikacja jest już zalogowana po uruchomieniu, naciśnij **Rozpocznij**, aby zalogować się natychmiast.


## Resetowanie hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła logowania do aplikacji Sens365, wykonaj następujące kroki.

- 1 Naciśnij aplikację Sens365 na swoim urządzeniu inteligentnym.
- 2 Naciśnij **Rozpocznij** na ekranie startowym.
- 3 Naciśnij **Nie pamiętasz hasła?**.

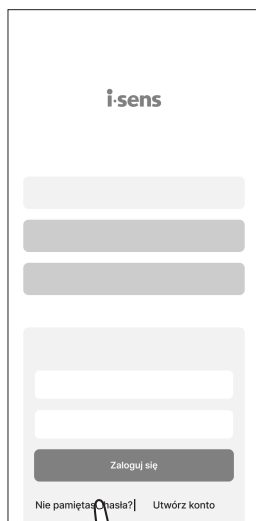

- 4 Wprowadź swój adres e-mail na ekranie „Nie pamiętasz hasła?” i naciśnij **Wyślij**. Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na podany adres e-mail.

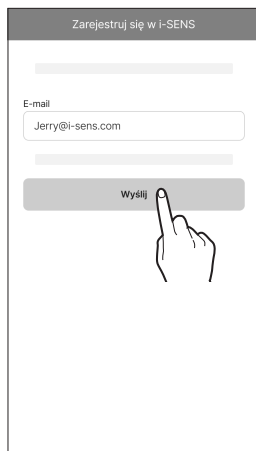

**5** Wprowadź sześciocyfrowy kod z weryfikacyjnej wiadomości e-mail i naciśnij **Zweryfikuj**.

- Kod należy wprowadzić w ciągu 5 minut od wysłania wiadomości e-mail. Naciśnij **Wyślij ponownie**, aby wydać nowy kod, jeśli nie wprowadzisz kodu w wyznaczonym czasie.
- Nie można utworzyć konta bez ukończenia weryfikacji.

Zarejestruj się w i-SENS

E-mail  
Jerry@i-sens.com

Wyślij ponownie

Kod weryfikacyjny 5:00  
123456

Zweryfikuj

**6** Wprowadź nowe hasło i potwierdź je, a następnie naciśnij **Ok**. Hasło zostanie zresetowane.

Zarejestruj się w i-SENS

E-mail  
Jerry@i-sens.com

Hasło  
●●●●●●●●

Potwierdź hasło  
●●●●●●●●

Ok

## 3.2 Łączenie użytkownika sensora

Użytkownik aplikacji Sens365 musi otrzymać kod udostępniania utworzony przez użytkownika CareSens Air, aby uzyskać dostęp do udostępnionych danych.

Możliwy jest dostęp do danych od wielu użytkowników sensorów, a dane są bezpiecznie przetwarzane przy użyciu protokołu szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL).

Użytkownik sensora i aplikacja Sens365 mogą zostać rozłączeni z każdej strony, a udostępnianie danych zostanie zakończone po rozłączeniu.


### Tworzenie kodu udostępniania

Kody udostępniania są tworzone i wysyłane z aplikacji CareSens Air, aby umożliwić odbiór danych dotyczących poziomu glukozy użytkownika aplikacji CareSens Air.

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć kod udostępniania.


- 1 Uruchom aplikację CareSens Air, a następnie naciśnij  w dolnej części ekranu głównego.
- 2 Naciśnij **Opiekunowie**.

**3** Naciśnij **Połącz** na ekranie „Lekarz/Opiekun”.

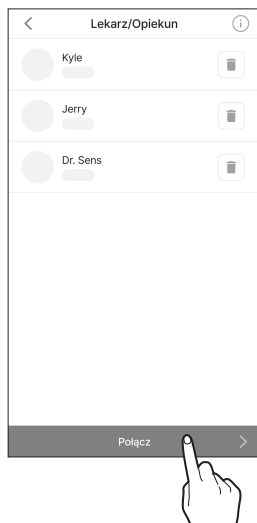


**4** Wybierz dane do udostępnienia i uprawnienia na ekranie „Dane”, a następnie naciśnij opcję **Generowanie kodu udostępniania**.  
Udostępniane dane obejmują następujące elementy:

- Odczyty stężenia glukozy i wydarzenia
- Ostrzeżenia

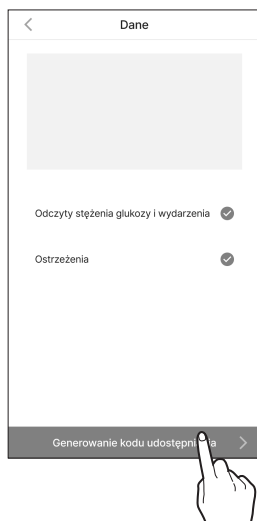

- 5 Wyślij utworzony kod udostępniania do użytkownika aplikacji Sens365, któremu chcesz udostępnić dane.
- Utworzony kod udostępniania jest ważny przez pięć minut.  
Jeśli wygaśnie, utwórz nowy kod udostępniania.
  - Naciśnij **Kopiuj**, aby udostępnić kod udostępniania innej platformie.

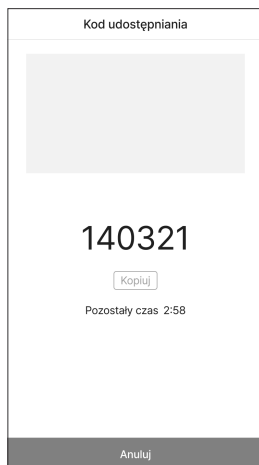


## Wprowadzanie kodu udostępniania

Dane dotyczące glukozy użytkownika aplikacji CareSens Air można otrzymać, wprowadzając kod udostępniania utworzony w aplikacji CareSens Air.


Wykonaj poniższe kroki, aby wprowadzić kod udostępniania w aplikacji Sens365.

- 1 Uruchom aplikację Sens365, a następnie naciśnij  w dolnej części ekranu głównego.
- 2 Naciśnij **Połączenia**.
- 3 Naciśnij przycisk  w prawym górnym rogu i wprowadź kod udostępniania.
  - Utworzony kod udostępniania jest ważny przez pięć minut. Jeśli wygaśnie, utwórz nowy kod udostępniania.
- 4 Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji naciśnij **Ok**.

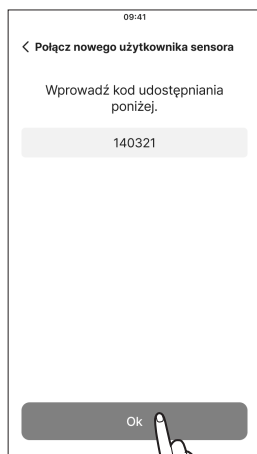


**5** Potwierdź skonfigurowane opcje udostępniania w aplikacji CareSens Air, a następnie naciśnij **Ok**. Użytkownik sensora zostanie dodany do Sens365.

- Opcje udostępniania, które nie zostały ustawione przez użytkownika aplikacji CareSens Air, są wyświetlane jako nieaktywne.

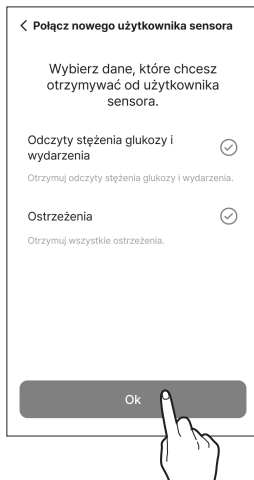

**6** Jeśli użytkownik sensora jest prawidłowo połączony, aplikacja CareSens Air wyświetla ostrzeżenie o prawidłowym połączeniu ze świadczeniodawcą.

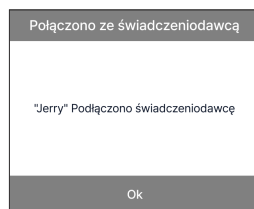

## Połączenie danych użytkownika czujnika

Użytkownik aplikacji Sens365 może uzyskać dostęp do udostępnionych danych po otrzymaniu kodu udostępniania utworzonego w aplikacji CareSens Air użytkownika sensora.

## 3.3 Zrozumienie ekranu głównego

Jeśli dane użytkownika sensora zostaną prawidłowo odebrane, zostaną one wyświetlone na ekranie głównym. Na ekranie głównym Sens365 wyświetlane są dane dotyczące poziomu glukozy.

W górnym menu można przejrzeć profil użytkownika sensora wyświetlany aktualnie na ekranie i monitorować ostrzeżenia dla wszystkich podłączonych użytkowników sensorów. Ponadto z dolnego menu Sens365 można przejść do ekranów Dziennik, Lista użytkowników sensorów, Raport i Ustawienia.


Poziom glukozy i strzałka trendu poziomu glukozy na ekranie głównym mogą pomóc w zrozumieniu stanu glukozy. Zrozumienie struktury i funkcji menu aplikacji umożliwia wykorzystanie Sens365 do bardziej efektywnego zarządzania cukrzycą.

Ta sekcja pomoże:

- Dowiedzieć się, co jest wyświetlane na ekranie głównym.
- Dowiedzieć się, do czego służą ikony na ekranie głównym.
- Sprawdzić dane dotyczące glukozy użytkownika sensora.

## Podstawowe informacje


Poniższa tabela wyjaśnia podstawowe informacje, które aplikacja Sens365 wyświetla w górnej części ekranu głównego.

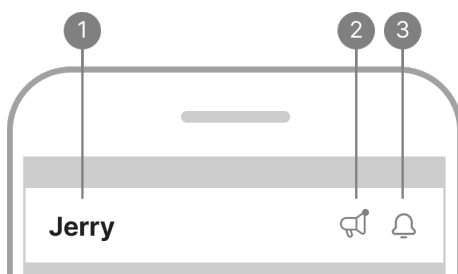

| Nr | Ikona                                                                              | Nazwa                               | Opis                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jerry                                                                              | Nazwa                               | Nazwa użytkownika sensora dostarczającego dane jest wyświetlana na bieżącym ekranie.                                                                                                                     |
| 2  |   | Powiadomienie o nowych ogłoszeniach | Jeśli istnieje niezaznaczone powiadomienie, zostanie wyświetlona ikona. Naciśnij  , aby przejść do ekranu „Ogłoszenia”. |
| 3  |  | Dziennik ostrzeżeń                  | Sprawdzenie ostrzeżeń dla wszystkich podłączonych użytkowników sensorów.                                                                                                                                 |

## Menu dolne

W poniższej tabeli objaśniono ikony i funkcje dostępne w dolnym menu ekranu głównego:

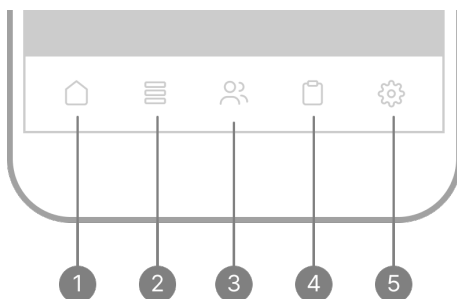


| Nr | Ikona                                                                               | Nazwa                       | Opis                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ❶  |    | Strona główna               | Naciśnij to, aby wrócić do ekranu głównego aplikacji.                          |
| ❷  |    | Dziennik                    | Wyświetla listę wydarzeń zarejestrowanych przez bieżącego użytkownika sensora. |
| ❸  |    | Lista użytkowników sensorów | Przełączanie użytkownika sensora na liście użytkowników sensorów.              |
| ❹  |  | Raport                      | Tworzenie raportu dla użytkownika sensora.                                     |

| Nr | Ikona                                                                             | Nazwa      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  |  | Ustawienia | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wyświetlanie lub edytowanie informacji w profilu użytkownika.</li><li>• Sprawdzenie listy użytkowników sensorów i łączenie lub rozłączanie użytkowników sensorów.</li><li>• Sprawdzanie ustawionej jednostki.</li><li>• Konfiguracja kodu dostępu i wysokości wykresu.</li><li>• Sprawdzanie ogłoszeń, pomocy technicznej, najczęściej zadawanych pytań i informacji o aplikacji.</li><li>• Więcej informacji na temat zmiany ustawień można znaleźć w sekcji „<a href="#">3.5 Zmiana ustawień</a>”.</li><li>• Więcej informacji na temat aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji można znaleźć w sekcji „<a href="#">Aktualizacja aplikacji</a>”.</li></ul> |

## Dane dotyczące glukozy

Aplikacja Sens365 wyświetla bieżący poziom glukozy i strzałkę zmiany poziomu glukozy, jak pokazano poniżej.

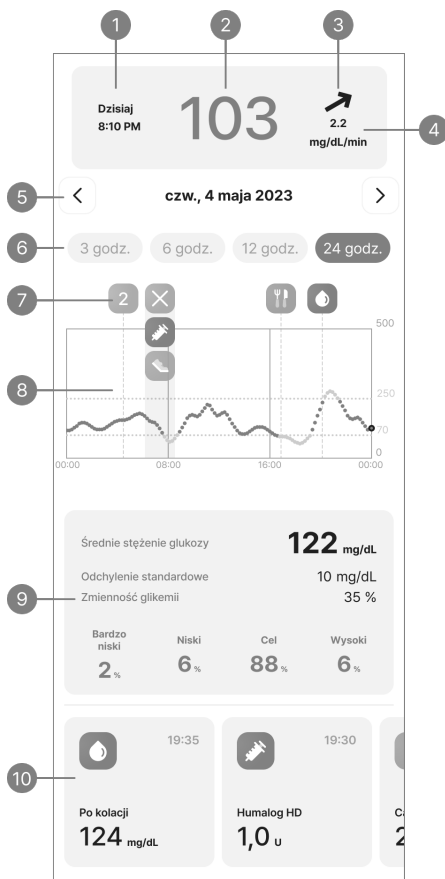

W poniższej tabeli wyjaśniono sposób wyświetlania danych poziomu glukozy na ekranie głównym.

| Nr | Nazwa                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶  | Czas uzyskania ostatniej wartości CGM | Wyświetla ostatnią odebraną wartość CGM.                                                                                                                                                                                                                |
| ❷  | Poziom glukozy                        | Wyświetlany jest ostatnio zmierzony poziom glukozy w postaci liczby lub jednego z poniższych symboli. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niski: Niższy niż 40 mg/dl (2,2 mmol/l)</li> <li>• Wysoki: Wyższy niż 500 mg/dl (27,8 mmol/l)</li> </ul> |
| ❸  | Strzałki trendu poziomu glukozy       | Wyświetlane jest bieżące tempo zmian poziomu glukozy w porównaniu z poprzednim pomiarem. Więcej informacji na temat strzałki trendu poziomu glukozy można znaleźć w sekcji „ <a href="#">Strzałki zmiany</a> ”.                                         |
| ❹  | Trend                                 | Wyświetla zmiany wartości w porównaniu do poprzedniej wartości CGM.                                                                                                                                                                                     |
| ❺  | Data wykresu                          | Wybierz datę wykresu CGM.                                                                                                                                                                                                                               |
| ❻  | Czas osi X wykresu                    | Wybór czasu wyświetlania osi X wykresu CGM.                                                                                                                                                                                                             |
| ❼  | Wyświetl zdarzenia                    | Wyświetla wydarzenia zarejestrowane w okresie wykresu CGM w postaci ikon.                                                                                                                                                                               |
| ❽  | Wykres CGM                            | Wyświetla zmiany wartości CGM w wybranym okresie w formie wykresu.                                                                                                                                                                                      |
| ❾  | Statystyka odczytów glikemii          | Wyświetla statystyki wartości glukozy w wybranym okresie wykresu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Średni poziom glukozy, odchylenie standardowe, zmienność poziomu glukozy, czas w zakresach</li> </ul>                                        |
| ❿  | Wydarzenie                            | Wydarzenia dodane do daty na ekranie są wyświetlane w najnowszej kolejności.                                                                                                                                                                            |

## Strzałki trendu poziomu glukozy

Strzałka trendu poziomu glukozy pokazuje kierunek i szybkość zmian między ostatnim odczytem poziomu glukozy a drugim ostatnim odczytem.

Jest ona wyświetlana jako strzałka po prawej stronie ostatniego odczytu poziomu glukozy na ekranie głównym.

| Strzałka prędkości | Zmiana poziomu glukozy | Opis                                                                                         |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| →                  | Stabilny               | Poziom glukozy wzrósł lub spadł poniżej 30 mg/dl (1,6 mmol/l) w ciągu ostatnich 30 minut.    |
| ↗                  | Powoli rośnie          | Poziom glukozy wzrósł o 31–60 mg/dl (1,6–3,3 mmol/l) w ciągu ostatnich 30 minut.             |
| ↗                  | Rośnie                 | Poziom glukozy wzrósł o 61–90 mg/dl (3,4–5,0 mmol/l) w ciągu ostatnich 30 minut.             |
| ↑                  | Szybko rośnie          | Poziom glukozy wzrósł o ponad 91 mg/dl (5,1 mmol/l) w ciągu ostatnich 30 minut.              |
| ↘                  | Powoli spada           | Poziom glukozy spadł o 31–60 mg/dl (1,6–3,3 mmol/l) w ciągu ostatnich 30 minut.              |
| ↘                  | Spada                  | Poziom glukozy spadł o 61–90 mg/dl (3,4–5,0 mmol/l) w ciągu ostatnich 30 minut.              |
| ↓                  | Szybko spada           | Poziom glukozy spadł o ponad 91 mg/dl (5,1 mmol/l) w ciągu ostatnich 30 minut.               |
| —                  | Nieznane               | Ilość danych jest niewystarczająca do obliczenia kierunku i szybkości zmian poziomu glukozy. |

## 3.4 Przeglądanie funkcji aplikacji

Użytkownicy mogą korzystać z różnych funkcji aplikacji Sens365 w celu zarządzania glukozą użytkownika sensora. Dieta, aktywność fizyczna i przyjmowanie insuliny użytkownika sensora mogą być obserwowane wraz ze zmianami w wydarzeniach i poziomach glukozy w celu poprawy stylu życia i zaplanowania skutecznych metod leczenia.

Zapoznanie się z tą sekcją umożliwi:


- Przełączyć użytkownika sensora.
- Sprawdzić dziennik ostrzeżeń.
- Sprawdzić zapisy wydarzeń użytkownika sensora.
- Sprawdzić listę użytkowników sensora i ustawić warunki ostrzeżenia dla każdego użytkownika sensora.
- Zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.
- W razie potrzeby sprawdzić najczęściej zadawane pytania lub samouczek.

## Przełączanie użytkowników sensorów

Można przełączyć użytkownika sensora wyświetlanego na ekranie, naciskając  w dolnej części ekranu głównego.

Wykonaj poniższe kroki, aby przełączyć użytkownika sensora.

- 1 Naciśnij  w dolnej części ekranu głównego. Wyświetlana jest lista aktualnie podłączonych użytkowników sensora.

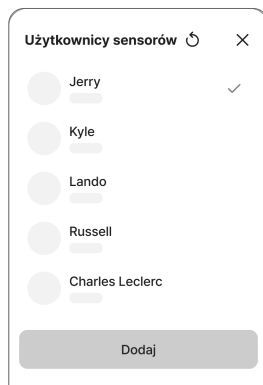


- 2 Po wybraniużądanego użytkownika z listy, informacje na ekranie aplikacji zostaną wyświetlone z danymi wybranego użytkownika sensora.
  - Naciśnij **Dodaj**, aby dodać nowego użytkownika sensora.

## Sprawdzanie dziennika ostrzeżeń

Lista użytkowników sensorów umożliwia przełączanie użytkownika sensora wyświetlanego na ekranie głównym. Można sprawdzić zapisy ostrzeżeń dotyczące glukozy, sensora i połączenia użytkownika sensora.

Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić dziennik ostrzeżeń.

- 1 Naciśnij  w prawym górnym rogu ekranu głównego.

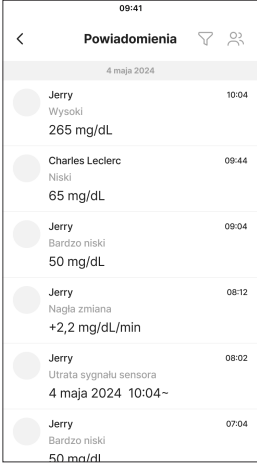

| 09:41                                                                                                                                                                               |                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| < Powiadomienia   |                                                       |       |
| 4 maja 2024                                                                                                                                                                         |                                                       |       |
|                                                                                                    | Jerry<br>Wysoki<br>265 mg/dL                          | 10:04 |
|                                                                                                    | Charles Leclerc<br>Niski<br>65 mg/dL                  | 09:44 |
|                                                                                                    | Jerry<br>Bardzo niski<br>50 mg/dL                     | 09:04 |
|                                                                                                    | Jerry<br>Nagła zmiana<br>+2,2 mg/dL/min               | 08:12 |
|                                                                                                    | Jerry<br>Utrata sygnału sensora<br>4 maja 2024 10:04~ | 08:02 |
|                                                                                                    | Jerry<br>Bardzo niski<br>50 mg/dL                     | 07:04 |

- 2 Naciśnij , aby wyświetlić listę ostrzeżeń filtrowaną według typu ostrzeżenia.



| Filtr               | Wybierz wszystko  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glukoza             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                |
| Ostrzeżenia sensora | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                |
| Połączenia          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                |
| Anuluj Zastosuj     |                                                                                                    |

- 3** Naciśnij , aby wyświetlić listę ostrzeżeń filtrowaną według użytkownika sensora.

Filtr 

Wybierz wszystko ✓

Jerry 

✓

 Kyle 

✓

 Lando 

✓

 Russell 

✓

 Charles Leclerc 

✓



Anuluj






Zastosuj




- 4** Naciśnij , aby wrócić do ekranu głównego.

### Uwaga

W przypadku zamknięcia aplikacji lub zablokowania ekranu urządzenia inteligentnego wyświetlane są ostrzeżenia zależne od sytuacji, jak pokazano w poniższej tabeli.
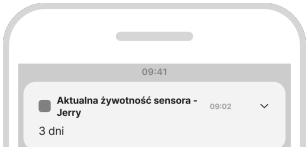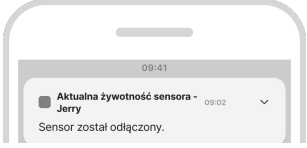
| Sytuacja                                                                          | Ekran                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gdy sensor używany przez użytkownika sensora jest bliski upływu terminu ważności. |   |
| Gdy sensor używany przez użytkownika sensora utracił ważność.                     |  |
| Gdy sensor używany przez użytkownika zakończy proces stabilizacji.                |  |
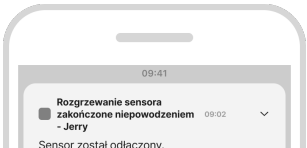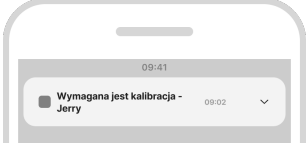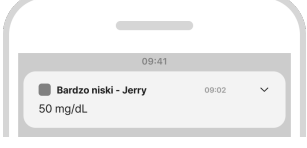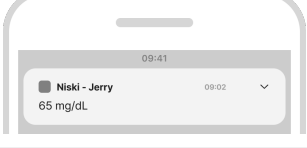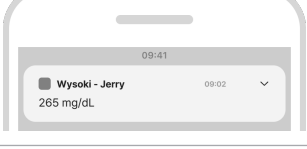
| Sytuacja                                                                                     | Ekran                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gdy sensor używany przez użytkownika sensora nie ukończył procesu stabilizacji.              |    |
| Gdy w sensorze używanym przez użytkownika sensora wystąpił błąd.                             |    |
| Gdy wymagana jest kalibracja sensora używanego przez użytkownika.                            |    |
| Gdy nastąpiła utrata sygnału między sensorem używanym przez użytkownika sensora a aplikacją. |    |
| Gdy poziom glukozy użytkownika sensora jest niższy niż określony próg bardzo niski.          |   |
| Gdy poziom glukozy użytkownika sensora jest niższy niż określony próg niski.                 |  |
| Gdy poziom glukozy użytkownika sensora jest wyższy niż określony próg wysoki.                |  |
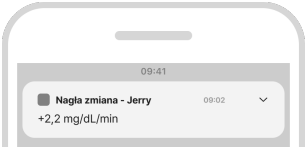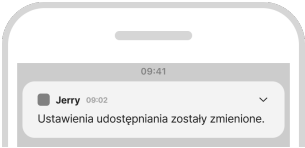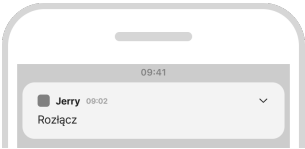
| Sytuacja                                                                                     | Ekran                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gdy zmiany poziomu glukozy użytkownika sensora są wyższe niż określony próg „nagłej zmiany”. |  |
| Gdy użytkownik sensora zmienił opcje udostępniania.                                          |  |
| Gdy użytkownik sensora zostanie rozłączony.                                                  |  |


## Przeglądanie dziennika

Na ekranie Dziennik wyświetlana jest lista wydarzeń zarejestrowanych przez użytkownika sensora aktualnie wyświetlanego na ekranie głównym.

- Po nawiązaniu połączenia z użytkownikiem sensora opcja udostępniania danych wydarzeń musi być ustawiona na wyświetlanie wydarzeń użytkownika sensora.

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić szczegóły wydarzeń w dzienniku.

- Naciśnij  w dolnej części ekranu głównego. Wydarzenia zarejestrowane przez bieżącego użytkownika sensora są wyświetlane na ekranie Dziennik.

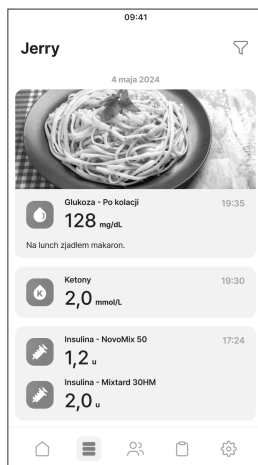

- Naciśnij wydarzenie, aby sprawdzić jego szczegóły.

- W poniższej tabeli objaśniono ikony na ekranie „Dziennik”:

| Ikona                                                                              | Nazwa   | Opis                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Glukoza | Wyświetlane są wartości wprowadzone przez użytkownika sensora lub odczyty z urządzenia monitorującego poziom glukozy oraz flaga posiłku.           |
|  | Ketony  | Wyświetlane są wartości wprowadzone przez użytkownika sensora lub wartości ketonowe z urządzenia monitorującego poziom ketonów oraz flaga posiłku. |

| Ikona                                                                             | Nazwa      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Insulina   | Wyświetla nazwę i dawkę wstrzykniętej insuliny. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomarańczowa ikona: ultrakrótko działająca</li> <li>• Żółta ikona: krótko działająca</li> <li>• Brązowa ikona: mieszana</li> <li>• Zielona ikona: działanie pośrednie</li> <li>• Ciemnozielona ikona: długo działająca</li> </ul> |
|  | Kalibracja | Wyświetlana jest wartość kalibracji wprowadzona przez użytkownika sensora.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Leki       | Wyświetla nazwę i dawkę leku doustnego przyjmowanego przez użytkownika sensora.                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Posiłek    | Wyświetla ilość węglowodanów, białka i tłuszczu spożytych przez użytkownika sensora w gramach (g).                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Ćwiczenia  | Wyświetla rodzaj i czas trwania ćwiczeń wprowadzonych przez użytkownika sensora w jednostkach minut.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Uwaga      | Wyświetla notatki wprowadzone przez użytkownika sensora.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Wyświetlanie raportów

Dane dotyczące poziomu glukozy użytkownika sensora mogą być wykorzystywane do tworzenia raportów i statystyk.

Sens365 oferuje funkcję zapisywania raportów jako plików PDF.

Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić raport.

**1** Naciśnij  w dolnej części ekranu głównego. Wyświetlony zostanie ekran „Przegląd”.

**2** Ekran „Przegląd” zawiera przegląd danych użytkownika sensora, AGP, statystyki godzinowe, statystyki dzienne i dane statystyczne wzorca życiowego z wybranego okresu.



**3** Wybierz żądany okres na karcie Okres, aby ponownie utworzyć raport lub statystyki z określonego okresu.

## 3.5 Zmiana ustawień

Użytkownicy mogą korzystać z różnych funkcji aplikacji Sens365 w celu zarządzania glukozą użytkownika sensora.

Ekran Ustawienia umożliwia skonfigurowanie środowiska ostrzeżeń dla każdego użytkownika sensora i zaktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji.

W poniższej tabeli objaśniono ikony i funkcje dostępne w menu ekranu głównego. Ustawienia są wyświetlane po naciśnięciu  na dole ekranu głównego.

| Ikona                                                                               | Nazwa                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Połączenia                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Można sprawdzić listę połączonych użytkowników sensora.</li> <li>Użytkowników sensorów można łączyć lub rozłączać.</li> <li>Dla każdego użytkownika sensora można skonfigurować ostrzeżenie.</li> </ul> |
|    | Jednostka                       | Wyświetla ustawioną jednostkę.                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Kod dostępu                     | Można ustawić funkcję kodu dostępu do aplikacji.                                                                                                                                                                                               |
|  | Wysokość wykresu                | Ustaw maksymalną wartość dla osi Y wskazanej na wykresie.                                                                                                                                                                                      |
|  | Zarządzanie danymi              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Możesz sprawdzić czas ostatniej synchronizacji serwera.</li> <li>Synchronizację można przeprowadzić natychmiast, naciskając przycisk.</li> </ul>                                                        |
|  | Strona internetowa CareSens Air | Nastąpi przekierowanie do strony internetowej CareSens Air.                                                                                                                                                                                    |
|  | Skontaktuj się z nami           | Możesz skontaktować się z nami w przypadku pytań podczas korzystania z aplikacji.                                                                                                                                                              |

| Ikona                                                                            | Nazwa                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pomoc techniczna       | Możesz sprawdzić samouczki dotyczące aplikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Ogłoszenia             | Możesz sprawdzić ogłoszenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Informacje o aplikacji | <p>Wyświetlana jest aktualna wersja aplikacji. Jeśli na urządzeniu inteligentnym użytkownika nie jest zainstalowana najnowsza wersja, pod bieżącą wersją wyświetlany jest przycisk aktualizacji.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji znajdują się w sekcji „<a href="#">Aktualizacja aplikacji</a>”.</p> |


## Edytowanie i sprawdzanie profilu

Informacje w profilu użytkownika można wyświetlać lub edytować.


Aby wprowadzić informacje profilowe, wykonaj poniższe czynności.

1 Naciśnij  w dolnej części ekranu głównego.

2 Naciśnij Profil w górnej części ekranu Ustawienia.  
Spowoduje to przekierowanie do ekranu „Profil”.

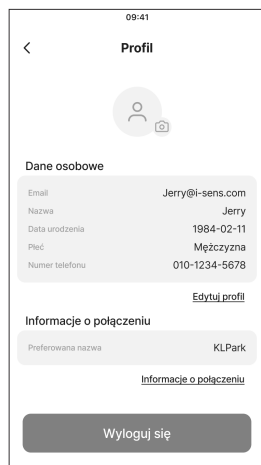

3 Naciśnij , a następnie **Wybierz z biblioteki** lub **Zrób zdjęcie**, aby zmienić zdjęcie profilowe.

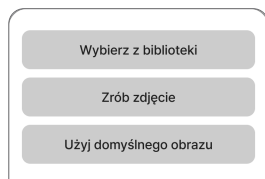


4 Naciśnij **Edytuj profil**, aby zmienić informacje o użytkowniku.

5 Naciśnij **Zapisz** po zmianie informacji o użytkowniku.

# Edytuj informacje o połączeniu

Ustaw nazwę widoczną dla połączonych użytkowników sensora.

- 1 Naciśnij **Informacje o połączeniu**.

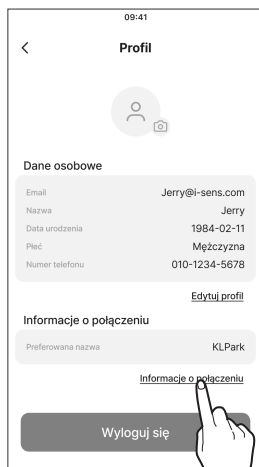

- 2 Ustaw nazwę i naciśnij **Zapisz**.




## Wyświetlanie listy użytkowników sensorów

Można wyświetlić listę użytkowników sensorów i zakończyć połączenie lub skonfigurować warunki ostrzeżenia.

Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić listę użytkowników sensorów.

**1** Naciśnij  w dolnej części ekranu głównego.

**2** Naciśnij **Połączenia** na ekranie Ustawienia.  
Wyświetlana jest lista aktualnie podłączonych użytkowników sensora.

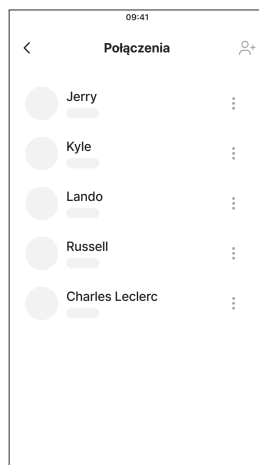


# Ustawianie nazwy użytkownika sensora


Nazwę użytkownika sensora można ustawić.

Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić nazwę użytkownika sensora.

- 1 Naciśnij **Połączenia** na ekranie Ustawienia.
- 2 Naciśnij **:** dla wybranego celu na liście, który chcesz ustawić jako nazwę.
- 3 Naciśnij **Edytuj nazwę** po wyświetleniu menu użytkownika sensora.

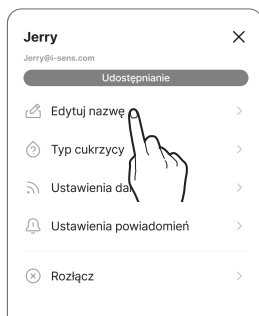

- 4 Naciśnij **Zapisz** po wprowadzeniu nazwy, którą chcesz uaktualnić.  
Lista użytkowników sensorów wyświetli zaktualizowaną nazwę.


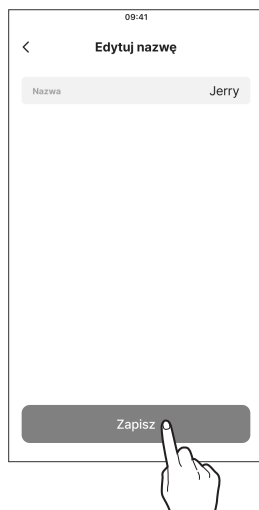


# Ustawianie ostrzeżeń dla każdego użytkownika sensora

Warunki ostrzeżenia można skonfigurować dla każdego użytkownika sensora.

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować ostrzeżenia dla każdego użytkownika sensora.

- 1 Naciśnij  w dolnej części ekranu głównego.
- 2 Naciśnij **Połączenia** na ekranie Ustawienia.  
Wyświetlana jest lista aktualnie podłączonych użytkowników sensora.
- 3 Naciśnij  po prawej stronie użytkownika sensora na liście, dla którego chcesz ustawić alarm.
- 4 Naciśnij **Ustawienia powiadomień** po wyświetleniu użytkownika sensora.
- 5 Aby wyłączyć ostrzeżenia dla wybranego użytkownika sensora, naciśnij przełącznik przy pozycji, aby go wyłączyć.

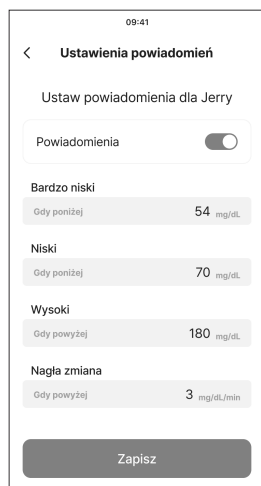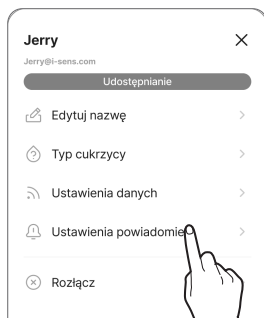

## 6 Można skonfigurować następujące pozycje ostrzeżeń.


| Nazwa        | Opis                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bardzo niski | Ustaw bardzo niski próg, dla którego mają być odbierane ostrzeżenia, oraz metodę ostrzeżenia.   |
| Niski        | Ustaw niski próg glukozy, dla którego mają być odbierane ostrzeżenia, oraz metodę ostrzeżenia.  |
| Wysoki       | Ustaw wysoki próg glukozy, dla którego mają być odbierane ostrzeżenia, oraz metodę ostrzeżenia. |
| Nagła zmiana | Ustaw próg nagłej zmiany stężenia glukozy, aby otrzymywać ostrzeżenia, oraz metodę ostrzeżenia. |

## Rozłączanie

Jeśli nie chcesz otrzymywać udostępnionych danych dotyczących poziomu glukozy użytkownika sensora, możesz rozłączyć użytkownika.


Metoda rozłączania jest następująca:

- 1 Naciśnij  w dolnej części ekranu głównego.
- 2 Naciśnij **Połączenia**, a następnie  dla użytkownika, którego chcesz usunąć z listy.
- 3 Naciśnij **Rozłącz** w menu.

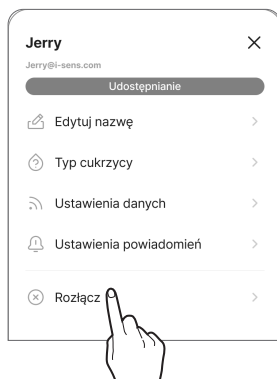

**4** Naciśnij **Rozłącz**, gdy pojawi się okno potwierdzenia.

- Jeśli użytkownik został rozłączony, nie można już odbierać udostępnionych danych.
- Jeśli chcesz ponownie otrzymywać udostępnione dane, zainicjuj nowe połączenie z użytkownikiem sensora.

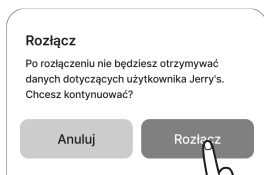

## Ustawianie wysokości wykresu


Można ustawić maksymalną wartość wysokości wykresu CGM.

Metoda ustawiania maksymalnej wartości wysokości wykresu jest następująca:

**1** Naciśnij  na dole ekranu głównego, a następnie naciśnij **Wysokość wykresu**.

**2** Dla maksymalnej wartości wysokości wykresu wybierz spośród Auto, 300 mg/dl (16,7 mmol/l), 400 mg/dl (22,2 mmol/l) i 500 mg/dl (27,8 mmol).

- W przypadku wybrania opcji Auto wysokość wykresu automatycznie dostosowuje się do maksymalnej wartości CGM.

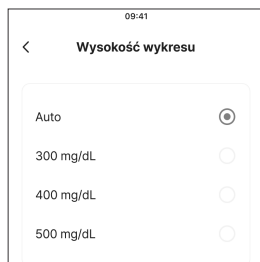


## Ustawianie kodu dostępu

Można ustawić funkcję kodu dostępu w celu ochrony udostępnionych danych.


Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować funkcję kodu dostępu.

**1** Naciśnij  na dole ekranu głównego, a następnie naciśnij **Kod dostępu**.

**2** Naciśnij .

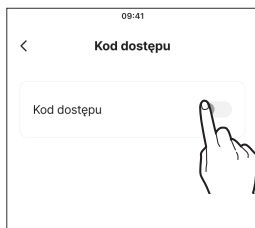

**3** Wprowadź 4-cyfrowy kod dostępu.

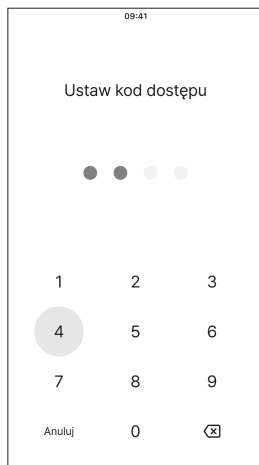

**4** Wprowadź kod ponownie, aby potwierdzić.


### Uwaga

- Po zakończeniu ustawiania blokady należy wprowadzić hasło, aby uzyskać dostęp do aplikacji.
- Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz je zresetować, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przejść przez proces weryfikacji.

## Wyświetlanie samouczka

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić samouczki udostępniane przez aplikację Sens365.

- 1 Naciśnij  na dole ekranu głównego, a następnie naciśnij **Pomoc**.
- 2 Naciśnij **Samouczki** w menu Pomoc techniczna.

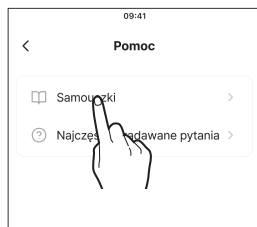


- 3 Naciśnij dowolne pytanie dotyczące metody użytkowania.


## Wyświetlanie najczęściej zadawanych pytań

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w aplikacji Sens365.

- 1 Naciśnij  na dole ekranu głównego, a następnie naciśnij **Pomoc**.
- 2 Naciśnij **Najczęściej zadawane pytania** w menu Pomoc techniczna.

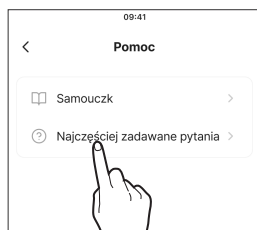

- 3 Naciśnij  na ekranie „Najczęściej zadawane pytania”, aby sprawdzić kategorie.

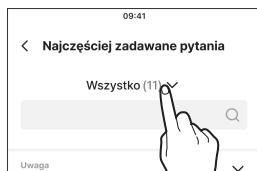

- 4 Naciśnij kategorię Najczęściej zadawanych pytań, aby wyświetlić listę tematów.


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <input type="radio"/>            | Wszystko (11) |
| <input checked="" type="radio"/> | Uwaga (3)     |
| <input type="radio"/>            | iPhone (5)    |
| <input type="radio"/>            | Inne (3)      |

## Skontaktuj się z nami


Użytkownicy mogą rejestrować wszelkie pytania podczas korzystania z aplikacji. Centrum obsługi klienta sprawdzi zapytania i niezwłocznie na nie odpowie.

Wykonaj następujące kroki, aby zobaczyć moje zapytania i **Skontaktuj się z nami** w aplikacji Sens365.

- 1 Naciśnij  na dole ekranu głównego, a następnie naciśnij **Skontaktuj się z nami**.

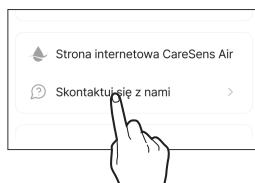

- 2 Naciśnij **Nowe zapytanie** na ekranie „Skontaktuj się z nami”.

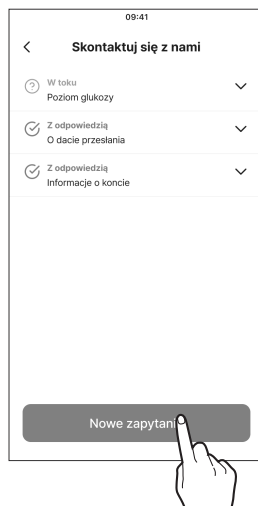

**3** Zarejestruj swoje zapytanie na ekranie „Nowe zapytanie”, a następnie naciśnij **Wyślij**.

- **Email:** Adres e-mail powiązany z kontem jest wprowadzany automatycznie i nie może zostać zmieniony.
- **Tytuł:** Wprowadź tytuł zapytania.
- **Treść:** Wprowadź szczegóły zapytania.
- **Plik:** Załącz pliki związane z zapytaniem.

09:41

< **Nowe zapytanie**

\* wymagane

\* Email  
Jerry@i-sens.com

\* Tytuł 14/50  
Informacje o koncie


\* Treść 17/1000  
Jak zmienić dane konta?

Telefon  
000-0000-0000

Plik 0/3  
Dodaj

Wyślij

**4** Naciśnij **Ok** w wyskakującym oknie informującym o przesłaniu zapytania.

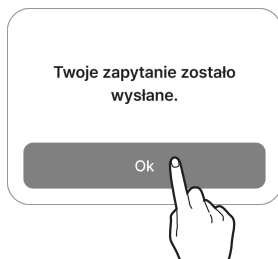

## Aktualizacja aplikacji


Jeśli najnowsza wersja aplikacji Sens365 nie jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym, informacja o tym jest wyświetlana na ekranie ustawień.

Przejdź do sklepu App Store, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję.


Wykonaj poniższe kroki, aby zaktualizować aplikację Sens365 do najnowszej wersji.

**1** Naciśnij  na dole ekranu głównego, a następnie naciśnij **Informacje o aplikacji**.

**2** Naciśnij **Aktualizuj teraz** na ekranie Informacje o aplikacji.  
**Aktualizuj teraz** jest włączona tylko wtedy, gdy dostępna jest nowa wersja aplikacji.

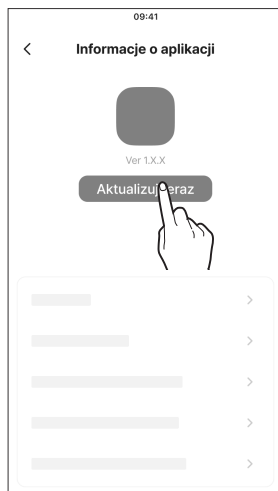

**3** Naciśnij **Aktualizuj teraz** w wyskakującym oknie. Nastąpi przejście do sklepu z aplikacjami.

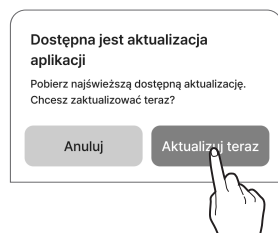


**4** Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji ze sklepu z aplikacjami. Istniejące dane nie zostaną naruszone podczas aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji.

## 3.6 Wylogowanie


Po zakończeniu korzystania z aplikacji wyloguj się, a następnie zamknij aplikację Sens365.

Wykonaj następujące kroki, aby wylogować się z aplikacji.

- 1 Naciśnij  na dole ekranu głównego, a następnie naciśnij **Profil** na górze.
- 2 Naciśnij **Wyloguj się** na ekranie „Profil”.

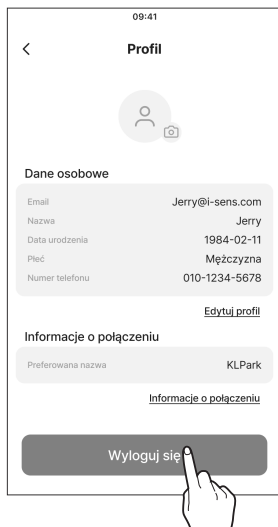

- 3 Naciśnij **Wyloguj się** na wyskakującym oknie „Wyloguj się”.

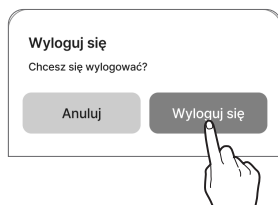


### Uwaga

Nie można wyświetlić informacji o koncie, gdy użytkownik jest wylogowany. Aby wyświetlić istniejące informacje o koncie, należy się zalogować.


## Ładowanie poprzednich danych

Jeśli istniejący użytkownik aplikacji ponownie zainstaluje aplikację z powodów takich jak zmiana urządzenia inteligentnego, dane serwera można pobrać ponownie.

- 1 Po ponownym zainstalowaniu aplikacji należy uruchomić aplikację Sens365 i zalogować się przy użyciu istniejącego konta. Poprzednie dane są ładowane automatycznie.

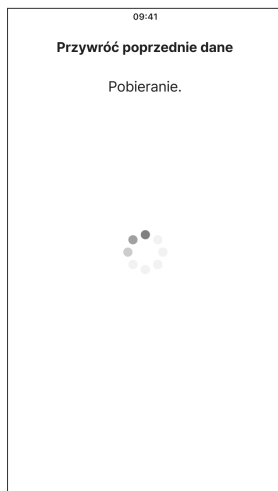

- 2 Po pobraniu poprzednich danych zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu.

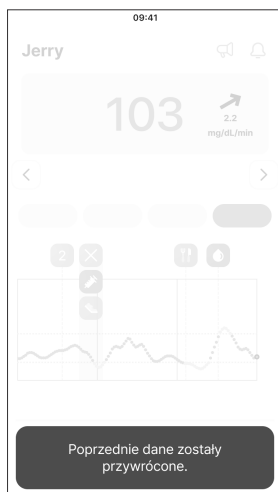

# Dodatek A Najczęściej zadawane pytania

Niniejszy rozdział przedstawia sytuacje, które mogą wystąpić podczas korzystania z CareSens Air oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia. Jeśli zaistnieje jakakolwiek sytuacja, która nie została przedstawiona w tym rozdziale, lub jeśli wystąpi problem, którego nie można rozwiązać samodzielnie, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Ta sekcja pomoże:

- Zidentyfikować przyczyny problemów występujących podczas korzystania z CareSens Air.
- Rozwiązać problemy występujące podczas korzystania z CareSens Air.

## Android

### Jak podłączyć i aktywować Wi-Fi i transmisję danych komórkowych, aby otrzymywać odczyty poziomu glukozy i powiadomienia od użytkowników sensora?

Aby otrzymywać odczyty poziomu glukozy i powiadomienia od użytkowników sensorów, wymagane jest połączenie z Internetem. Jeśli rozłączysz zarówno Wi-Fi, jak i transmisję danych komórkowych, otrzymywanie danych od użytkownika sensora będzie utrudnione i nie będziesz w stanie wyświetlać odczytów poziomu glukozy ani otrzymywać powiadomień.

Aby włączyć Wi-Fi:

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Połączenia**.
- 2 Włącz **Wi-Fi**.

Aby włączyć transmisję danych komórkowych:

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Połączenia**.
- 2 Naciśnij **Użycie danych**.
- 3 Włącz funkcję **Dane mobilne**.

### Jak działa funkcja powiadomień w aplikacji Sens365 i jak mogę ją włączyć?

Należy zezwolić aplikacji Sens365 na otrzymywanie powiadomień na urządzeniu inteligentnym.

Aby włączyć powiadomienia:

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia**.
- 2 Naciśnij **Powiadomienia aplikacji**.
- 3 Znajdź **Sens365** na liście aplikacji.
- 4 Włącz powiadomienia dla **Sens365**.

## Dlaczego aplikacja Sens365 nie działa prawidłowo?

Aby aplikacja Sens365 działała prawidłowo, należy zezwolić na korzystanie z trybu Nie przeszkadzać. Przyznanie tego uprawnienia sprawi, że zawsze będziesz otrzymywać powiadomienia Sens365, nawet jeśli ustawisz najbardziej restrykcyjny poziom trybu Nie przeszkadzać.

Oto jak zezwolić na uprawnienia trybu Nie przeszkadzać:

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia**.
- 2 Wybierz opcję **Nie przeszkadzać > Powiadomienia aplikacji**.
- 3 Naciśnij **Dodaj aplikacje**.
- 4 Wybierz **Sens365** i naciśnij **Gotowe**.

## Dlaczego moje powiadomienia są opóźnione?

Tryb oszczędzania energii dezaktywuje dane w tle. Jeśli tryb oszczędzania energii jest włączony, powiadomienia mogą być opóźnione.

Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii:

- 1 Przejdź do **Ustawień**.
- 2 Naciśnij kolejno **Pielęgnacja baterii i urzęduzenia**.
- 3 Naciśnij **Bateria**.
- 4 Wyłącz **Tryb oszczędzania energii**.

## Dlaczego nie otrzymuję powiadomień, nawet gdy aplikacja jest aktywna?

Korzystanie z funkcji Tryby i procedury może dezaktywować aplikację, nawet gdy jest włączona, i zatrzymać wszystkie powiadomienia z aplikacji Sens365.

Aby wyłączyć funkcje Tryby i procedury:

- 1 Przejdź do **Ustawienia > Tryby i procedury**.
- 2 Naciśnij tryb, który chcesz wyłączyć, lub naciśnij ograniczenia użytkowania aplikacji i dodaj **Sens365** do listy wybranych aplikacji.

## Jak wyłączyć funkcję wstrzymywania aplikacji?

W systemie Android 10 lub nowszym wstrzymanie tymczasowo dezaktywuje aplikację. Użycie funkcji Wstrzymaj w aplikacji Sens365 spowoduje zatrzymanie wszystkich powiadomień. (Funkcja wstrzymania jest obsługiwana tylko na

telefonach z systemem Android z aplikacją Google Phone lub Android One).

Aby wyłączyć wstrzymanie aplikacji:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj aplikację **Sens365** na ekranie głównym lub w szufladzie aplikacji.
- 2 Naciśnij **Wstrzymaj**, aby edytować funkcję pauzy.

## iPhone

### Co zrobić, gdy aplikacja Sens365 staje się nieaktywna lub przestaje otrzymywać powiadomienia z powodu ustawień czasu ekranu?

Ustawienie czasu bez urządzenia lub limitów aplikacji w czasie przed ekranem może tymczasowo wyłączyć aplikację Sens365. Jeśli ustawisz limity aplikacji i czasu dla Sens365, możesz nie być w stanie korzystać z aplikacji lub otrzymywać powiadomień.

Aby usunąć limity czasu przed ekranem, wykonaj następujące kroki:

- 1 Przejdź do **Ustawień**.
- 2 Naciśnij **Czas przed ekranem**.
- 3 Wyłącz **Czas bez urządzenia** lub **Limity aplikacji** bądź dodaj aplikację Sens365 do listy **Zawsze dozwolone**.

### Jak włączyć dostęp do Internetu, aby otrzymywać odczyty stężenia glukozy oraz powiadomienia z aplikacji Sens365?

Aby otrzymywać powiadomienia z aplikacji Sens365, należy połączyć się z Internetem. Jeśli nie ma dostępnej sieci Wi-Fi, włącz transmisję danych komórkowych. Jeśli zarówno połączenie Wi-Fi, jak i transmisja danych komórkowych są wyłączone, nie będziesz otrzymywać odczytów poziomu glukozy ani powiadomień od użytkowników sensora. Jeśli telefon lub operator komórkowy nie obsługuje jednoczesnej transmisji głosu i danych (VoLTE), połączenie internetowe może zostać przerwane, a powiadomienia mogą być opóźnione podczas połączeń.

Aby włączyć Wi-Fi:

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
- 2 Włącz **Wi-Fi**.

Aby włączyć transmisję danych komórkowych:

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**.
- 2 Włącz **Dane komórkowe**.

## Jak włączyć powiadomienia w aplikacji Sens365?

Aby otrzymywać powiadomienia z aplikacji Sens365, należy wyrazić na to zgodę.

Aby włączyć powiadomienia:

- 1 Przejdź do **Ustawień**.
- 2 Naciśnij **Sens365**.
- 3 Naciśnij **Powiadomienia**.
- 4 Włącz **Zezwalaj na powiadomienia**.

## Dlaczego moje powiadomienia są opóźnione?

W trybie niskiego zużycia energii, jeśli aplikacja nie jest otwarta i nie jest wyświetlana na ekranie, aplikacja Sens365 może nie działać w tle. Może to spowodować opóźnienie powiadomień.

Aby wyłączyć tryb niskiego zużycia energii:

- 1 Przejdź do **Ustawień**.
- 2 Naciśnij **Bateria**.
- 3 Wyłącz **Tryb niskiego zużycia energii**.

## Dlaczego powiadomienia są wyciszone w trybie Nie przeszkadzać i jak wyłączyć ten tryb?

Tryb Nie przeszkadzać powoduje wyciszenie wszystkich powiadomień i zaleca się, aby z niego nie korzystać.

Aby wyłączyć tryb Nie przeszkadzać:

- 1 Przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć **Centrum sterowania**.
- 2 Naciśnij **Tryb skupienia**
- 3 Wyłącz tryb **Nie przeszkadzać**.

## Uwaga

### Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące powiadomień z aplikacji Sens365 w zależności od trybu powiadomień urządzenia inteligentnego?

Powiadomienia z aplikacji Sens365 mogą być ograniczone w zależności od trybu powiadomień ustawionego na urządzeniu inteligentnym. Jeśli urządzenie inteligentne jest ustawione na tryb cichy, wibracje lub tryb nie przeszkadzać, powiadomienia dźwiękowe mogą nie być odbierane.

## Z jakich powodów mogę nie otrzymywać powiadomień z aplikacji Sens365 i jak można temu zaradzić?

Możliwe przyczyny nieotrzymywania powiadomień są następujące:

- gdy ostrzeżenia o bardzo niskim, niskim i/lub wysokim poziomie są wyłączone;
- gdy funkcja udostępniania danych jest wstrzymana;
- jeśli powiadomienia z aplikacji Sens365 są wyłączone w ustawieniach urządzenia inteligentnego;
- gdy wszystkie powiadomienia na urządzeniu inteligentnym są wyłączone w jego ustawieniach;
- gdy nie ma połączenia z Internetem;
- jeśli serwer i-SENS nie działa.

Jeśli którykolwiek z powyższych przypadków dotyczy Ciebie, zapoznaj się z odpowiednim rozwiązaniem w najczęściej zadawanych pytaniach, a jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z centrum obsługi klienta i-SENS pod numerem (080-910-0900).

## Inne

### Dlaczego nie widzę danych podłączonego użytkownika sensora?

- Sprawdź stan sieci urządzenia inteligentnego.
- Przejdź do opcji **Ustawienia > Połączenia > Ustawienia danych** i sprawdź stan ustawień udostępniania użytkownika sensora.
- Przejdź do opcji **Ustawienia > Zarządzanie danymi**, a następnie naciśnij **Synchronizuj teraz**.

### Dlaczego nie mogę połączyć się z użytkownikiem sensora?

- Sprawdź stan sieci urządzenia inteligentnego.
- Upewnij się, że poprawnie wprowadzono kod udostępniania, który został wygenerowany przez użytkownika sensora, z którym próbujesz się połączyć.
- Sprawdź, czy wprowadzony kod udostępniania jest nadal ważny. Wygenerowany kod udostępniania jest ważny przez 5 minut.
- Sprawdź, czy użytkownik sensora, z którym się łączysz, został dodany w menu **Ustawienia > Połączenia**.

## **Jak mogę korzystać z aplikacji Sens365 i importować istniejące dane na nowe urządzenie inteligentne?**

Aby korzystać z aplikacji Sens365 na nowym urządzeniu inteligentnym, zainstaluj i uruchom aplikację Sens365 na nowym urządzeniu, a następnie zaloguj się przy użyciu tego samego konta i-SENS. Po pomyślnym zalogowaniu zostanie wyświetlona opcja importowania poprzednich danych i można pobrać dane z wybranego okresu na nowe urządzenie inteligentne. Odczyty poziomu glukozy i trendy z poprzedniej aplikacji zostaną wyświetlone na nowym urządzeniu inteligentnym.

# Dodatek B Informacje techniczne

## B.1 Wydajność

1) Android: HS-MA-01

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa produktu</b>                   | Sens365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kompatybilne urządzenia medyczne</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nazwa produktu: System ciągłego monitorowania glukozy CareSens Air</li> <li>Model: CGM-ST-002</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Środowisko komunikacyjne</b>         | Protokół komunikacyjny: HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Środowisko pracy</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>System operacyjny urządzeń inteligentnych: Android 8.0 lub nowszy</li> <li>Rozdzielczość: 360 x 640 lub wyższa</li> <li>Wymagane parametry techniczne: Dotykowy wyświetlacz LCD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Przesyłane i odbierane dane</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ciągłe wartości glukozy użytkownika ze zgodnego urządzenia medycznego, dane wejściowe użytkownika (posiłki, insulina, ćwiczenia itp.)</li> <li>Statystyki danych użytkownika i raporty obejmujące poziom glukozy użytkownika kompatybilnego urządzenia medycznego</li> <li>Ostrzeżenia dotyczące poziomu glukozy użytkownika kompatybilnego urządzenia medycznego (bardzo niski, niski, wysoki)</li> </ul> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kluczowa wydajność</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wyświetla ciągłe wartości stężenia glukozy użytkownika ze zgodnego urządzenia medycznego oraz dane wprowadzone przez użytkownika.</li><li>• Wyświetla statystyki danych użytkownika zgodnego urządzenia medycznego i zapisuje raporty.</li><li>• Wyświetla ostrzeżenia dotyczące poziomu glukozy użytkownika ze zgodnego urządzenia medycznego.</li><li>• Świadczeniodawcy (członkowie rodziny, kuratorzy, instytucje medyczne) korzystający z aplikacji mogą otrzymywać udostępnione dane, łącząc się z aplikacją użytkownika kompatybilnego urządzenia medycznego.</li></ul> |
| <b>Wersja oprogramowania</b> | Wersja: 1.0.x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2) iOS: HS-MI-01

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa produktu</b>                   | Sens365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kompatybilne urządzenia medyczne</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nazwa produktu: System ciągłego monitorowania glukozy CareSens Air</li> <li>Model: CGM-ST-002</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Środowisko komunikacyjne</b>         | Protokół komunikacyjny: HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Środowisko pracy</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>iOS 13.2 lub nowszy</li> <li>Rozdzielczość: 375 x 667 lub wyższa</li> <li>Wymagane parametry techniczne: Dotykowy wyświetlacz LCD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Przesyłane i odbierane dane</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ciągłe wartości glukozy użytkownika ze zgodnego urządzenia medycznego, dane wejściowe użytkownika (posiłki, insulina, ćwiczenia itp.)</li> <li>Statystyki danych użytkownika i raporty obejmujące poziom glukozy użytkownika kompatybilnego urządzenia medycznego</li> <li>Ostrzeżenia dotyczące poziomu glukozy użytkownika kompatybilnego urządzenia medycznego (bardzo niski, niski, wysoki)</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>Kluczowa wydajność</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyświetla ciągłe wartości stężenia glukozy użytkownika ze zgodnego urządzenia medycznego oraz dane wprowadzone przez użytkownika.</li> <li>Wyświetla statystyki danych użytkownika zgodnego urządzenia medycznego i zapisuje raporty.</li> <li>Wyświetla ostrzeżenia dotyczące poziomu glukozy użytkownika ze zgodnego urządzenia medycznego.</li> <li>Świadczeniodawcy (członkowie rodziny, kuratorzy, instytucje medyczne) korzystający z aplikacji mogą otrzymywać udostępnione dane, łącząc się z aplikacją użytkownika kompatybilnego urządzenia medycznego.</li> </ul> |
| <b>Wersja oprogramowania</b>            | Wersja: 1.0.x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## B.2 Cyberbezpieczeństwo

### Przestrogi dotyczące cyberzagrożeń

- Zainstaluj ochronę antywirusową lub program antywirusowy na swoim urządzeniu inteligentnym, aby zapobiec dostępowi złośliwych programów do informacji urządzenia inteligentnego.
- Jeśli mimo wprowadzenia kodu udostępniania nie można odbierać danych dotyczących poziomu glukozy od użytkowników sensora, należy upewnić się, że sześciocyfrowy kod udostępniania został wprowadzony prawidłowo. Jeśli pomimo wprowadzenia poprawnego kodu akcji problem nadal występuje, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym dystrybutorem.
- Jeśli użytkownik zostanie wylogowany z powodu zalogowania się innego urządzenia, należy zmienić hasło, jeśli to nie on próbował się zalogować.
- Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło więcej niż pięć razy, zresetuj je.
- Jeśli konto nie było używane przez ponad rok, staje się nieaktywne. Jeśli konto stało się nieaktywne, należy je ponownie aktywować.
- Jeśli dojdzie do incydentu cyberbezpieczeństwa związanego z aplikacją Sens365, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym dystrybutorem i właściwym organem.

### Bezpieczeństwo związane z cyberzagrozeniami

- Token jest wydawany użytkownikowi, gdy jego dane uwierzytelniające zostaną zweryfikowane jako prawidłowe.
- Dla każdego żądania weryfikowana jest ważność tokena, a następnie przetwarzane jest uwierzytelnienie.
- Do wysyłania danych używana jest metoda komunikacji SSL.
- Kodowanie AES jest używane do szyfrowania danych osobowych, a dane są zapisywane w bazie danych.
- Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło więcej niż pięć razy, musisz je zresetować.
- Jeśli konto nie było używane przez ponad rok, staje się nieaktywne. Jeśli konto stało się nieaktywne, należy je ponownie aktywować.

# i·sens



**i-SENS, Inc.**

43, Banpo-daero 28-gil  
Seocho-gu, Seoul 06646, Korea  
**CareSensAir.com**

**EC**

**REP**

**Medical Technology Promedt  
Consulting GmbH**

Ernst-Heckel-Straße 7  
66386 St. Ingbert, Niemcy