

Kullanım kılavuzu

Sens 365

Uygulama



Bu kullanım kılavuzu, Sens365 uygulamasının doğru kullanımına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sens365 uygulaması, CareSens Air Sürekli Glikoz İzleme Sisteminin (CareSens Air CGM Sistemi) sensör kullanıcılarına bağlanır.

Bu kullanım kılavuzunu iyice okuyun ve kullanmadan önce tüm önlemlere uyun.

Not

Sens365 uygulamasını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu iyice inceleyin. Sens365, CareSens Air CGM Sistemi için ikincil bir görüntüleyicidir ve tedavi kararları sağlamak ya da profesyonel sağlık uzmanı tavsiyesinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sens365, CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısının glikoz verilerinin gerçek zamanlı olarak alınmasını garanti etmez.

Kullanmadan önce	6
Belge kuralları	7
Güvenlik bilgileri.....	9
1 Sens365 uygulamasını anlama.....	11
Çalışma mekanizması.....	11
2 Sens365 uygulamasını yükleme	12
Önerilen akıllı cihaz özellikleri	12
Uygulamayı bir akıllı cihaza yükleme	13
3 Uygulamayı kullanma	14
3.1 Oturum açma.....	15
İlk kez kullananlar için	15
Önceden kayıtlı kullanıcılar	16
3.2 Sensör kullanıcıyı bağlama	17
Sensör kullanıcıyı veri bağlantısı	17
3.3 Ana ekranı anlama	19
Temel bilgiler	20
Alt menü.....	21
Glikoz verileri.....	22
Trend okları.....	24
3.4 Uygulama özelliklerini keşfetme.....	25
Sensör kullanıcıyı değiştirme.....	26
Bildirim günlüğünü kontrol etme.....	27
Kayıt defterini görüntüleme	30
Raporu görüntüleme	31

3.5	Ayarları değiştirme.....	32
	Profilinizi düzenleme ve kontrol etme	34
	Sensör kullanıcı listesini görüntüleme.....	35
	Sensör kullanıcılarını ayarlama	35
	Destegi görüntüleme	36
	Bize ulaşın	36
	Uygulamayı güncelleme.....	37
4	Saat uygulamasını kullanma.....	38
	Önerilen akıllı saat özellikleri	38
4.1	Saat uygulamasını yükleme.....	40
	Galaxy Watch uygulamasını yükleme	40
	Apple Watch uygulamasını yükleme.....	40
4.2	Saat uygulaması ekranını anlama.....	41
	Temel bilgiler	41
4.3	Saat uygulaması bildirimlerini kontrol etme.....	43
	Ek A Sık sorulan sorular	45
	Ek B Teknik bilgiler	51
B.1	Performans	51
B.2	Siber Güvenlik	55

Kullanmadan önce

- Bu ürün yalnızca kullanıcının toplanmasına izin vermeyi kabul ettiği kişisel bilgileri kullanır.
- Bu ürünün ayrıntıları için üreticiyle iletişime geçin veya web sitesini ziyaret edin.
- Yazılımı çalıştırmak için kullanılan cihazın açık ve kablolu/kablosuz bir ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Not

- Bahsi geçen tüm standartlar ve düzenlemeler, bu kılavuzun düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir.
- i-SENS, Inc. bu kılavuzdaki bilgileri mümkün olduğunca doğru olacak şekilde dikkatle hazırlamıştır. Ancak, i-SENS kılavuzda yer alan herhangi bir hatadan veya eksiklikten sorumlu değildir. i-SENS, ürün güvenilirliğini, özelliklerini veya tasarımını geliştirmek için bu kılavuzda açıklanan ürünü veya ilgili yazılım uygulamalarını önceden haber vermeksizin değiştirebilir.
- Bu belge telif hakkı ile korunmaktadır. Bu kılavuzun i-SENS'in önceden izni olmadan kopyalanması veya değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.
- Görüntüler temsildir ve yalnızca örnek amaçlı olarak sunulur. Gerçek cihaz ekranları ve görünüşleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir.

Belge kuralları

Notasyon kuralları

Bu kılavuzda kılavuzun içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olmak için aşağıdaki notasyon kuralları kullanılmaktadır.

Notasyon kuralları	Açıklama
Kalın harf	Kalın harf; menüler ve dizinler dahil olmak üzere grafik kullanıcı arabiriminin öğelerini görüntülemek için kullanılır.
" "	Tırnak işaretleri, grafik kullanıcı arabirimindeki sayfaları, portalları ve ekranları göstermek için kullanılır.
"Çapraz başvurular"	"Çapraz başvurular" bu belgenin farklı bölümlerine atıf yapmak için kullanılır.
Görsel yardımcılar	Grafik, resim veya ekran görüntüsü şeklindeki görsel yardımcılar, okuyucunun metni anlamasına yardımcı olmak için kullanılır.
Tablolar	Tablolar, büyük miktarda veriyi kolay okunur biçimde sunmak için kullanılır.

Ek açıklamalar

İstisnalar ve sınırlamalar hakkında bilgi için bunlara başvurabilirsiniz.

Not

Yararlı bilgiler sağlayabilecek veya ürünü kullanırken tehlikeden kaçınmanıza yardımcı olabilecek referans durumları belirtir.

Güvenlik Mesajları

Bu kılavuzda ürünü kullanırken önlem alması gereken durumlar konusunda kullanıcıyı uyarmak için aşağıdaki güvenlik mesajı türleri kullanılmaktadır:

⚠ Uyarı

Önlenmediği takdirde ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeyi gösterir.

⚠ Dikkat

Önlenmediği takdirde küçük yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilecek bir durumu gösterir.

Sembollerin tanımları

Bu semboller yalnızca ürün ve ürün kullanımı hakkında değil, aynı zamanda güvenlik hakkında da ek bilgi sağlar.

Sembol	Açıklama
	CE İşareti
	Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilci
	Tıbbi cihaz
	Kullanım talimatlarına veya elektronik kullanım talimatlarına başvurun
	Üretici
	Model numarası
	Benzersiz cihaz tanımlayıcısı

Güvenlik bilgileri

Kullanım endikasyonları

Sens365, 18 yaş ve üzeri diabetes mellitus hastalarında interstisyel sıvıda glikoz ölçümü yoluyla kan şekeri seviyelerinin sürekli izlenmesi için endikedir. Sens365, etkili diyabet yönetimini desteklemek için uyumlu glikoz izleme cihazlarından elde edilen geçmiş glikoz verilerinin incelenmesi, analizi ve değerlendirilmesinde diyabet hastalarına ve bakımlarını üstlenen sağlık uzmanlarına yardımcı olmak üzere hastalar, bakım sağlayıcıları ve sağlık uzmanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sens365, bulut tabanlı web yazılımı (Sens365 Web) ve akıllı cihaz uygulaması (Sens365 Uygulaması) olarak mevcuttur.

Sens365 Web, klinik kararlar almak veya profesyonel sağlık uzmanı tavsiyesinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Hastalar, yazılım tarafından sağlanan bilgilere dayalı olarak herhangi bir tıbbi yorum ve tedavi ayarlaması yapmadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Sağlık uzmanları, bu bilgileri kendileri için mevcut olan diğer ilgili klinik bilgilerle birlikte kullanmalıdır.

Sens365 Uygulaması, ev kullanıcılarının ve sağlık uzmanlarının, uyumlu glikoz izleme cihazlarının kullanıcılarından alınan glikoz verilerini uzaktan görüntülemesini sağlayan ikincil bir görüntüleyicidir. Yazılım, yalnızca ikincil seviyede farkındalık sağlama amaçlıdır ve gerçek zamanlı glikoz bilgilerini iletmesi ve görüntülemesi beklenmemelidir.

Önemli kullanıcı bilgileri

- Sens365'i kullanmak için bir i-SENS hesabı oluşturmanız gerekir.
- Sens365, CareSens Air CGM Sistemi için ikincil bir görüntüleyicidir ve tedavi kararları sağlamak ya da profesyonel sağlık uzmanı tavsiyesinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sens365, CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısının glikoz verilerinin gerçek zamanlı olarak alınmasını garanti etmez.
- Sens365 kullanılmadan önce uyarılar ve dikkat ibareleri okunmalı ve anlaşılmalıdır ve bunlara kesinlikle uyulmalıdır. Sens365, kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kullanılmalıdır.

Uyarılar

- CareSens Air CGM Sistemi kullanıcıları ve aile üyeleri ile vasileri, Sens365 glikoz verilerine dayalı olarak tedavi kararları almamalıdır. Ayrıca Sens365 herhangi bir tıbbi tavsiye sunmaz ve bu amaçla kullanılmamalıdır. Tedavi kararı almak için bir sağlık uzmanına danışmanız gerekir.
- Tıbbi kurumlar ve sağlık uzmanları; Sens365 tarafından sağlanan verileri, tedavi kararları veya analizi için mevcut olan diğer klinik bilgilerle birlikte kullanmalıdır.

Önlemler

- CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısı, glikoz verilerini bakım sağlayıcılarına (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar, tıbbi personel) göndermek için paylaşım özelliğini açmalıdır. Bakım sağlayıcıları paylaşılan içeriği görüntülemek istiyorsa Sens365'i indirmeli ve CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısıyla bağlantı kurmalıdır.
- CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısı bilgilerini Sens365 üzerinden görüntülemek için bakım sağlayıcılarının akıllı cihazlarının internete bağlı olması gerekir.
- CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısının veya bakım sağlayıcısının (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar, tıbbi personel) akıllı cihazı kapalıysa, uçak modundaysa veya internete bağlı değilse glikoz verileri gönderilemez veya alınamaz.
- Bakım sağlayıcıları (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar, tıbbi personel) CareSens Air Sürekli Glikoz İzleme Sistemini kullanıcıyla birlikte yönetebilir ancak etkin glikoz yönetiminin öznesi daima sensör kullanıcısı olmalıdır.
- Bakım sağlayıcıları (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar, tıbbi personel) bağlantıyı sonlandırırsa CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısı tarafından gönderilen içerik artık görüntülenemez.

1 Sens365 uygulamasını anlama

Çalışma mekanizması

Bu ürün, i-SENS'in CareSens Air CGM Sistemi ile işlenmiş glikoz verilerini toplayan ve kaydeden ikincil bir görüntüleme yazılımıdır. Sistem, Android ve iOS akıllı cihazlarda veri gönderebilir ve bilgi görüntüleyebilir. i-SENS'in CareSens Air CGM Sistemi tarafından toplanan ve işlenen glikoz verileri, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifreleme protokolü kullanılarak güvenli bir şekilde bakım sağlayıcılarına (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar ve tıbbi personel dahil) iletebilir.

2 Sens365 uygulamasını yükleme

Sens365 uygulaması ve CareSens Air uygulaması, CareSens Air uygulaması tarafından ölçülen glikoz değerlerini izlemek için bağlanabilir. Uygulamayı yüklemek için aşağıdaki akıllı cihaz özellikleri gereklidir.

Önerilen akıllı cihaz özellikleri

Uygulamayı bir akıllı cihaza yükleyip kullanmak için aşağıdaki minimum sistem gereksinimleri karşılanmalıdır.

İşletim Sistemi	Sürüm	Çözünürlük	Uygulama Belleği	Uygulama Depolama Alanı
Android	Android 8.1 veya üzeri	360 x 640 piksel veya üzeri	200 MB	900 MB*
iOS	iOS 15.0 veya üzeri	375 x 667 piksel veya üzeri	200 MB	890 MB*

*Her bir ek sensör kullanıcısı için 820 MB depolama alanı gerekir.

Not

- Uygulamayı kullanmadan önce gerekli minimum depolama alanına sahip olduğunuzdan emin olun. Depolama alanı yetersiz olduğunda uygulama düzgün çalışmayabilir.
- Uygulamayı yüklemeyi önce akıllı cihazınız için minimum gereksinimleri kontrol edin. Uygulamayı yükledikten sonra akıllı cihazınızın işletim sistemini güncellerseniz uygulama düzgün çalışmayabilir.
- Uyumluluk testimizi geçen akıllı cihazları görmek için resmi CareSens Air web sitesini (<https://caresensair.com/content/compatibility>) ziyaret edin. Uygulama, uyumluluk açısından test edilmemiş akıllı cihazlarda düzgün çalışmayabilir.

Not

- Tarih ve saati akıllı cihazınızın Ayarlar menüsünden otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Tarih ve saat otomatik olarak ayarlanmıyorsa farklı bir saat dilimine seyahat ettiğinizde bunları manuel olarak ayarlamanız gerekir.
- Uygulamayı bilgisayar korsanlığı yoluyla kurcalanmış bir akıllı cihaza yüklemeyin. Uygulama düzgün çalışmayabilir.

Uygulamayı bir akıllı cihaza yükleme

1 Mağazayı açın.

- Android akıllı cihazınızda Play Store uygulamasını başlatmak için  simgesine dokununuz.
- iOS akıllı cihazınızda App Store'u açmak için  simgesine dokununuz.
- Huawei akıllı cihazınızda AppGallery uygulamasını başlatmak için  simgesine dokununuz.

Not

Uygulamanın indirilebilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

2 Arama çubuğuna "Sens365" yazın.

3 Uygulama arama sonuçlarından Sens365 uygulamasını seçin ve **Yükle**'ye dokununuz.

3 Uygulamayı kullanma

Sens365 uygulamasını bir akıllı cihazda çalıştırabilir ve bağlı sürekli glikoz izleme sistemi tarafından ölçülen glikoz değerlerini izleyebilirsiniz. Uygulama tarafından sağlanan glikoz trendi okunu, glikoz trendini, etkinlikleri ve kalibrasyon değerlerini anlamak ve kullanmak, diyabet yönetiminin verimliliğini artırır.

Sens365 uygulamasında depolanan verileri bulut sunucusuna yüklemek için üye olarak kaydolduktan sonra oturum açmanız gerekir. Uygulamaya giriş yapıp CareSens Air sistemini kullandıysanız akıllı cihazınızı kaybetmeniz bile yedek verileri kurtarabilirsiniz.

Bu bölüm şunları yapmanıza yardımcı olacaktır:

1. Kaydolma ve uygulamada oturum açma.
2. CareSens Air uygulamasıyla glikoz verisi paylaşımını etkinleştirme.
3. Uygulamada CareSens Air kullanıcısının glikoz izleme ortamını ayarlama.
4. Uygulamada gösterilen glikoz seviyelerini ve glikoz trendlerini yorumlamayı öğrenme.
5. Uygulamanın sağladığı özellikler hakkında bilgi edinme ve bu özellikleri kullanma.

Dikkat

Uygulama kullanımdayken akıllı cihazdaki uygulamayı silmek, uygulamayla ilgili tüm verilerin kaybedilmesine neden olur.

Uygulamayı silmeniz veya farklı bir akıllı cihaza geçmeniz gerekirse tüm önemli verileri bulut sunucusuna yüklediğinizden ve dosyalarınızı ayrı bir depolama cihazına kaydettiğinizden emin olun.

Not

Akıllı cihaz, Sens365 uygulamasını kullanmak için aşağıdaki izinleri gerektirir:

- Android 13 veya üzeri: Bildirimler (gerekli), Kamera (isteğe bağlı)
- Android 13 altı: Depolama (isteğe bağlı)
- iOS: Bildirimler (gerekli), Kamera (isteğe bağlı)

3.1 Oturum açma

Sens365 uygulamasını kullanmak için kaydolmanız ve oturum açmanız gerekir. E-posta doğrulamasından geçebilir veya kaydolma işlemi sırasında Sosyal Giriş özelliğini kullanabilirsiniz.

İlk kez kullananlar için


Sens365 hesabınız yoksa "Giriş" ekranında "Bir hesap oluşturun" ekranına giderek kaydolabilirsiniz.

1 Akıllı cihazınızda **Sens365** uygulamasını başlatın.

2 Açılış ekranında **Başlayın** ögesine dokununuz.

3 i-SENS oturum açma ekranı görüntülenir. **Bir hesap oluşturun**'a dokununuz.

- Sosyal Giriş işlemini kullanmayı seçerseniz bile bir i-SENS hesabıyla kaydolabilirsiniz.
- Sosyal Giriş sürecini kullanarak kaydolmak için ikamet ettiğiniz ülkeyi ve kullanıcı bilgilerinizi girin ve gerekli hüküm ve koşulları kabul edin.

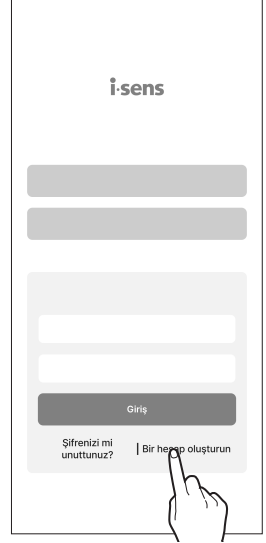

4 E-posta doğrulamasına geçin.

5 Gerekli hüküm ve koşulları kabul edin ve **Tamam**'a dokununuz.

6 Şifreyi ve gerekli tüm bilgileri girin, ardından **Tamam** ögesine dokununuz. Kayıt işlemi tamamlanmıştır.

Önceden kayıtlı kullanıcılar


Sens365 hesabınız varsa mevcut hesabınızı kullanarak "Giriş" ekranında Sens365'te oturum açın.

1 Akıllı cihazınızda Sens365 uygulamasını başlatın.

2 Açılış ekranında **Başlayın** ögesine dokununuz.

3 E-postanızı ve şifrenizi girin, ardından **Giriş**'a dokununuz.

- Sosyal Giriş ile kaydolduysanız Sosyal Giriş aşamasında seçilen aynı hesabı kullanmaya devam edin.
- Mevcut veri bulunuyorsa son 1 yılın verileri otomatik olarak alınır.

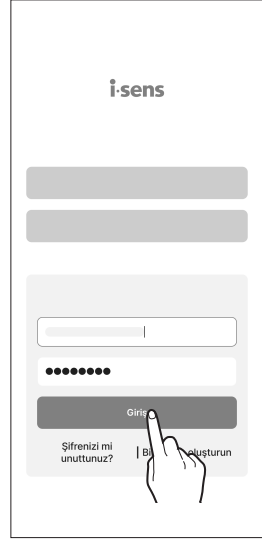

4 Oturum açamazsanız aşağıdaki adımları izleyin.

- E-posta eşleşmezse bu, e-posta adresinizin kayıtlı olmadığı ve tekrar kaydolmanız gerektiği anlamına gelir.
- Şifre yanlışsa **Şifrenizi mi unuttunuz?** seçeneğine dokununuz.
- Girdiğiniz e-posta ve şifre doğru olsa bile e-postanız doğrulanana kadar oturum açamazsınız. E-posta doğrulamasını tamamladıktan sonra tekrar oturum açın.

3.2 Sensör kullanıcısını bağlama

Sens365 uygulaması kullanıcısı, paylaşılan verilere erişmek için CareSens Air kullanıcısı tarafından oluşturulan paylaşım kodunu almalıdır.

Birden fazla sensör kullanıcısından gelen verilere erişmek mümkündür ve veriler güvenli yuva katmanı (SSL) şifreleme protokolü kullanılarak güvenli bir şekilde işlenir.

Sensör kullanıcısı ve Sens365 uygulamasının bağlantısı her iki taraftan da kesilebilir ve bağlantı kesildiğinde veri paylaşımı sonlandırılır.

Sensör kullanıcısı veri bağlantısı

- 1 Sens365 uygulamasını başlattıktan sonra ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokununuz.
- 2 **Bağlantılar**'a dokununuz.
- 3 Sağ üst köşedeki  simgesine dokununuz ve paylaşım kodunu giriniz.
 - Oluşturulan paylaşım kodunun geçerlilik süresi 5 dakikadır. Geçerlilik süresi dolduysa yeni bir paylaşım kodu oluşturun.
 - Paylaşım kodunun nasıl oluşturulacağıyla ilgili talimatlar için CareSens Air kılavuzuna bakınız.
- 4 Kodu girdikten sonra **Tamam**'a dokununuz.



5 CareSens Air uygulamasında yapılandırılan paylaşım seçeneklerini inceleyin ve **Tamam**'a dokunun. Sensör kullanıcısı Sens365'e eklenecektir.

- CareSens Air uygulaması kullanıcısı tarafından yapılandırılmayan paylaşım seçenekleri devre dışı olarak görünür.

< Yeni Sensör Kullanıcısı Bağla

Lütfen sensör kullanıcınızdan almak istediğiniz veriyi seçin.

Glikoz Değerleri ve Etkinlikler ☒ ✓

Kan şekeri ölçümlerinizi ve etkinliklerinizi alın.

Uyarılar ☐

Tüm uyarılar alın.

Tamam

6 Sensör kullanıcısı bağlantısı başarıyla tamamlandığında, CareSens Air uygulamasında bakım sağlayıcısı bağlantısının tamamlandığına dair bir bildirim görüntülenir.

3.3 Ana ekranı anlama

Sensör kullanıcısının verileri doğru şekilde alınırsa veriler ana ekranda görüntülenir. Sens365 ana ekranında glikoz verileri görüntülenir.

Ekranda görüntülenmekte olan sensör kullanıcısının profilini inceleyebilir ve üst menüde bağlı tüm sensör kullanıcılarına ilişkin bildirimleri takip edebilirsiniz. Sens365'in alt menüsünden "Günlük defteri", "Bağlantılar", "Rapor" ve "Ayarlar" ekranlarına da gidebilirsiniz.


Ana ekrandaki glikoz seviyesi ve glikoz trendi oku, glikoz durumunuzu anlamana yardımcı olabilir. Uygulama menüsünün yapısını ve özelliklerini anlamak, Sens365'i daha verimli diyabet yönetimi için kullanmanıza olanak tanır.

Bu bölüm şunları yapmanıza yardımcı olacaktır:

- Ana ekranda neyin görüntülendiğini anlama.
- Ana ekrandaki simgelerin ne yapabileceğini öğrenme.
- Sensör kullanıcısının glikoz verilerini kontrol etme.

Temel bilgiler


Aşağıdaki tabloda Sens365 uygulamasının ana ekranın üst kısmında görüntülenen temel bilgiler açıklanmaktadır.

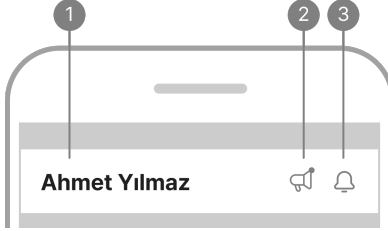

No.	Simge	İsim	Açıklama
1	Ahmet Yılmaz	Sensör kullanıcısının tercih edilen adı	Verileri sağlayan sensör kullanıcısının tercih edilen adı geçerli ekranda görüntülenir.
2		Yeni duyuru bildirimleri	Okunmamış bir duyuru varsa bir simge görüntülenir. "Duyurular" ekranına gitmek için simgeye dokununuz.
3		Bildirim günlüğü	Bağlı tüm sensör kullanıcıları için bildirimleri kontrol edin.

Alt menü


Aşağıdaki tabloda, ana ekranın alt menüsünde bulunan simgeler ve özellikler açıklanmaktadır.

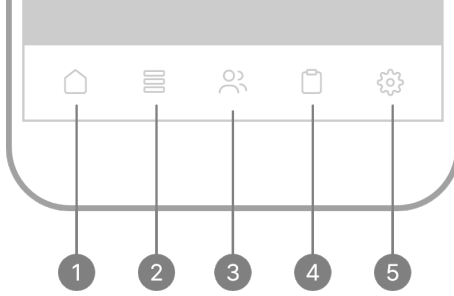

No.	Simge	İsim	Açıklama
1		Ana Sayfa	Uygulama ana ekranına geri dönmek için buna dokununuz.
2		Günlük defteri	Mevcut sensör kullanıcısı tarafından kaydedilen etkinliklerin listesini görüntüler.
3		Bağlantılar	Bağlantılarda sensör kullanıcıyı değiştirin.
4		Rapor	Sensör kullanıcısı için bir rapor oluşturun.
5		Ayarlar	• Profilinizdeki bilgileri görüntüleyin veya düzenleyin. • Sensör kullanıcı listesini kontrol edin ve sensör kullanıcılarını bağlayın veya bağlantılarını kesin. • Birimi kontrol edin. • Parolayı ve Grafik Yüksekliğini (Y eksen) ayarlayın. • Duyurular, Bize Ulaşın, Destek ve Hakkında bölümlerini kontrol edin. • Ayarlarınızı değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. "3.5 Ayarları değiştirme". • Uygulamayı en son sürümüne güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Uygulamayı güncelleme".

Glikoz verileri

Sens365 uygulaması, mevcut glikoz seviyenizi ve glikoz trendi okunu aşağıda gösterildiği gibi görüntüler.

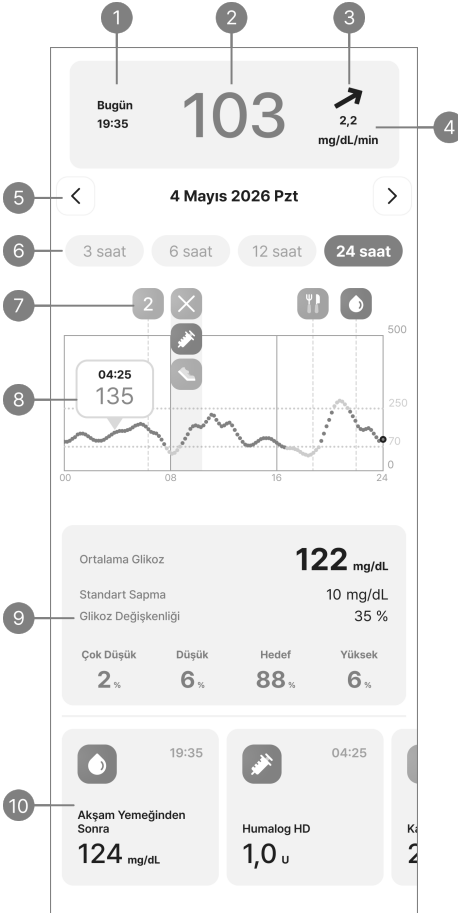

Aşağıdaki tabloda, ana ekranın glikoz seviyesi verilerini nasıl görüntülediği açıklanmaktadır.

No.	Simge	İsim	Açıklama
1	Bugün 19:35	Glikoz seviyesinin son alındığı zaman	Kan şekeri seviyesinin son alındığı tarih ve saat.

No.	Simge	İsim	Açıklama
2	103	Glikoz seviyesi	En son ölçülen glikoz değeri, bir sayı olarak veya aşağıdakilerden biri olarak görüntülenir. - Düşük: 40 mg/dL'den (2,2 mmol/L) daha düşük - Yüksek: 500 mg/dL'den (27,8 mmol/L) daha yüksek
3		Glikoz trendi oku	Önceki ölçümle karşılaştırıldığında glikoz düzeyinizdeki mevcut değişiklik oranı görüntülenir. Trend oku hakkında daha fazla bilgi için bkz. " Trend okları ".
4	2,2 mg/dL/min	Trend	Önceki glikoz seviyesi değerine kıyasla değerlerdeki değişiklikleri görüntüler.
5	< 4 Mayıs 2020 Pzt >	Grafik tarihi	Grafik tarihini seçin.
6	(3 saat) (8 saat) (12 saat) (24 saat)	Grafik X eksen zamanı	Grafik X ekseninin görüntülenme zamanını seçin.
7		Etkinlikleri görüntüle	Grafik döneminde kaydedilen etkinlikleri simge olarak görüntüler.
8		Glikoz trendleri (grafik)	Seçilen dönem sırasında glikoz seviyesindeki değişiklikleri grafik olarak görüntüler.
9	Ortalama Glikoz: 122 mg/dL Standart Sapma: 10 mg/dL Glikoz Değişkenliği: 26 % Ortalama Glikoz: 2 % Standart Sapma: 6 % Glikoz Değişkenliği: 88 % Ortalama Glikoz: 6 %	Glikoz ölçütleri	Seçilen grafik dönemi boyunca glikoz değeri istatistiklerini görüntüler. Ortalama Glikoz, Standart Sapma, Glikoz Değişkenliği, Aralıklardaki Zaman
10	 19:35 Akşam Yemeğinden Sonra 124 mg/dL	Etkinlik	Ekrandaki tarihe eklenen etkinlikler, yeniden eskiye olacak şekilde görüntülenir.

Trend okları

Trend oku, en son glikoz ölçümü ile sondan bir önceki ölçüm arasındaki değişim yönünü ve oranını gösterir.

Ana ekrandaki en son glikoz ölçümünün sağında bir ok olarak gösterilir.

Trend oku	Glikoz seviyesindeki değişiklik	Açıklama
→	Stabil	Glikoz seviyesi son 30 dakikada 30 mg/dL (1,7 mmol/L) veya daha az artmış veya azalmıştır.
↗	Kademeli Olarak Yükseliyor	Glikoz seviyesi son 30 dakikada 31–60 mg/dL (1,7–3,3 mmol/L) artmıştır.
↗	Yükseliyor	Glikoz seviyesi son 30 dakikada 61–90 mg/dL (3,4–5,0 mmol/L) artmıştır.
↑	Hızla Yükseliyor	Glikoz seviyesi son 30 dakikada 91 mg/dL'den (5,1 mmol/L) fazla artmıştır.
↘	Kademeli Olarak Düşüyor	Glikoz seviyesi son 30 dakikada 31–60 mg/dL (1,7–3,3 mmol/L) azalmıştır.
↘	Düşüyor	Glikoz seviyesi son 30 dakikada 61–90 mg/dL (3,4–5,0 mmol/L) azalmıştır.
↓	Hızla Düşüyor	Glikoz seviyesi son 30 dakikada 91 mg/dL'den (5,1 mmol/L) fazla azalmıştır.
...	Bilinmiyor	Veri hacmi, glikoz seviyelerindeki değişikliklerin yönünü ve hızını hesaplamak için yeterli değil.

3.4 Uygulama özelliklerini keşfetme

Kullanıcılar sensör kullanıcısının glikoz seviyesini yönetmek için Sens365 uygulamasının çeşitli özelliklerini kullanabilir. Yaşam tarzını iyileştirmek ve etkili tedavi yöntemleri planlamak amacıyla, etkinlikler ve glikoz seviyelerindeki değişikliklerle sensör kullanıcısının diyeti, fiziksel aktiviteleri ve insülin alımı gözlemlenebilir.

Bu bölümü okumak şunları yapmanıza olanak tanır:


- Sensör kullanıcısını değiştirmek.
- Bildirim günlüğünü kontrol etmek.
- Sensör kullanıcısının etkinlik kayıtlarını kontrol etmek.
- Sensör kullanıcı listesini kontrol etmek ve her sensör kullanıcısı için bildirim koşullarını ayarlama.
- Uygulamayı en yeni sürüme güncelleme.
- Gerektiğinde SSS veya Eğitimleri kontrol etmek.

Sensör kullanıcılarını değiştirme

Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokunarak ekranda görüntülenen sensör kullanıcılarını değiştirebilirsiniz.

Sensör kullanıcılarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokunun.
O sırada bağlı olan sensör kullanıcılarının bir listesi görüntülenir.

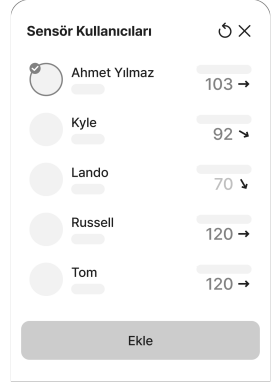

- 2 Listedeki bir hedef seçildiğinde, uygulamanın bilgileri ilgili sensör kullanıcısının verileri olarak görüntülenir.
- **Ekle**'ye dokunarak yeni bir sensör kullanıcısı ekleyebilirsiniz.


Bildirim günlüğünü kontrol etme

Sensör kullanıcı listesi, ana ekranda görüntülenen sensör kullanıcılarını değiştirmenizi sağlar.

Glikoz, sensör ve sensör kullanıcı bağlantısı bildirim kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.


Bildirim günlüğünü kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin.







- 1 Bildirim günlüğünü görmek için ana ekranın sağ üst köşesinde  simgesine dokununuz.
- 2 Bildirim türüne göre filtrelenmiş bildirim listesini görüntülemek için  simgesine dokununuz.
- 3 Sensör kullanıcısı tarafından filtrelenen bildirim listesini görüntülemek için  simgesine dokununuz.





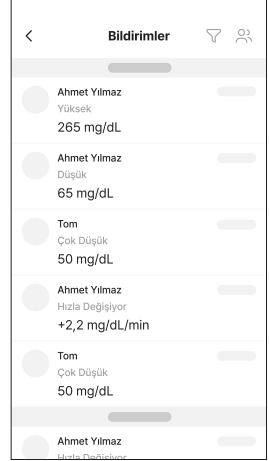


Not

Uygulama kapalıysa veya akıllı cihaz ekranı kilitliyse aşağıdaki tabloda gösterilen duruma özel bildirimler görüntülenir.

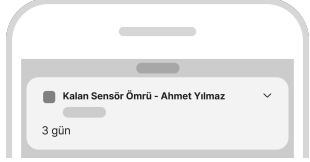Durum	Ekran
Sensör kullanıcısı tarafından kullanılan sensör süresi dolmak üzere olduğunda	
Sensör kullanıcısı tarafından kullanılan sensörün süresi dolduğunda	

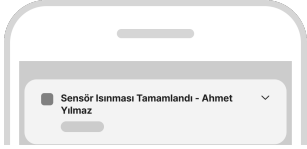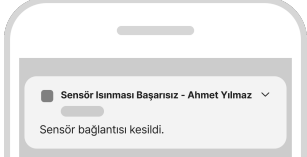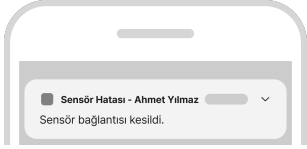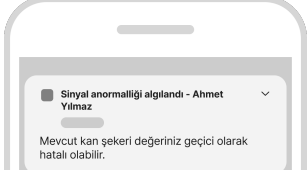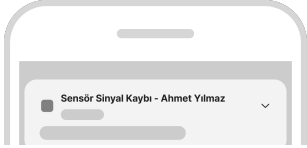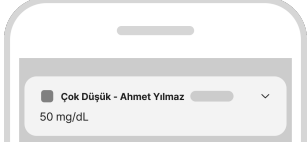Durum	Ekran
Sensör kullanıcısına takılı olan sensör ısınma işlemini tamamladığında	
Sensör kullanıcısına takılı olan sensörün ısınma işlemi başarısız olduğunda	
Sensör kullanıcısına bağlı sensörde bir hata meydana geldiğinde	
Sensör kullanıcısına bağlı sensörün sinyalinde bir sinyal anormalliği algılandığında	
Sensör kullanıcısına bağlı sensör ile uygulama arasında bir sinyal kaybı meydana geldiğinde	
Sensör kullanıcısının glikoz seviyesi belirtilen "Çok Düşük" eşliğinin altında olduğunda	

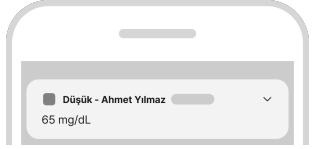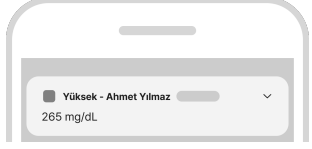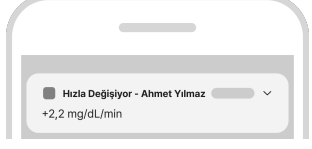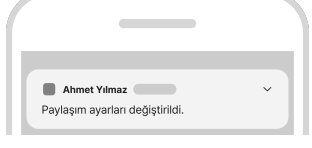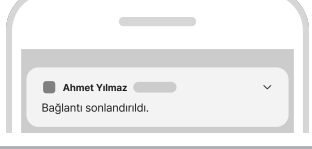Durum	Ekran
Sensör kullanıcısının glikoz seviyesi belirtilen "Düşük" eşik değerinden düşük olduğunda	
Sensör kullanıcısının glikoz seviyesi belirtilen "Yüksek" eşik değerinden yüksek olduğunda	
Sensör kullanıcısının glikoz seviyesindeki değişiklikler, belirtilen "Hızla Değişiyor" eşikinden yüksek olduğunda	
Sensör kullanıcısı paylaşım seçeneklerini değiştirdiğinde	
Sensör kullanıcısının bağlantısı kesildiğinde	


Kayıt defterini görüntüleme

"Günlük defteri" ekranında, ana ekranda o anda görüntülenen sensör kullanıcısı tarafından kaydedilen etkinliklerin listesi görüntülenir.

- Sensör kullanıcıyı bağlarken, sensör kullanıcısının etkinliklerini görüntülemek için etkinlik veri paylaşımı seçeneği ayarlanmalıdır.

Kayıt defterindeki etkinlik ayrıntılarını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokununuz. Geçerli sensör kullanıcısı tarafından kaydedilen etkinlikler "Günlük defteri" ekranında görüntülenir.

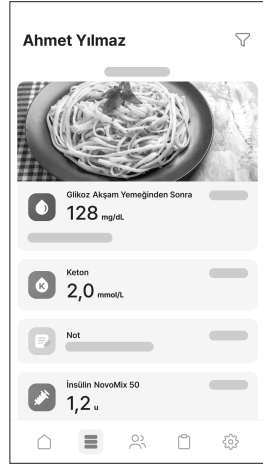

- 2 Etkinlik ayrıntılarını kontrol etmek için etkinliğe dokununuz.

- Aşağıdaki tabloda "Günlük defteri" ekranındaki simgeler açıklanmaktadır.

Simge	İsim	Açıklama
	Glikoz	Sensör kullanıcısı tarafından girilen değerler veya glikoz izleme cihazından alınan ölçümler ve yemek işareti görüntülenir.
	Keton	Sensör kullanıcısı tarafından girilen değerler veya keton izleme cihazından alınan keton değerleri ve yemek işareti görüntülenir.
	İnsülin	Enjekte edilen insülinin adını ve dozunu görüntüler. - Turuncu simge: Ultra kısa etkili - Sarı simge: Kısa etkili - Kahverengi simge: Önceden karıştırılmış - Yeşil simge: Orta düzeyde etkili - Koyu yeşil simge: Uzun etkili


Simge	İsim	Açıklama
	Kalibrasyon	Sensör kullanıcısı tarafından girilen kalibrasyon değeri görüntülenir.
	İlaç	Sensör kullanıcısı tarafından ağızdan alınan ilacın adını ve dozunu görüntüler.
	Yemek	Gram (g) cinsinden sensör kullanıcısının karbonhidrat, protein ve yağ alımı miktarlarını gösterir.
	Egzersiz	Sensör kullanıcısı tarafından dakika cinsinden girilen egzersizin türünü ve süresini görüntüler.
	Not	Sensör kullanıcısı tarafından girilen notları görüntüler.

Raporu görüntüleme

Sensör kullanıcısının glikoz verileri rapor ve istatistik oluşturmak için kullanılabilir. Sens365, raporları PDF dosyaları olarak kaydetme özelliği sunar.

Bir raporu görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin.


- 1 Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokunun.
- 2 "Rapor" ekranı, seçilen dönem boyunca sensör kullanıcısı, AGP, saatlik istatistikler, günlük istatistikler ve yaşam tarzına ilişkin istatistiksel verilere genel bir bakış sağlar.

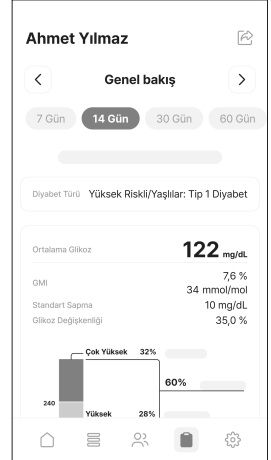

- 3 Dönem sekmesinde, rapor veya istatistikleri yeniden oluşturmak istediğiniz zaman aralığını seçin.

3.5 Ayarları deęiřtirme

Kullanıcılar sensör kullanıcısının glikoz seviyesini yönetmek için Sens365 uygulamasının çeřitli özelliklerini kullanabilir. Ayarlar ekranı, her sensör kullanıcısı için bildirim ortamını yapılandırmanıza ve uygulamayı en son sürümüne güncellenenize olarak tanır.

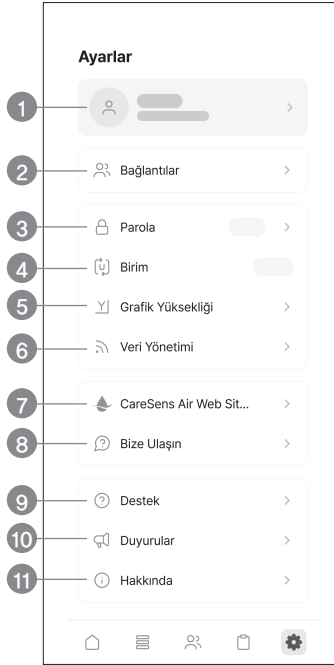

Ařaęıdaki tabloda "Ayarlar" ekranındaki simgeler ve iřlevler açıklanmaktadır. Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokunduęunuzda "Ayarlar" ekranı görüntülenir.

No.	Simge	İsim	Açıklama
1		Profil	Kullanıcı profilinizdeki bilgileri görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

No.	Simge	İsim	Açıklama
2		Bağlantılar	- Bağlı sensör kullanıcılarının listesini kontrol edebilirsiniz. - Sensör kullanıcıları bağlanabilir veya kullanıcıların bağlantısı kesilebilir. - Bildirim, her sensör kullanıcısı için ayarlanabilir.
3		Parola	4 haneli bir parola yapılandırarak bir uygulama kilidi ayarlayabilirsiniz.
4		Birim	Ayarlanan birimi gösterir.
5		Grafik Yüksekliği	- Grafikte gösterilen Y ekseninin maksimum değerini ayarlayın. - Otomatik, 300 mg/dL (16,7 mmol/L), 400 mg/dL (22,2 mmol/L) veya 500 mg/dL (27,8 mmol/L) arasından seçim yapabilirsiniz.
6		Veri Yönetimi	- Sunucunun en son eşitlendiği zamanı kontrol edebilirsiniz. - Düğmeye basarak hemen eşitleyebilirsiniz.
7		CareSens Air Web Sitesi	CareSens Air web sitesine yönlendirilirsiniz.
8		Bize Ulaşın	Uygulamayı kullanırken aklınıza takılan soruları sormak üzere bize ulaşabilirsiniz.
9		Destek	Buradan uygulamadaki eğitimlere ve SSS bölümüne göz atabilirsiniz.
10		Duyurular	Duyuruları kontrol edebilirsiniz.

No.	Simge	İsim	Açıklama
11		Hakkında	Uygulamanın geçerli sürümü görüntülenir. Kullanıcının akıllı cihazında en son sürüm yüklü değilse geçerli sürümün altında bir güncelleme düğmesi görüntülenir. Uygulamayı en yeni sürüme güncellemeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Uygulamayı güncelleme".


Profilinizi düzenleme ve kontrol etme

Kullanıcı profilinizdeki bilgileri görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

1 Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokunun.

2 "Ayarlar" ekranının üst kısmındaki profil tuşuna dokunun.


-  : Profil resminizi değiştirebilirsiniz.
- **Profili Düzenle:** Adınızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi ve telefon numaranızı düzenleyebilirsiniz.
- **Bağlantı Bilgilerini Düzenle:** Bağlı sensör kullanıcılarının görüntülediği adı ayarlayabilirsiniz. Değişiklikler halihazırda bağlı olan sensör kullanıcılarına uygulanmaz.
- **Çıkış Yap:** Uygulamadan çıkış yapabilirsiniz. Oturumunuz kapalıyken hesap bilgilerinizi görüntüleyemezsiniz. Mevcut bir hesaptaki bilgileri görüntülemek için oturum açmanız gerekir.

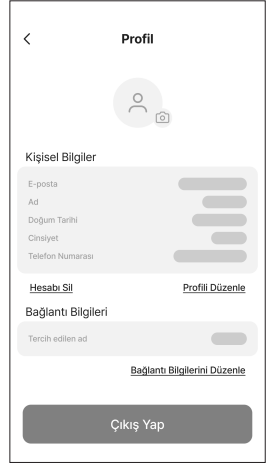

Sensör kullanıcı listesini görüntüleme

Sensör kullanıcı listesini kontrol edebilir ve kullanıcıların bağlantısını kesebilir veya bildirim koşullarını yapılandırabilirsiniz.


- 1 Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokununuz.
- 2 **Bağlantılar**'a dokununuz.
O sırada bağlı olan sensör kullanıcılarının bir listesi görüntülenir.

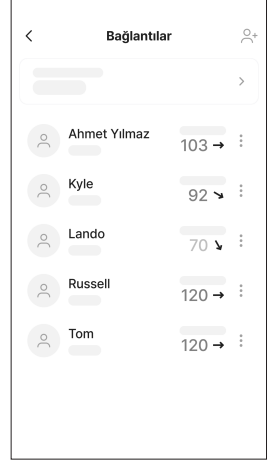

Sensör kullanıcılarını ayarlama

Sensör kullanıcı listesindeki bir kullanıcıya dokunduğunuzda ayarlar açılır penceresi görüntülenir.

- Sensör kullanıcılarının adını ayarlayabilirsiniz.
- Diyabet türünü ayarlayabilirsiniz.
- Veri ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Bildirim koşullarını yapılandırabilirsiniz.
Çok Düşük, Düşük, Yüksek ve Hızla Değişiyor için bildirim alıp almayacağınızı yapılandırabilir ve eşikleri ayarlayabilirsiniz.
- Sensör kullanıcılarının bağlantısını kesebilirsiniz.

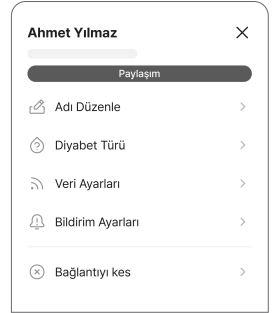

Destegi görüntüleme

Buradan uygulamadaki eğitime ve SSS bölümüne göz atabilirsiniz.


- 1 Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine ve ardından **Destek** ögesine dokununuz.
 - Sens365 tarafından sağlanan uygulama eğitimlerini görüntülemek için **Eğitimler** ögesine dokununuz.
 - Sens365 uygulamasıyla ilgili sık sorulan soruları ve yanıtlarını görüntülemek için **SSS** ögesine dokununuz.



Bize ulaşın

Uygulamayı kullanırken sorular sorabilir veya soru geçmişinizi kontrol edebilirsiniz.

- 1 Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokununuz, ardından **Bize Ulaşın**'a dokununuz.
- 2 "Bize Ulaşın" ekranında **Yeni Soru**'ya dokununuz.

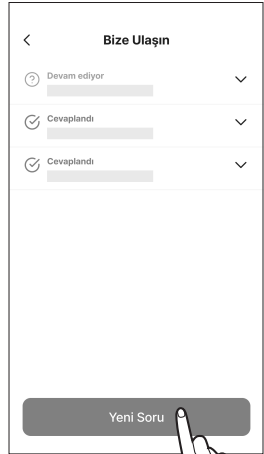

- 3 "Yeni Soru" ekranında sorunuzu giriniz ve **Gönder** ögesine dokununuz.
 - Bir başlık, içerik ve telefon numarası girebilirsiniz ve dosya ekleyebilirsiniz. E-posta adresi otomatik olarak girilir ve kullanıcı tarafından düzenlenemez.

- 4 Sorunuzun alındığını onaylayan açılır pencerede **Tamam**'a dokununuz.

Uygulamayı güncelleme


Sens365 uygulamasının en son sürümü akıllı cihazda yüklü değilse bu, ayarlar ekranında görüntülenir. En son sürümü indirip yüklemek için App Store'a gidin.

Sens365 uygulamasını en son sürüme güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1 Ana ekranın alt kısmındaki  simgesine dokunun, ardından **Hakkında** ögesine dokunun.

2 "Hakkında" ekranında **Şimdi Güncelle** ögesine dokunun.

Şimdi Güncelle seçeneği yalnızca uygulamanın yeni sürümü mevcut olduğunda etkinleştirilir.

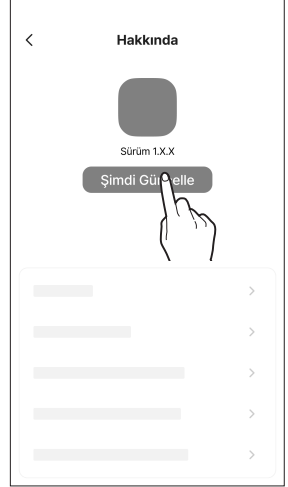

4 Saat uygulamasını kullanma

Sens365 uygulamasıyla akıllı cihazınız tarafından alınan glikoz seviyesi, Sens365 uygulamasıyla akıllı saat kullanılarak izlenebilir.

Saat uygulamasının yüklenmesini destekleyen akıllı saatlerin özellikleri aşağıdaki gibidir.

Önerilen akıllı saat özellikleri

Saat uygulamasını bir akıllı saate yüklemek ve kullanmak için aşağıdaki minimum sistem gereksinimleri karşılanmalıdır.

İşletim Sistemi	Sürüm	Çözünürlük	Uygulama Belleği	Uygulama Depolama Alanı
Wear OS (Galaxy Watch)	3.0 veya üzeri	192 x 192 piksel veya üzeri	100 MB	81 MB*
watchOS (Apple Watch)	9 veya üzeri	324 x 394 piksel veya üzeri	100 MB	81 MB*

*Her bir ek sensör kullanıcısı için 0,1 MB depolama alanı gerekir.

 Not

- Saat uygulamasını kullanmadan önce gerekli minimum depolama alanının mevcut olduğundan emin olun. Yeterli depolama alanı yoksa saat uygulaması düzgün çalışmayabilir.
- Saat uygulamasını yüklemeyen önce akıllı saatin minimum sistem gereksinimlerini kontrol ettiğinizden emin olun. Saat uygulaması yüklendikten sonra akıllı saat işletim sistemi güncellenirse uygulama düzgün çalışmayabilir.
- Uyumluluk testimizi geçen akıllı saatleri görmek için resmi CareSens Air web sitesini (<https://caresensair.com/content/compatibility>) ziyaret edin. Uygulama, uyumluluk testi yapılmayan akıllı saatlerde düzgün çalışmayabilir.
- Sens365'i bir akıllı saat kullanırken uyarıların alınma şekli farklı olabilir.
- Akıllı saat, doğrudan sensörle değil, bir akıllı cihazla (cep telefonu) iletişim kurar.
- Akıllı saat bir akıllı cihaza bağlı değilse veya akıllı cihaz sensöre bağlı değilse akıllı saatte uyarılar veya kan şekeri seviyeleri alınmaz.
- Akıllı saat bağlandığında, uyarıların nasıl alındığını anladığınızdan emin olun.
- Uyarıları kontrol etmek ve titreşimi algılamak için akıllı saat takılıyor olmalıdır.
- Akıllı cihazdaki ayarları kontrol ederek bildirimlerin hem akıllı cihaza hem de akıllı saate gönderilmek üzere ayarlandığından emin olun.
- Sens365 uygulamasından gönderilen bildirimleri devre dışı bırakmayın veya engellemeyin.
- Akıllı saat ekranı açıldığında Sens365 verileri akıllı cihazla senkronize edilir. Veriler saat uygulamasında görünmeden önce kısa bir gecikme olabilir.

4.1 Saat uygulamasını yükleme

Galaxy Watch uygulamasını yükleme

Uygulamayı bir akıllı cihaza yükleme

- 1 Akıllı cihazda Play Store'u başlatın.
- 2 Arama çubuğuna "Sens365" yazın.
- 3 **Yükle**'ye dokunun. Akıllı cihaza yüklendikten sonra uygulama akıllı saate otomatik olarak yüklenir.

Not

- Mobil uygulamayı zaten kullanıyorsanız saat uygulaması, Play Store uygulama sayfasındaki "Daha fazla cihazda mevcut" bölümünden yüklenebilir.
- Ayrıca, Play Store'daki "Diğer cihazlar" veya "Saatler" altında saat uygulamasını bulup yükleyebilirsiniz.

Akıllı saate yükleme

- 1 Akıllı saatte Play Store'u başlatın.
- 2 Arama çubuğuna "Sens365" yazın.
- 3 **Yükle**'ye dokunun. Uygulama akıllı saate yüklenir.

Apple Watch uygulamasını yükleme

- 1 App Store'da "Sens365" ögesini aratın ve **Yükle** ögesine dokunun.
- 2 Sens365 uygulamasının yüklü olduğu iPhone'da saat uygulamasını başlatın. Saat uygulaması zaten çalışıyorsa uygulamayı kapatın ve yeniden başlatın.
- 3 Sens365 uygulaması, saat uygulamasındaki "Kullanılabilir Uygulamalar" listesinde görünür ve saat uygulaması otomatik olarak Apple Watch cihazınıza yüklenir. Yüklemenin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

4.2 Saat uygulaması ekranını anlama


Temel bilgiler

Aşağıdaki tabloda saat uygulaması ekranında görüntülenen temel bilgiler açıklanmaktadır.


Galaxy Watch



Apple Watch

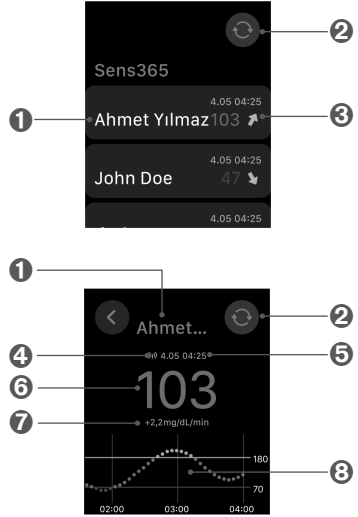

No.	Simge	İsim	Açıklama
1	Ahmet Yılmaz	Sensör kullanıcı adı	Verileri paylaşan sensör kullanıcısının adı görüntülenir.
2		Yenile	Ekran bilgilerini en son alınan verilerle güncelleyin.

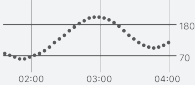No.	Simge	İsim	Açıklama
3	103 	Glikoz verileri	Saat uygulaması alınan son glikoz değerini ve trend okunu gösterir.
4	((p))	Bağlantı durumu	Akıllı cihaz ile sensör arasındaki Bluetooth iletişim durumunu görüntüler.
5	4.05 04:25	Glikoz seviyesinin son alındığı zaman	Kan şekeri seviyesinin son alındığı tarih ve saat.
6	103	Glikoz seviyesi	Saat uygulaması tarafından en son alınan glikoz değerini sayı olarak veya aşağıdakilerden biri olarak görüntüler: - Düşük: 40 mg/dL'den (2,2 mmol/L) daha düşük - Yüksek: 500 mg/dL'den (27,8 mmol/L) daha yüksek
7	+2,2 mg/dL/min	Trend	Önceki ölçümle karşılaştırıldığında glikoz düzeyinizdeki mevcut değişiklik oranı görüntülenir.
8		Glikoz trendleri	Sensör kullanımdayken glikoz seviyenizdeki değişiklikler grafik olarak görüntülenir.

4.3 Saat uygulaması bildirimlerini kontrol etme

Uygulama kapatıldığında veya akıllı saat ekranı kilitlendiğinde bildirimler aşağıdaki tabloda gösterilen duruma göre görüntülenir.

Not

Akıllı cihazdaki ayarları kontrol ederek bildirimlerin hem akıllı cihaza hem de akıllı saate gönderilmek üzere ayarlandığından emin olun. Bildirim görüntüleme biçimi, akıllı saat işletim sistemine bağlı olarak değişir ve bir bildirime dokunmak, ayrıntılı bilgileri görüntülemenizi sağlar.

Durum	Galaxy Watch	Apple Watch
Sensör kullanıcısı tarafından kullanılan sensör süresi dolmak üzere olduğunda		
Sensör kullanıcısı tarafından kullanılan sensörün süresi dolduğunda		
Sensör kullanıcısına takılı olan sensör ısınma işlemini tamamladığında		
Sensör kullanıcısına takılı olan sensörün ısınma işlemi başarısız olduğunda		
Sensör kullanıcısına bağlı sensörde bir hata meydana geldiğinde		
Sensör kullanıcısına bağlı sensörün sinyalinde bir sinyal anormalliği algılandığında		

Durum	Galaxy Watch	Apple Watch
Sensör kullanıcısına bağlı sensör ile uygulama arasında bir sinyal kaybı meydana geldiğinde		
Sensör kullanıcısının glikoz seviyesi belirtilen "Çok Düşük" eşiğinin altında olduğunda		
Sensör kullanıcısının glikoz seviyesi belirtilen "Düşük" eşik değerinden düşük olduğunda		
Sensör kullanıcısının glikoz seviyesi belirtilen "Yüksek" eşik değerinden yüksek olduğunda		
Sensör kullanıcısının glikoz seviyesindeki değişiklikler, belirtilen "Hızla Değişiyor" eşiğinden yüksek olduğunda		
Sensör kullanıcı paylaşım seçeneklerini değiştirdiğinde		
Sensör kullanıcısının bağlantısı kesildiğinde		

Ek A Sık sorulan sorular

Bu bölümde Sens365 kullanılırken meydana gelebilecek durumlar ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı anlatılmaktadır. Bu bölümde yer almayan herhangi bir durum ortaya çıkarsa veya kendi başınıza çözemeyeceğiniz bir sorunla karşılaşırsanız yetkili distribütörle iletişime geçin.

Bu bölüm şunları yapmanıza yardımcı olacaktır:

- Sens365 uygulamasını kullanırken ortaya çıkan sorunların nedenlerini belirleme.
- Sens365 uygulamasını kullanırken oluşan sorunları çözme.

Android

Sensör kullanıcısından glikoz ölçümlerini ve bildirimleri almak için Wi-Fi ve mobil veriyi nasıl bağlayıp etkinleştirebilirim?

Sensör kullanıcılarından glikoz ölçümlerini ve bildirimleri almak için internet bağlantısı gerekir. Hem Wi-Fi hem mobil veri bağlantısını kapatmanız durumunda, sensör kullanıcısının verilerini almak zorlaşır ve glikoz ölçümlerini göremez ya da bildirim alamazsınız.

Wi-Fi bağlantısını açmak için:

- 1 Ayarlar > Bağlantılar bölümüne gidin.
- 2 Wi-Fi bağlantısını açın.

Mobil veri bağlantısını açmak için:

- 1 Ayarlar > Bağlantılar bölümüne gidin.
- 2 Veri Kullanımı'na dokununuz.
- 3 Mobil Veri bağlantısını açın.

Bildirim özelliği Sens365 uygulamasında nasıl çalışır ve bu özelliği nasıl etkinleştirebilirim?

Akıllı cihazınızda bildirim almak için Sens365 uygulamasına izin vermeniz gerekir.

Bildirimleri etkinleştirmek için:

- 1 Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin.

- 2 Uygulama Bildirimleri'ne dokunun.
- 3 Sens365'i uygulama listesinde bulun.
- 4 Sens365 için bildirimleri açın.

Sens365 uygulaması neden düzgün çalışmıyor?

Sens365 uygulamasının düzgün çalışması için Rahatsız Etme (DND) moduna yönelik gerekli izinleri vermeniz gerekir. Bu izni verdiğinizde, Rahatsız Etme modunun en kısıtlayıcı seviyesini ayarlasanız bile Sens365 bildirimlerini her zaman alırsınız.

DND modu izinlerine şu şekilde izin verebilirsiniz:

- 1 Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin.
- 2 Rahatsız Etme > Uygulama Bildirimleri'ni seçin.
- 3 Uygulama Ekle'ye dokunun.
- 4 Sens365'i seçin ve Bitti'ye dokunun.

Bildirimlerim neden gecikiyor?

Güç tasarrufu modu arka plan verilerini devre dışı bırakır. Güç tasarrufu modu açıkken bildirimleriniz gecikebilir.

Güç tasarrufu modunu kapatmak için:

- 1 Ayarlar'a gidin.
- 2 Pil ve Cihaz Bakımı öğesine dokunun.
- 3 Pil öğesine dokunun.
- 4 Güç tasarrufu modunu kapatın.

Uygulama etkinken bile neden bildirim almıyorum?

Mod ve Rutinler özelliklerini kullanmak, uygulama açıkken bile uygulamayı devre dışı bırakabilir ve Sens365 uygulamasından tüm bildirimleri durdurabilir.

Modlar ve Rutinler özelliklerini kapatmak için:

- 1 Ayarlar > Modlar ve Rutinler bölümüne gidin.
- 2 Devre dışı bırakmak istediğiniz moda dokunun veya uygulama kullanım kısıtlamalarına dokunup Sens365'i seçilen uygulama listesine ekleyin.

Uygulamanın duraklatma özelliğini nasıl kapatırım?

Android 10 ve üzeri sürümlerde, uygulamayı geçici olarak durdurmak uygulamayı devre dışı bırakır. Sens365 uygulamasındaki Duraklat işlevini kullanmak tüm bildirimleri durdurur. (Duraklatma özelliği yalnızca Google Phone veya Android One yüklü Android telefonlarda desteklenir.)

Uygulamanın duraklatmasını devre dışı bırakmak için:

- 1 Ana ekranda veya uygulama çekmecesinde Sens365 uygulamasını uzun süre basılı tutun.
- 2 Duraklatma işlevini düzenlemek için Duraklat ögesine dokununuz.

iPhone

Sens365 uygulaması ekran saati ayarları nedeniyle devre dışı kaldığında veya bildirim almayı durdurduğunda ne yapmalıyım?

Ekran süresi bölümünde atıl süre veya uygulama sınırlarının ayarlanmış olması Sens365 uygulamasını geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Sens365 için uygulama ve zaman sınırları ayarlarsanız uygulamayı kullanamayabilir veya bildirim alamayabilirsiniz.

Ekran zaman sınırlarını kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Ayarlar'a gidin.
- 2 Ekran Süresi'ne dokununuz.
- 3 Atıl Süre veya Uygulama Sınırlarını devre dışı bırakın veya Sens365 uygulamasını Her Zaman İzin Verilen listesine ekleyin.

Sens365 uygulamasından glikoz ölçümleri ve bildirimleri almak için interneti nasıl etkinleştiririm?

Sens365 uygulamasından bildirim almak için internete bağlanın. Kullanılabilir Wi-Fi ağı yoksa hücresel veriyi açın. Hem Wi-Fi hem de hücresel veri bağlantısı kapalıysa sensör kullanıcılarından glikoz ölçümleri veya bildirimler almazsınız. Telefonunuz veya mobil operatörünüz eş zamanlı ses ve verileri (VoLTE) desteklemiyorsa aramalar sırasında internet bağlantınız kesilebilir ve bildirimler gecikebilir.

Wi-Fi bağlantısını açmak için:

- 1 Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin.
- 2 Wi-Fi bağlantısını açın.

Hücresele veriyi açmak için:

- 1 Ayarlar > Hücresele bölümüne gidin.
- 2 Hücresele Veriyi açın.

Sens365 uygulamasında bildirimleri nasıl etkinleştirebilirim?

Sens365 uygulamasından bildirim almak için buna izin vermeniz gerekir.

Bildirimleri açmak için:

- 1 Ayarlar'a gidin.
- 2 Sens365 uygulamasına dokununuz.
- 3 Bildirimler ögesine dokununuz.
- 4 Bildirimlere İzin Ver seçeneğini açın.

Bildirimlerim neden gecikiyor?

Düşük Güç Modundayken uygulama açık değilse ve ekranda görüntülenmiyorsa Sens365 uygulaması arka planda çalışmayabilir. Bu, bildirimleri geciktirebilir.

Düşük güç modunu kapatmak için:

- 1 Ayarlar'a gidin.
- 2 Pil ögesine dokununuz.
- 3 Düşük Güç Modunu kapatın.

Rahatsız Etme modunda bildirimler neden sessiz olarak ayarlanır ve bu modu nasıl devre dışı bırakırım?

Rahatsız Etme modu tüm bildirimleri sessize alır ve kullanılmaması önerilir.

Rahatsız Etme modunu kapatmak için:

- 1 Denetim Merkezi'ni açmak için telefon ekranının sağ üst köşesinden aşağı kaydırın.
- 2 Odak ögesine dokununuz.
- 3 Rahatsız Etme'yi kapatın.

Bildirim

Akıllı cihazın bildirim moduna bağlı olarak Sens365 uygulama bildirimlerinde herhangi bir kısıtlama var mı?

Sens365 uygulamasından gelen bildirimler, akıllı cihazınızda ayarlanan bildirim moduna göre sınırlandırılabilir. Akıllı cihazınız sessiz, titreşim veya rahatsız etme moduna ayarlanmışsa sesli bildirim alamayabilirsiniz.

Sens365 uygulamasından bildirim alamamamın sebepleri neler olabilir ve bunlar nasıl çözülür?

Bildirim almamanızın olası nedenleri şunlardır:

- Çok düşük, düşük ve/veya yüksek bildirimleri kapatıldığında,
- Veri paylaşımı özelliği duraklatıldığında,
- Sens365 uygulamasından gelen bildirimler akıllı cihazın ayarlarında devre dışı bırakıldığında,
- Akıllı cihazın ayarlarında tüm bildirimler kapatıldığında,
- İnternet bağlantısı olmadığında,
- i-SENS sunucusu çalışmıyorsa.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse lütfen SSS bölümündeki ilgili çözüme bakın ve sorun devam ederse lütfen en yakın yetkili distribütör veya müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.

Diğerleri

Bağlı sensör kullanıcısının verilerini neden göremiyorum?

- Akıllı cihazınızın ağ durumunu kontrol edin.
- Ayarlar > Bağlantılar > Veri Ayarları bölümüne gidin ve sensör kullanıcısının paylaşım ayarları durumunu kontrol edin.
- Ayarlar > Veri Yönetimi bölümüne gidin ve ardından Şimdi Eşitle'ye dokununuz.

Sensör kullanıcısıyla neden bağlantı kuramıyorum?

- Akıllı cihazınızın ağ durumunu kontrol edin.
- Bağlanmaya çalıştığınız sensör kullanıcısı tarafından oluşturulan paylaşım kodunu doğru girdiğinizden emin olun.
- Girilen paylaşım kodunun hala geçerli olup olmadığını kontrol edin. Oluşturulan paylaşım kodunun 5 dakika boyunca geçerli olduğunu unutmayın.
- Bağlandığınız sensör kullanıcısının Ayarlar > Bağlantılar bölümüne eklenip eklenmediğini doğrulayın.

Sens365 uygulamasını nasıl kullanabilirim ve mevcut verileri yeni bir akıllı cihaza nasıl aktarabilirim?

Sens365 uygulamasını yeni bir akıllı cihazda kullanmak için Sens365 uygulamasını yeni cihaza yükleyip çalıştırın ve aynı i-SENS hesabıyla oturum açın. Oturum başarıyla açıldığında, önceki verileri içe aktarma seçeneği görüntülenir ve seçilen dönemin verilerini yeni akıllı cihazınıza indirebilirsiniz. Önceki uygulamanın glikoz ölçümleri ve trendleri yeni akıllı cihazda görüntülenir.

Ek B Teknik bilgiler

B.1 Performans

1) Android: HS-MA-01

Ürün adı	Sens365
Uyumlu tıbbi cihazlar	• Ürün adı: CareSens Air CGM Sistemi • Model: CGM-ST-002
İletişim ortamı	İletişim protokolü: HTTPS
Çalışma ortamı	• Akıllı cihaz işletim sistemi: Android 8.1 veya üzeri • Çözünürlük: 360 x 640 piksel veya üzeri • Gerekli özellikler: Dokunmatik LCD
İletilen ve alınan veriler	• Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının sürekli glikoz değerleri, kullanıcı girdi verileri (yemekler, insülin, egzersiz vb.) • Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının glikoz seviyelerini de içeren kullanıcı verisi istatistikleri ve raporları • Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısı için glikoz bildirimleri (Çok Düşük, Düşük, Yüksek)
Temel performans	• Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının sürekli glikoz değerlerini ve kullanıcı giriş verilerini görüntüler. • Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının veri istatistiklerini görüntüler ve raporları kaydeder. • Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının glikoz bildirimlerini görüntüler. • Uygulamayı kullanan bakım sağlayıcıları (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar), uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının kullanıcı uygulamasıyla bağlantı kurarak paylaşılan verileri alabilir.
Yazılım sürümü	Sürüm: 1.0.x

2) iOS: HS-MI-01

Ürün adı	Sens365
Uyumlu tıbbi cihazlar	• Ürün adı: CareSens Air CGM Sistemi • Model: CGM-ST-002
İletişim ortamı	İletişim protokolü: HTTPS
Çalışma ortamı	• iOS 15.0 veya üzeri • Çözünürlük: 375 x 667 piksel veya üzeri • Gerekli özellikler: Dokunmatik LCD
İletilen ve alınan veriler	• Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının sürekli glikoz değerleri, kullanıcı girdi verileri (yemekler, insülin, egzersiz vb.) • Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının glikoz seviyelerini de içeren kullanıcı verisi istatistikleri ve raporları • Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısı için glikoz bildirimleri (Çok Düşük, Düşük, Yüksek)
Temel performans	• Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının sürekli glikoz değerlerini ve kullanıcı giriş verilerini görüntüler. • Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının veri istatistiklerini görüntüler ve raporları kaydeder. • Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının glikoz bildirimlerini görüntüler. • Uygulamayı kullanan bakım sağlayıcıları (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar), uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının kullanıcı uygulamasıyla bağlantı kurarak paylaşılan verileri alabilir.
Yazılım sürümü	Sürüm: 1.0.x

3) Wear OS: HS-WA-11

Ürün adı	Sens365
Uyumlu tıbbi cihazlar	• Ürün adı: CareSens Air CGM Sistemi • Model: CGM-ST-002
İletişim ortamı	İletişim protokolü: BLE
Çalışma ortamı	• Wear OS 3.0 veya üzeri • Çözünürlük: 192 x 192 piksel veya üzeri • Gerekli özellikler: Dokunmatik LCD
İletilen ve alınan veriler	• Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcılarının listesi. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcılarının kan şekeri verileri. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcıları için kan şekeri bildirimleri. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcıları için sensör bildirimleri. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcıları için bağlantı bildirimleri.
Temel performans	• Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcılarının kan şekeri verilerini ve grafik çizelgelerini görüntüler. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcılarının kan şekeri bildirimlerini görüntüler.
Yazılım sürümü	Sürüm: 1.0.x

4) watchOS: HS-WI-11

Ürün adı	Sens365
Uyumlu tıbbi cihazlar	• Ürün adı: CareSens Air CGM Sistemi • Model: CGM-ST-002
İletişim ortamı	İletişim protokolü: BLE
Çalışma ortamı	• watchOS 9 veya üzeri • Çözünürlük: 324 x 394 piksel veya üzeri • Gerekli özellikler: Dokunmatik LCD
İletilen ve alınan veriler	• Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcılarının listesi. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcılarının kan şekeri verileri. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcıları için kan şekeri bildirimleri. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcıları için sensör bildirimleri. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcıları için bağlantı bildirimleri.
Temel performans	• Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcılarının kan şekeri verilerini ve grafik çizelgelerini görüntüler. • Uyumlu bir tıbbi cihaza bağlı sensör kullanıcılarının kan şekeri bildirimlerini görüntüler.
Yazılım sürümü	Sürüm: 1.0.x

B.2 Siber Güvenlik

Siber tehditlerle ilgili uyarılar

- Akıllı cihazınıza virüs koruma veya antivirüs programı yükleyerek kötü amaçlı programların akıllı cihazınızın bilgilerine erişmesini engelleyin.
- Paylaşım kodunu girmenize rağmen sensör kullanıcılarından glikoz verilerini alamıyorsanız altı haneli paylaşım kodunun doğru girildiğinden emin olun. Doğru paylaşım kodunu girmeye rağmen aynı sorun devam ederse en yakın yetkili distribütörle iletişime geçin.
- Başka bir cihazda oturum açılması nedeniyle oturumunuzun kapatılması durumunda, oturum açmaya çalışan kişi siz değilseniz şifrenizi değiştirin.
- Beş kereden fazla yanlış şifre girerseniz şifrenizi sıfırlayın.
- Hesabınızı 1 yıldan uzun bir süre kullanmazsanız hesap devre dışı kalır. Hesabınız devre dışı kalırsa hesabı yeniden etkinleştirmeniz gerekir.
- Sens365 ile ilgili bir siber güvenlik olayı meydana gelirse en yakın yetkili distribütör ve yetkili makamla iletişime geçin.
- Sens365 cihazınızı kullanırken güvenli internet erişimi için lütfen hücresel veri bağlantısı, güvenilir bir Wi-Fi ağı (ev veya iş yeriniz gibi) veya saygın bir VPN hizmeti üzerinden güvenli bir bağlantı kullanın.
Ev, restoran, okul, kütüphane, otel, havaalanları veya uçaklar gibi yerlerdeki misafir ağları da dahil olmak üzere güvenli olmayan halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmaktan kaçının. Bu ağlar, uygun güvenlik önlemlerine sahip olmayabilir ve Sens365'inizi kötü amaçlı yazılım veya yetkisiz erişim gibi siber güvenlik risklerine maruz bırakabilir.

Siber tehditlere ilişkin güvenlik

- Kimlik bilgileri geçerli olarak doğrulandıktan sonra kullanıcıya bir belirteç verilir.
- Her bir talep için belirtecin geçerliliği doğrulanır ve ardından kimlik doğrulama işlenir.
- SSL iletişim yöntemi veri göndermek için kullanılır.
- AES kodlaması, kişisel bilgi verilerini şifrelemek için kullanılır ve veriler bir DB'ye kaydedilir.

i·sens



i-SENS, Inc.

43, Banpo-daero 28-gil
Seocho-gu, Seoul 06646

Republic of Korea

CareSensAir.com



**Medical Technology Promedt
Consulting GmbH**

Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert, Germany