

국내 개발 최초 식약처 허가

케어센스® 에어 연속혈당측정시스템

건강관리자(의료진)와
혈당 데이터 공유하기

쉐어코드



케어센스 에어 사용자라면
혈당 데이터를 **의료진과 공유**하여,
더 체계적인 혈당 관리를 시작하세요!



1 케어센스 에어 앱 홈 화면
하단의 **설정**을 탭하세요.



2 연결 메뉴에서
건강관리자를 탭하세요.



3 건강관리자 화면에서
건강관리자 연결을 탭하세요.



4 쉐어 코드 **입력**을 탭하세요.



5 전달 받은 쉐어 코드를
입력하세요.



6 연결하려는 건강관리자가
맞는지 확인하세요.

케어센스 에어
고객센터 080-910-0900

평일 09:00~18:00 (점심시간 12:30~13:30, 주말 및 공휴일 휴무)

Ch

케어센스 CGMS

케어센스 에어가 궁금하신가요?
카카오톡 "채널 추가"하고 다양한 정보를 확인하세요!

🌐 홈페이지 caresensair.com

✉️ 제품문의 cgms.cs@i-sens.com
교육문의 cgms.edu@i-sens.com

🔍 케어센스 에어, 더 자세히 알아보세요!



공식 홈페이지



제품 사용법



당뇨 관련 콘텐츠