

TR

Kullanım kılavuzu

Sens 365 Web



Bu kullanım kılavuzu, Sens365 web sitesinin doğru kullanımına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sens365 web, CareSens Air Sürekli Glikoz İzleme Sisteminin (CareSens Air CGM Sistemi) sensör kullanıcılarına bağlanır.

Bu kullanım kılavuzunu iyice okuyun ve kullanmadan önce tüm önlemlere uyun.

Not

Sens365 web kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu iyice inceleyin.

Sens365, CareSens Air CGM Sistemi için ikincil bir görüntüleyicidir ve tedavi kararları sağlamak ya da profesyonel sağlık uzmanı tavsiyesinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sens365, CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısının glikoz verilerinin gerçek zamanlı olarak alınmasını garanti etmez.

Kullanmadan önce	6
Belge kuralları	7
Güvenlik bilgileri.....	9
1 Sens365 web'i anlama.....	11
Çalışma mekanizması.....	11
2 Sens365 web için önerilen özellikler.....	12
2.1 Önerilen işletim sistemi	12
3 Sens365 web'i kullanma (Genel kullanıcılar)	13
3.1 Sens365 web'i çalıştırma.....	14
3.2 Ana ekranı anlama.....	15
3.3 Raporları görüntüleme.....	17
Genel bakış	18
AGP	21
Karşılaştırma	23
Düzenler	24
Trendler	25
İstatistikler	26
Etkinlikler	27
3.4 Ayarlar	28
Profil bilgilerini değiştirme.....	28
i-SENS hesaplarını yönetme	29
Bakım sağlayıcılarını yönetme.....	30
3.5 Alıcıyı bağlama.....	31
Alıcıyı bilgisayara bağlama	31
Alıcı ekranını anlama.....	32
Alıcı işlevlerini keşfetme.....	33

4	Sens365 web'i kullanma (Sağlık uzmanları)	34
4.1	Uzman hesabına geçme.....	35
	Sağlık uzmanı kimlik doğrulaması.....	35
4.2	Uzman ekranını anlama	37
4.3	Grup ekranını anlama.....	38
4.4	Grupları yönetme	39
	Grup ekleme	39
	Sensör kullanıcılarını davet etme	39
	Bakım sağlayıcılarını davet etme.....	39
4.5	Sensör kullanıcı raporunu görüntüleme.....	40
4.6	Alıcı kullanıcılarını seçme	41
	Ek A Etkin olmayan hesap politikası.....	42
	Sens365 etkin olmayan hesap politikası	42
	Sensör kullanıcılarının verilerinin korunması	42
	Ek B Teknik bilgiler	43
B.1	Performans.....	43
B.2	Siber Güvenlik.....	44

Kullanmadan önce

- Bu ürün yalnızca kullanıcının toplanmasına izin vermeyi kabul ettiği kişisel bilgileri kullanır.
- Bu ürünün ayrıntıları için üreticiyle iletişime geçin veya web sitesini ziyaret edin.
- Yazılımı çalıştırmak için kullanılan cihazın açık ve kablolu/kablosuz bir ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Not

- Bahsi geçen tüm standartlar ve düzenlemeler, bu kılavuzun düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir.
- i-SENS, Inc. bu kılavuzdaki bilgileri mümkün olduğunca doğru olacak şekilde dikkatle hazırlamıştır. Ancak, i-SENS kılavuzda yer alan herhangi bir hatadan veya eksiklikten sorumlu değildir. i-SENS, ürün güvenilirliğini, özelliklerini veya tasarımını geliştirmek için bu kılavuzda açıklanan ürünü veya ilgili yazılım uygulamalarını önceden haber vermeksizin değiştirebilir.
- Bu belge telif hakkı ile korunmaktadır. Bu kılavuzun i-SENS'in önceden izni olmadan kopyalanması veya değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.
- Görüntüler temsildir ve yalnızca örnek amaçlı olarak sunulur. Gerçek cihaz ekranları ve görünüşleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir.

Belge kuralları

Notasyon kuralları

Bu kılavuzda kılavuzun içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olmak için aşağıdaki notasyon kuralları kullanılmaktadır.

Notasyon kuralları	Açıklama
Kalın harf	Kalın harf; menüler ve dizinler dahil olmak üzere grafik kullanıcı arabiriminin öğelerini görüntülemek için kullanılır.
" "	Tırnak işaretleri, grafik kullanıcı arabirimindeki sayfaları, portalları ve ekranları göstermek için kullanılır.
"Çapraz başvurular"	"Çapraz başvurular" bu belgenin farklı bölümlerine atıf yapmak için kullanılır.
Görsel yardımcılar	Grafik, resim veya ekran görüntüsü şeklindeki görsel yardımcılar, okuyucunun metni anlamasına yardımcı olmak için kullanılır.
Tablolar	Tablolar, büyük miktarda veriyi kolay okunur biçimde sunmak için kullanılır.

Ek açıklamalar

İstisnalar ve sınırlamalar hakkında bilgi için bunlara başvurabilirsiniz.

Not

Yararlı bilgiler sağlayabilecek veya ürünü kullanırken tehlikeden kaçınmanıza yardımcı olabilecek referans durumları belirtir.

Güvenlik Mesajları

Bu kılavuzda ürünü kullanırken önlem alması gereken durumlar konusunda kullanıcıyı uyarmak için aşağıdaki güvenlik mesajı türleri kullanılmaktadır:

⚠ Uyarı

Önlenmediği takdirde ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeyi gösterir.

⚠ Dikkat

Önlenmediği takdirde küçük yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilecek bir durumu gösterir.

Sembollerin tanımları

Bu semboller yalnızca ürün ve ürün kullanımı hakkında değil, aynı zamanda güvenlik hakkında da ek bilgi sağlar.

Sembol	Açıklama
	CE İşareti
	Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilci
	Tıbbi cihaz
	Kullanım talimatlarına veya elektronik kullanım talimatlarına başvurun
	Üretici
	Model numarası
	Benzersiz cihaz tanımlayıcısı

Güvenlik bilgileri

Kullanım endikasyonları

Sens365, 18 yaş ve üzeri diabetes mellitus hastalarında interstisyel sıvıda glikoz ölçümü yoluyla kan şekeri seviyelerinin sürekli izlenmesi için endikedir. Sens365, etkili diyabet yönetimini desteklemek için uyumlu glikoz izleme cihazlarından elde edilen geçmiş glikoz verilerinin incelenmesi, analizi ve değerlendirilmesinde diyabet hastalarına ve bakımlarını üstlenen sağlık uzmanlarına yardımcı olmak üzere hastalar, bakım sağlayıcıları ve sağlık uzmanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sens365, bulut tabanlı web yazılımı (Sens365 Web) ve akıllı cihaz uygulaması (Sens365 Uygulaması) olarak mevcuttur.

Sens365 Web, klinik kararlar almak veya profesyonel sağlık uzmanı tavsiyesinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Hastalar, yazılım tarafından sağlanan bilgilere dayalı olarak herhangi bir tıbbi yorum ve tedavi ayarlaması yapmadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Sağlık uzmanları, bu bilgileri kendileri için mevcut olan diğer ilgili klinik bilgilerle birlikte kullanmalıdır.

Sens365 Uygulaması, ev kullanıcılarının ve sağlık uzmanlarının, uyumlu glikoz izleme cihazlarının kullanıcılarından alınan glikoz verilerini uzaktan görüntülemesini sağlayan ikincil bir görüntüleyicidir. Yazılım, yalnızca ikincil seviyede farkındalık sağlama amaçlıdır ve gerçek zamanlı glikoz bilgilerini iletmesi ve görüntülemesi beklenmemelidir.

Önemli kullanıcı bilgileri

- Sens365'i kullanmak için bir i-SENS hesabı oluşturmanız gerekir.
- Sens365, CareSens Air CGM Sistemi için ikincil bir görüntüleyicidir ve tedavi kararları sağlamak ya da profesyonel sağlık uzmanı tavsiyesinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sens365, CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısının glikoz verilerinin gerçek zamanlı olarak alınmasını garanti etmez.
- Sens365 kullanılmadan önce uyarılar ve dikkat ibareleri okunmalı ve anlaşılmalıdır ve bunlara kesinlikle uyulmalıdır. Sens365, kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kullanılmalıdır.

Uyarılar

- CareSens Air CGM Sisteminin kullanıcıları ve aile üyeleri ile vasileri, Sens365 glikoz verilerine dayalı olarak tedavi kararları almamalıdır. Ayrıca Sens365 herhangi bir tıbbi tavsiye sunmaz ve bu amaçla kullanılmamalıdır. Tedavi kararı almak için bir sağlık uzmanına danışmanız gerekir.
- Tıbbi kurumlar ve sağlık uzmanları; Sens365 tarafından sağlanan verileri, tedavi kararları veya analizi için mevcut olan diğer klinik bilgilerle birlikte kullanmalıdır.

Önlemler

- CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısı, glikoz verilerini bakım sağlayıcılarına (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar, tıbbi personel) göndermek için paylaşım özelliğini açmalıdır. Bakım sağlayıcıları paylaşılan içeriği görüntülemek istiyorsa Sens365'i indirmeli ve CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısıyla bağlantı kurmalıdır.
- Bakım sağlayıcıların akıllı cihazlarının, CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısı tarafından Sens365 üzerinden paylaşılan bilgileri görüntüleyebilmesi için internete bağlı olması gerekir.
- CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısının veya bakım sağlayıcısının (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar, tıbbi personel) akıllı cihazı kapalıysa, uçak modundaydı veya internete bağlı değilse glikoz verileri gönderilemez veya alınamaz.
- Bakım sağlayıcılar (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar, tıbbi personel) CareSens Air CGM Sistemini kullanıcıyla birlikte yönetebilir ancak etkin glikoz yönetiminin öznesi daima sensör kullanıcısı olmalıdır.
- Bakım sağlayıcıları (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar, tıbbi personel) bağlantıyı sonlandırırca CareSens Air CGM Sistemi kullanıcısı tarafından gönderilen içerik artık görüntülenemez.

1 Sens365 web'i anlama

Çalışma mekanizması

Bu ürün, i-SENS'in CareSens Air CGM Sistemi ile işlenmiş glikoz verilerini toplayan ve kaydeden ikincil bir görüntüleme yazılımıdır. Sistem, Android ve iOS akıllı cihazlarda veri gönderebilir ve bilgi görüntüleyebilir. i-SENS'in CareSens Air CGM Sistemi tarafından toplanan ve işlenen glikoz verileri, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifreleme protokolü kullanılarak güvenli bir şekilde bakım sağlayıcılarına (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar ve tıbbi personel dahil) iletebilir.

2 Sens365 web için önerilen özellikler

Aşağıdaki işletim sistemlerinin üreticileri tarafından uyumlu olduğu doğrulanmıştır.

2.1 Önerilen işletim sistemi



Not

Önerilen teknik özelliklere uygun bir işletim sistemi kullandığınızdan emin olun. Sens365 web'in, uyumlu olduğu doğrulanmamış işletim sistemlerinde düzgün çalışacağı garanti edilmez.

Önerilen tarayıcı	Çözünürlük
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari	1280 x 800 piksel veya üzeri

İşletim Sistemi	Sürüm
Windows	10 veya üzeri
Mac OS	11 veya üzeri

3 Sens365 web'i kullanma (Genel kullanıcılar)

Sens365 web'i kullanarak CareSens Air uygulaması veya alıcısı tarafından ölçülen glikoz değerlerini izleyebilirsiniz. Sens365 web'de oturum açmak için bir hesap oluşturmanız gerekir.

Sens365 web tarafından sunulan çeşitli özelliklerin kullanılması diyabet yönetiminin verimliliğini artırır.

Bu bölüm şunları yapmanıza yardımcı olacaktır:


1. Sens365 web sitesini açma ve giriş yapma.
2. Glikoz raporlarını görüntüleme ve anlama.
3. Glikoz verilerinizi bakım sağlayıcıları ve profesyonellerle paylaşma.
4. Verilerinizi görüntülemek için bir alıcı bağlama.
5. Ayarları değiştirerek kişisel bilgileri düzenleme ve i-SENS hesaplarını yönetme.

3.1 Sens365 web'i çalıştırma

- 1 Tarayıcınızı açın ve Sens365 web URL'sini girin.
URL: <https://sens365.com>
Sens365 web'e erişmek için **Başlayın** öğesine tıklayın.

- 2 i-SENS hesabınızla oturum açın.

- Hesabınız yoksa lütfen bir hesap oluşturun. **Bir hesap oluşturun** seçeneğine tıklayın ve e-postanızı doğrulayarak, gerekli hüküm ve koşulları kabul ederek, ikamet ettiğiniz ülkeyi ve kullanıcı bilgilerini girerek kayıt işlemini tamamlayın.
- Sosyal Giriş seçeneğini belirleseniz bile bir i-SENS hesabıyla kaydolabilirsiniz. Bu durumda, oturum açarken lütfen aynı Sosyal Giriş seçeneğini belirleyin.
- Şifrenizi unutursanız veya değiştirmeniz gerekirse **Şifrenizi mi unuttunuz?** seçeneğine tıklayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

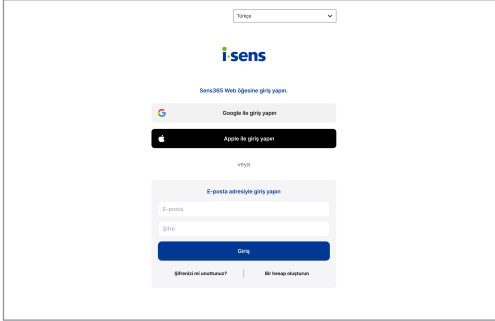


Not

Sağ üstteki dili gerektiği gibi değiştirin.

3.2 Ana ekranı anlama

Aşağıdaki tabloda, oturum açtıktan sonra Sens365 web ana ekranına girdiğinizde görüntülenen temel bilgiler açıklanmaktadır.

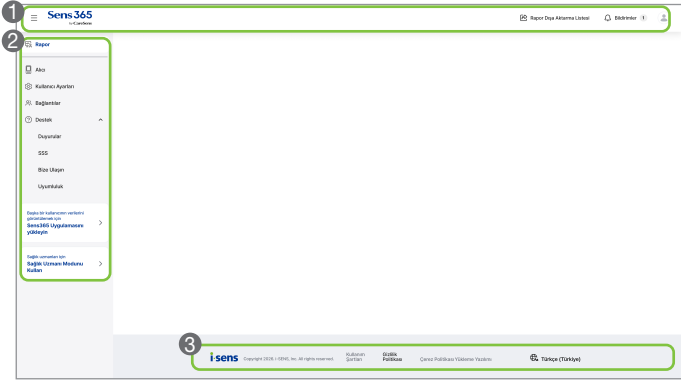

No.	İsim	Açıklama
1	Üst Alan	- Sens365 Ana Sayfası Kısayolu: Sens365 ana sayfasına geçiş yapar. - Rapor Dış Aktarma Listesi: Dış aktarma listesine rapor ekleyin ve raporları yönetin. - Bildirimler: Davet listeleri ve duyurular gibi bildirim günlüklerini kontrol edin. - Profil: Profil bilgilerini görüntüleyin ve kişisel bilgileri değiştirin.
2	Sol Menü	- Rapor: Belirli bir dönem boyunca kaydedilen glikoz verilerini analiz edin ve raporlar aracılığıyla glikoz durumunuzu kontrol edin. - Alıcı: Glikoz verilerini yüklemek için bir alıcı bağlayın. - Kullanıcı Ayarları: Profil bilgilerini görüntüleyin ve kişisel bilgileri değiştirin. - Bağlantılar: Bağlı bakım sağlayıcılarının listesini yönetin. - Destek: Duyurular, SSS, Bize Ulaşın ve Uyumluluk gibi bilgileri görüntüleyin. - Kısayol Başlığı: Sens365 uygulamasını yükleyin veya sağlık uzmanı kimlik doğrulamasını tamamlayın.

No.	İsim	Açıklama
3	Alt Alan	• i-SENS Web Sitesi Kısayolu • Kullanım Şartları • Gizlilik Politikası • Çerez Politikası • Yükleme Yazılımı • Dil Ayarları

3.3 Raporları görüntüleme

- 1 Rapor ekranına erişmek için sol üst menüdeki  **Rapor** ögesine tıklayın.
- 2 Aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmek için raporun üst kısmındaki simgeleri kullanın.




No.	İsim	Açıklama
1	Hedef Aralığı Ayarları	Raporda görüntülenen hedef glikoz aralığını değiştirin.
2	Dönem	Rapor görüntüleme süresini değiştirin.
3		AGP raporunu metin olarak kopyalayın.
4		Rapor içeriğini kaydedin, yazdırın veya iletin.
5		Rapor içeriğini Excel'e aktarın.

- 3 Bu sayfada, ilgili bilgileri görüntülemek için aşağıdaki raporlara tıklayın.
 - Genel bakış, AGP, Karşılaştırma, Düzenler, Trendler, İstatistikler, Etkinlikler

Genel bakış

Aşağıdaki glikoz ölçütleri ve seçilen dönem için insülin ve sensör verileri gibi temel bilgiler sağlanır.

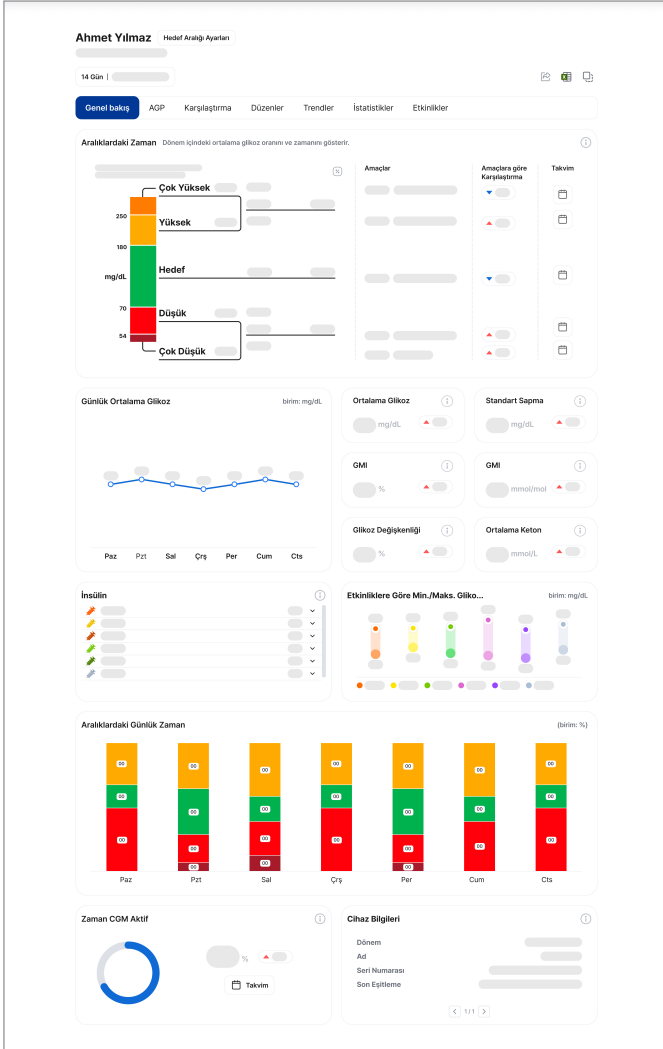


İsim	Açıklama
Aralıklardaki Zaman	Seçilen dönemde glikozun her bir glikoz aralığında kaldığı zamanın yüzdesini gösterir. • Hedef: Glikoz seviyelerinin hedef glikoz aralığında kaldığı zamanın yüzdesini gösterir. • Düşük/Çok Düşük: Glikoz değerlerinin hedef aralıktan daha düşük veya çok daha düşük olduğu zamanın yüzdesini gösterir. • Yüksek/Çok Yüksek: Glikoz değerlerinin hedef aralıktan daha yüksek veya çok daha yüksek olduğu zamanın yüzdesini gösterir.
Günlük Ortalama Glikoz	Haftanın gününe göre seçilen dönem için ortalama glikoz değerlerini sağlar.
Ortalama Glikoz	Seçilen dönem için ortalama glikoz değeri.
Standart Sapma	Ölçülen glikoz düzeylerinin ortalamadan ne kadar saptığını gösteren sayısal değer. Değerin düşük olması, glikozun tutarlı bir aralıkta korunduğunu gösterir.
Glikoz Yönetim Göstergesi (GMI)	Seçilen dönem için ortalama glikoz değerine göre tahmini gluke hemoglobin (A1C) seviyesini sunar.
Glikoz Değişkenliği	Standart sapmanın ortalama glikoza bölünmesiyle hesaplanan yüzde (%) değeri, seçilen dönemde ölçülen glikozdaki değişkenlik derecesini temsil eder.
Ortalama Keton	Seçilen dönem için ortalama keton değeri.
İnsülin	Tipe göre uygulanan toplam günlük insülin dozunu gösterir.
Etkinliklere Göre Min./Maks. Glikoz (glikoz ölçüm cihazı verilerine göre)	Kişisel kan şekeri ölçüm cihazıyla ölçülen veriler içinde etkinliklere göre minimum ve maksimum glikozu görüntüler.
Aralıklardaki Günlük Zaman	Haftanın gününe göre Aralıklardaki Günlük Zaman yüzdesini görüntüler.
Zaman CGM aktif	CGM verilerinin toplandığı sürenin, raporun toplam süresine bölünmesiyle elde edilen yüzde.
Cihaz Bilgileri	İlgili dönem boyunca takılan sensörle ilgili bilgileri görüntüler.

İsim	Açıklama
Glikoz Keton Endeksi (GKI)	Seçilen dönemde glikoz seviyelerinin keton seviyelerine oranını ifade eder. Bu endeks diyabet, ketojenik diyetler vb. ile ilgili sağlık koşullarını izlemek için kullanılır.
Günlük Ortalama Öğün	Seçilen dönem için besin ögesine göre ortalama günlük alımı gösterir.
Günlük Ortalama Egzersiz	Egzersiz yoğunluğuna göre seçilen dönem için günlük ortalama egzersiz süresini belirtir.

AGP

Ayaktan glikoz profili (AGP), belirli bir süre boyunca toplanan glikoz verilerini özetleyen, gün boyunca glikoz değişikliklerini gösteren bir rapordur. Seçilen dönem için standart AGP raporunu görüntüleyebilirsiniz.

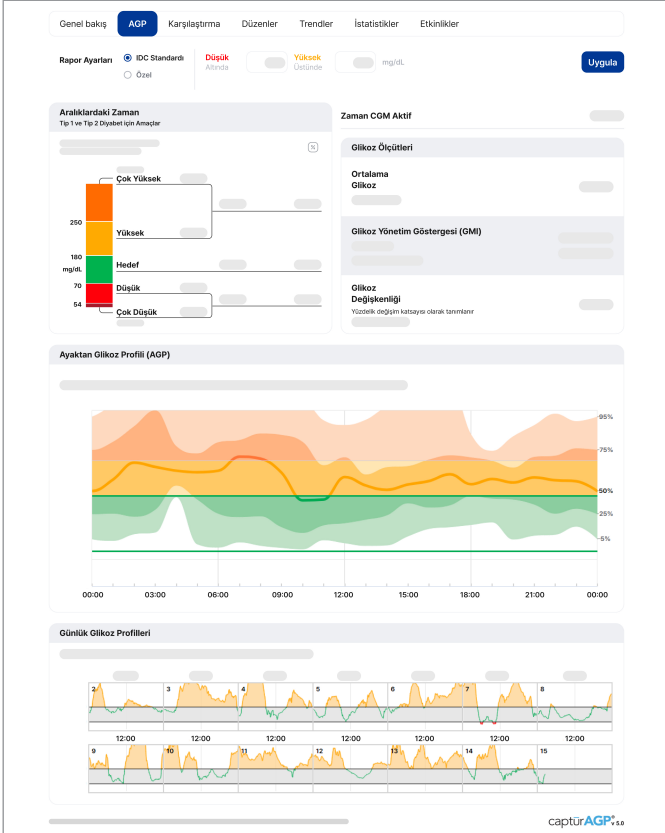


İsim	Açıklama
Rapor Ayarları	Düşük/yüksek eşikler IDC (Uluslararası Diyabet Merkezi) standartlarına veya kullanıcı ayarlarına göre belirlenebilir.
Ayaktan Glikoz Profili (AGP)	Görüntüleme süresi boyunca toplanan glikoz değerleri, 24 saatlik bir profile özetlenerek medyan (%50) ve yüzde aralıkları gösterilir.

İsim	Açıklama
Günlük Glikoz Profilleri	Gece yarısından gece yarısına kadar olan süreyi temsil eder.

Karşılaştırma


AGP raporlarının dönem bazında karşılaştırılabilmesi için iki döneme ait grafikler yan yana görüntülenir.

- Aralıklardaki Zaman Karşılaştırması
- Glikoz Ölçütleri Karşılaştırması (Glikoz Değişkenliği, Standart Sapma, GMI, Ortalama Glikoz)
- Ayaktan Glikoz Profili (AGP) Karşılaştırması

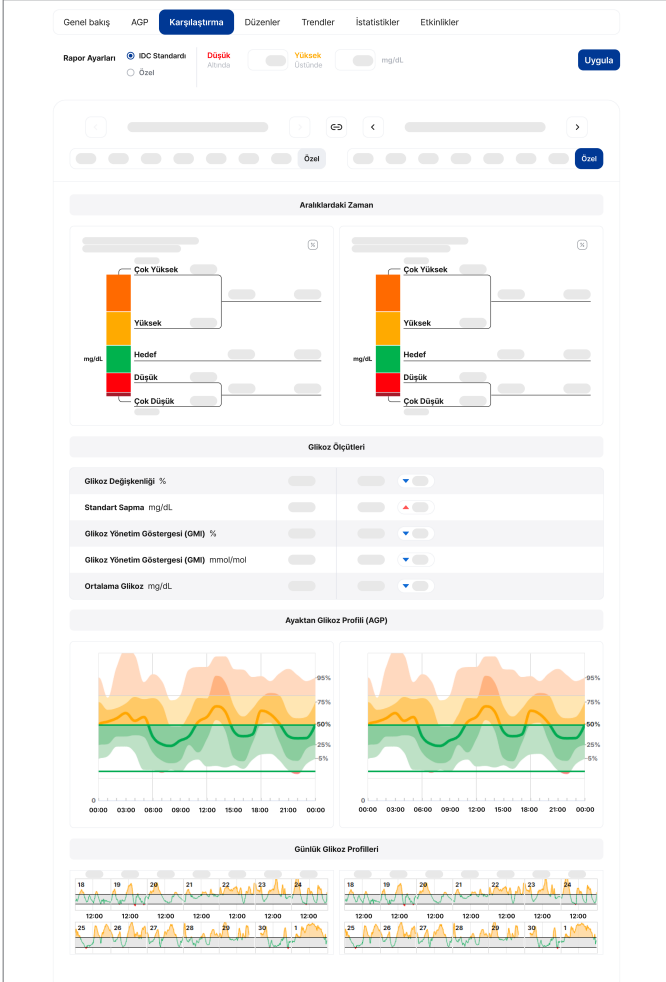


Düzenler

Seçilen dönemde Düşük, Hedef ve Yüksek değerlerinin olduğu zamanlar için günlük grafikleri ve etkinlik bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

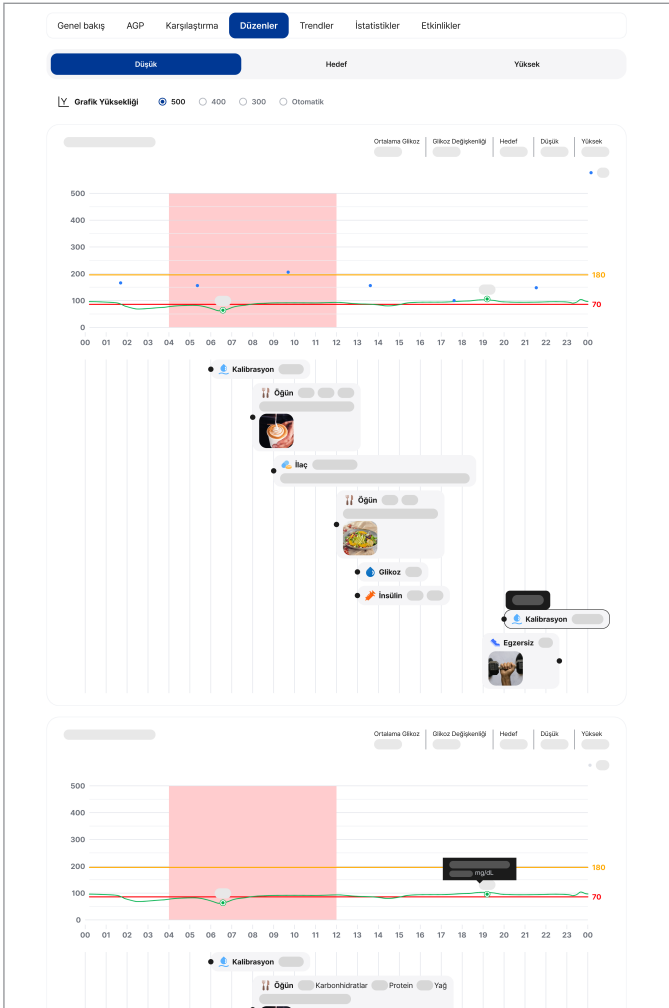

Trendler

Seçilen dönem için günlük ve haftalık trendleri görüntüleyebilirsiniz. Etkinlik bilgileri de görüntülenir.

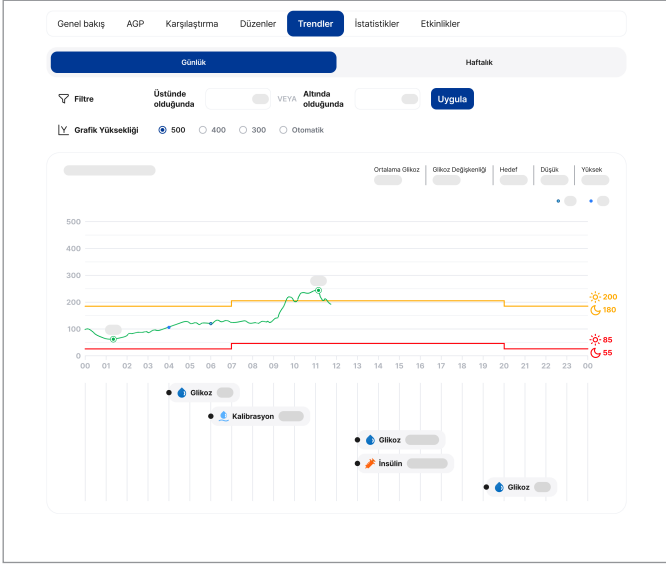

İstatistikler


Seçilen dönem için aşağıdaki bilgiler gün ve saate göre sağlanır:

- Aralıklardaki Zaman
- Ortalama Glikoz
- Ortalama Glikoz Değişkenliği
- Ortalama CGM Aktif Zamanı



Etkinlikler

Seçilen dönemde girilen kullanıcı etkinlikleri tarihe göre görüntülenir ve belirli etkinlikleri görüntülemek için filtrelenebilir.

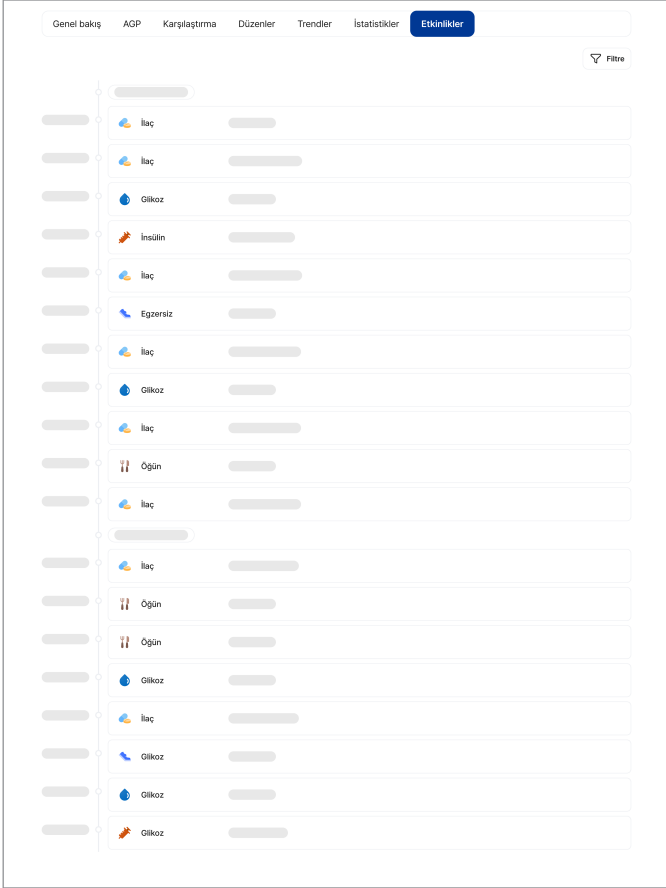

3.4 Ayarlar

Profil bilgilerini değiştirme

- 1 Kişisel bilgileri değiştirmek için sağ üstteki profile veya sol menüdeki **Kullanıcı Ayarları** öğesine tıklayın.


The screenshot shows the Sens365 web interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Profil, Alın, Kullanıcı Ayarları, Sağlık Durumu, and others. The 'Kullanıcı Ayarları' option is highlighted. The main content area is titled 'Profil' and contains a form for updating personal information. The form includes a profile picture placeholder, a name field (Ad), a surname field (Soyad), a birth date field (Doğum Tarihi), a gender dropdown (Cinsiyet), and a diabetes type dropdown (Diyabet Türü). There are also buttons for 'Güncelle' (Update) and 'İptal' (Cancel). At the bottom right, there is a small text: '© 2023 Sens365. Tüm hakları saklıdır.'

- 2 Düzenlenebilecek kişisel bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Ad
- Cinsiyet
- Doğum Tarihi
- Diyabet Türü

i-SENS hesaplarını yönetme


Hesabınızı yönetmek için "Profil" ekranında **i-SENS Hesap Ayarlarına** git seçeneğine tıklayın.

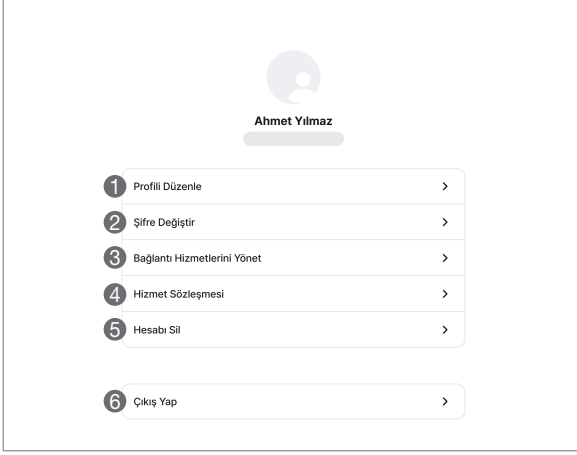

No.	İsim	Açıklama
1	Profil Düzenle	Kayıt sırasında girilen bilgileri görüntüleyin ve güncelleyin.
2	Şifre Değiştir	Şifrenizi yenisiyle değiştirin.
3	Bağlantı Hizmetlerini Yönet	Geçerli hesaba bağlı servisleri görüntüleyin ve bağlantısını kesin.
4	Hizmet Sözleşmesi	Kullanım şartlarını ve politikaları inceleyin.
5	Hesabı Sil	Hesabınızı sildiğinizde, glikoz verileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler silinir.
6	Çıkış Yap	i-SENS hesabından ve hizmetlerinden çıkış yapın.

Bakım sağlayıcılarını yönetme

Bir bakım sağlayıcısı ile bağlantı kurarak verilerinizi paylaşabilirsiniz. Veri paylaşmayı durdurmak isterseniz bakım sağlayıcısının bağlantısını kaldırarak veri paylaşımını durdurabilirsiniz.

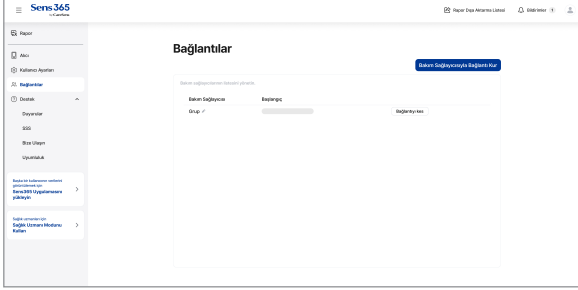

Bakım sağlayıcıyı bağlama

- Bağlantılar** öğesine tıkladığınızda, paylaşılan verilerinizi alan bakım sağlayıcıların listesi görüntülenir.
- Yeni bir bakım sağlayıcı bağlamak için **Bakım Sağlayıcısıyla Bağlantı Kur** öğesine tıklayın.
- Verileri alacak olan bakım sağlayıcısının Paylaşım Kodunu girin ve **Tamam'a** tıklayın.
- Paylaşım kodunu girdikten sonra bakım sağlayıcısına bağlanmak için veri sağlama işlemini kabul etmeniz gerekir. Lütfen ilgili öğeleri kabul edin.
- Girilen Paylaşım Kodu geçerliyse bakım sağlayıcısı listesine bir grup eklenir.


Bakım sağlayıcısı ile bağlantısının kesilmesi

- Daha önce bağlı bir bakım sağlayıcısıyla olan bağlantıyı kesmek için **Bağlantıyı kes** öğesine tıklayın.
- Paylaşım bağlantısını kaldırma onayı açılır penceresi görüntülendiğinde **Tamam** düğmesine tıklayın. İlgili bakım sağlayıcısı ile paylaşım bağlantısı kaldırılır.

3.5 Alıcıyı bağlama

Alıcıyı bilgisayara bağlama

- 1 Sens365'i CareSens Air Alıcısı'na bağlamak için sol menüden **Alıcı** öğesini seçin.
 - Oturum açmamış bir kullanıcıysanız Sens365 web sayfasının alt kısmındaki **Yükleme Yazılımı** öğesine tıklayın.
(Oturum açmamış kullanıcılar yalnızca alıcı yazılımı güncelleme özelliğini kullanabilir.)
- 2 Yükleme yazılımı bilgisayarınızda yüklü değilse işletim sisteminizle uyumlu yazılımı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Yükleme tamamlandıktan sonra sağdaki **Yenile** seçeneğine tıklayın.
- 3 CareSens Air Alıcısı bilgisayara bağlı değilse CareSens Air Alıcısını ekrandaki talimatları izleyerek bilgisayara bağlayın. Bağlantı kurulduğunda, sağ alt köşedeki **Tamam** seçeneğine tıklayın.

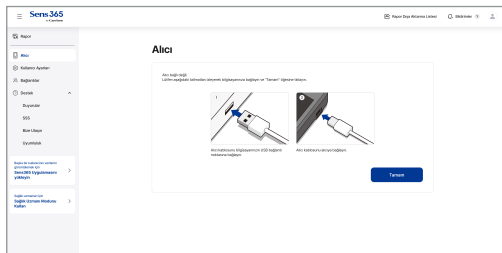

 Not

Ürünün bulunabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen en yakın yetkili distribütörle iletişime geçin.

Alıcı ekranını anlama

Aşağıdaki tabloda, CareSens Air Alıcısı bir bilgisayara bağlandığında ve yükleme yazılımı yüklendiğinde görüntülenen ekran açıklanmaktadır.

No.	İsim	Açıklama
1	Cihaz Bilgileri	Ürün adı, seri numarası, model adı ve yazılım sürümü gibi bağlı alıcı bilgilerini görüntüler.
2	Alıcı Desteği ile İletişime geç	Alıcıyı kullanırken sorun yaşıyorsanız veya sorularınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin. Bir soru sorarken bağlı alıcının günlük verilerini de iletebilirsiniz.
3	Eşitleme Zamanı	Alıcı saatini bilgisayar saatıyla eşitler.
4	Alıcıyı Sıfırla	Bağlı Alıcıyı sıfırlar.
5	Yazılım Güncellemesi	- Alıcı yazılımını en son sürümüne güncelleştirir. - Düğme, Bağlı Alıcının yazılımı en son sürüm değilse etkinleştirilir.
6	Hakkında	Belirlenen kullanıcı bilgilerini görüntüler.
7	Veri Yönetimi	Alıcıda depolanan verileri Sens365 web sitesine yükler.
8	Ayarlar	Genel ayarları (dil, tarih biçimi, saat biçimi vb.) ve bildirim ayarlarını kontrol edin ve değiştirin.

Alıcı işlevlerini keşfetme

Alıcı verilerini yükleme

- 1 "Alıcı" ekranında bağlı alıcının kullanıcı bilgilerini kontrol edin. Hiçbir kullanıcı belirlenmemişse bir kullanıcı atamak için **Kullanıcı Seç**'e tıklayın.
 - Uzmanlar için lütfen bkz. "[4.6 Alıcı kullanıcılarını seçme](#)".
- 2 **Veri Yönetimi** sekmesine tıklayın.
 - **Veri Yönetimi** sekmesinde, CareSens Air Alıcısı'nda depolanan veri kayıtlarının sayısı görüntülenir.
- 3 CareSens Air Alıcısı verilerini Sens365 web sitesine yüklemek için ekranın alt kısmındaki **Yükle**'ye tıklayın.

Not

Veri Yönetimi sekmesi yalnızca oturum açmış kullanıcılar tarafından görülebilir.

Alıcı desteği ile iletişime geçme

- 1 Alıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız veya sorularınız olursa **Alıcı Desteği ile İletişime geç**'e tıklayın.
 - Düğme yalnızca alıcı için bir kullanıcı seçildiğinde görüntülenir.
- 2 Konuyu ve içeriği yazdıktan sonra lütfen müşteri desteği için Günlük Verilerini Gönder seçeneğini işaretleyin.
 - Alıcı kayıt verilerinin aktarımı yalnızca **Alıcı Desteği ile İletişime geç** üzerinden yapılabilir.
- 3 Sorunuzu göndermek için açılır pencerenin altındaki **Gönder** seçeneğine tıklayın.

4 Sens365 web'i kullanma (Sağlık uzmanları)

Sağlık uzmanları sensör kullanıcıları tarafından paylaşılan glikoz verilerini Sens365 web üzerinden izleyebilir. Sens365 web'de sağlık uzmanı hesabına geçmek için sağlık uzmanı kimlik doğrulaması gerekir. Kimlik doğrulamasından sonra, aşağıdaki özellikler daha güvenli ve daha verimli veri yönetimi sağlar.


Bu bölüm şunları yapmanıza yardımcı olacaktır:

1. Bağlı sensör kullanıcılarının ve raporlarının listesini görüntüleme.
2. Sensör kullanıcı ve bakım sağlayıcısı gruplarını yönetme.

4.1 Uzman hesabına geçme

Sağlık uzmanı kimlik doğrulaması

- 1 Oturum açtıktan sonra, sol menünün alt kısmındaki sağlık uzmanı modu başlığına tıklayın.

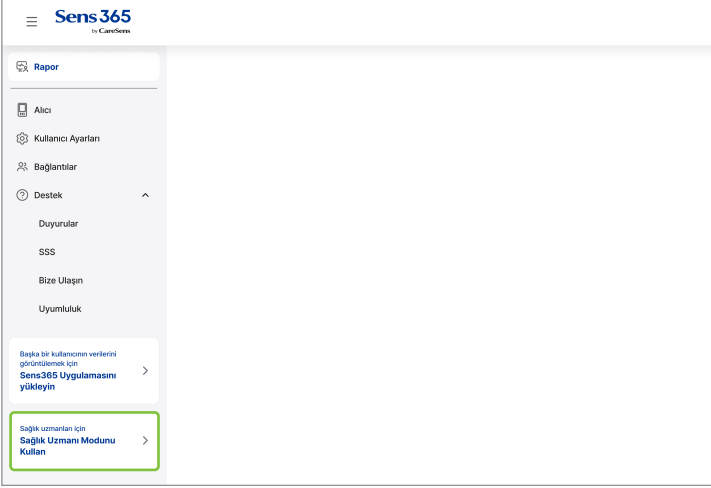

- 2 **Sağlık profesyoneli doğrulama talebi** açılır penceresi görüntülendiğinde adınızı, hastane adını ve bölümünüzü girin.

- 3 Bilgileri girdikten sonra, kimlik doğrulaması talep etmek için **Bir talep e-postası gönder** seçeneğine tıklayın.

 **Sağlık profesyoneli doğrulama talebi**

İkamet edilen ülke/ bölge Türkiye

*Ad Ahmet Yılmaz E-posta

*Hastanesinin adı *Tıp Bölümü


İptal et Bir talep e-postası gönder

- 4 Talep onaylandıktan sonra, kimlik doğrulamanın tamamlandığına dair bir e-posta ve bildirim gönderilir.

- 5 Kimlik doğrulamasından sonra, Sens365 web'e yeniden bağlanın veya uzman hesabına geçmek için kimlik doğrulama tamamlama bildiriminde **Şimdi Kullan**'a tıklayın.

4.2 Uzman ekranını anlama


Aşağıdaki tabloda, oturum açtıktan sonra Sens365 web ana ekranına girdiğinizde görüntülenen temel bilgiler açıklanmaktadır.

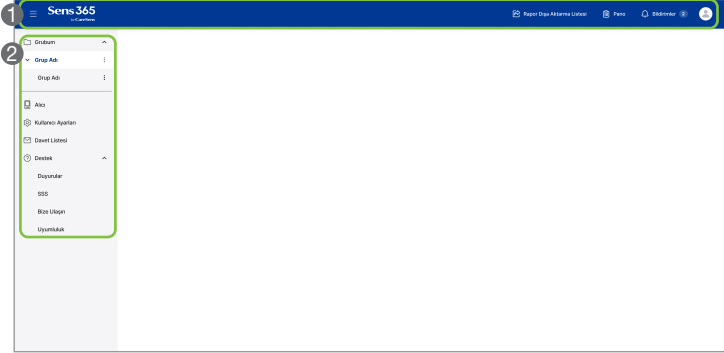

No.	İsim	Açıklama
1	Üst Alan	- Sens365 Ana Sayfası Kısayolu: Sens365 ana sayfasına geçiş yapar. - Rapor Dışa Aktarma Listesi: Dışa aktarma listesine rapor ekleyin ve raporları yönetin. - Pano: Hastaları kontrol paneline ekleyerek yönetin. - Bildirimler: Davet listeleri ve duyurular gibi bildirim günlüklerini kontrol edin. - Profil: Profil bilgilerini görüntüleyin ve kişisel bilgileri değiştirin.
2	Sol Menü	- Grubum: Grupları yönetin ve her gruptaki bağlı sensör kullanıcılarının listesini kontrol edin. - Alıcı: Glikoz verilerini yüklemek için bir alıcı bağlayın. - Kullanıcı Ayarları: Profil bilgilerini görüntüleyin ve temel ayarları değiştirin. - Davet Listesi: Bakım sağlayıcısı olarak diğer gruplara davetiyelerin listesini görüntüleyin. - Destek: Duyurular, SSS, Bize Ulaşın ve Uyumluluk gibi bilgileri görüntüleyin.

4.3 Grup ekranını anlama

Sol menüden bir grup seçildiğinde, o gruba bağlı sensör kullanıcılarının listesi görüntülenir.

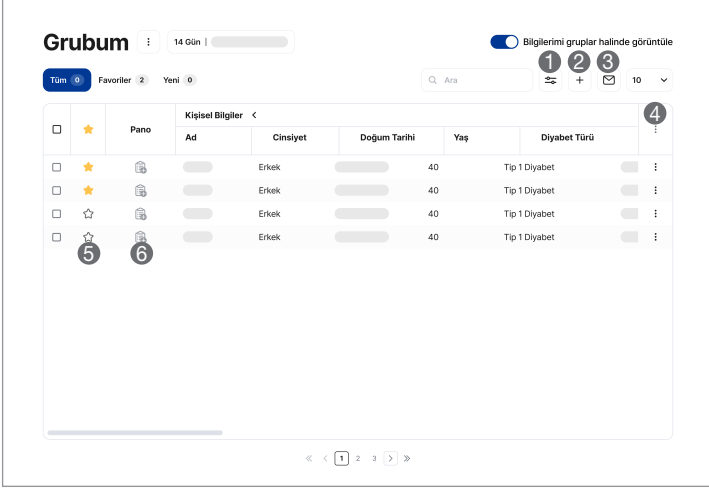

No.	Simge	Açıklama
1		Listeye filtre uygulayın.
2		Alınan paylaşım kodunu kullanarak bir sensör kullanıcısı ekleyin.
3		Bir grup paylaşım kodu sağlayarak sensör kullanıcılarını davet edin.
4		Listede görüntülenen bilgileri düzenleyin.
5		Sensör kullanıcılarını Favorilerinize ekleyin. Tüm favori kullanıcılara Favoriler sekmesinden bakın.
6		Panoya sensör kullanıcıları ekleyin. Üst alandaki Pano'ya tıklayarak eklenen kullanıcıların listesini görüntüleyin.

4.4 Grupları yönetme

Grup ekleme

- 1 Sol menüdeki grup listesinde  simgesine tıklayın ve **Grup Ekle**'yi seçin.
- 2 Eklenecek grubun adını girin.
- 3 Girilen adla bir grup oluşturulur.

Sensör kullanıcılarını davet etme

- 1 Bir sensör kullanıcıını gruba davet etmek için grup adının sağ tarafındaki  simgesine tıklayın ve **Sensör Kullanıcısını Davet Et** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Sensör Kullanıcısını Davet Et** açılır penceresi görüntülenirse davet edilen sensör kullanıcıına gösterilecek grup adını girin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
- 3 Oluşturulan paylaşım kodunu kontrol edin ve **E-posta Daveti**'ne tıklayın.
- 4 E-posta daveti için davet edilecek sensör kullanıcıının e-posta adresini girin ve **Gönder**'e tıklayın. Aynı anda en fazla 10 e-posta gönderebilirsiniz.

Bakım sağlayıcılarını davet etme

- 1 Gruba bakım sağlayıcıları davet etmek için grubun  simgesine tıklayın ve **Bakım Sağlayıcısı Davet Et**'i seçin.
- 2 **Bakım Sağlayıcısı Davet Et** açılır penceresi görüntülendiğinde davet edilecek bakım sağlayıcısının Sens365 hesap e-postasını girin ve izinlerini seçin.
- 3 **Bakım Sağlayıcısı Davet Et** açılır penceresinin altındaki tedbirleri inceleyin ve **Davet Et** düğmesine tıklayın.

4.5 Sensör kullanıcı raporunu görüntüleme

- 1 Grupta bir sensör kullanıcısı seçtiğinizde bu sensör kullanıcısına ait raporu görüntüleyebilirsiniz.

< Grubum

Ahmet Yılmaz Hedef Aralığı Ayarları

...

Dişabet Türü **Tıp 1 Dişabet**

Kimlik Numarası

Atanmış Bakım Sağlayıcısı

14 Gün |

Son Güncelleme: **103 mg/dL**

📄 📧 📱 📊

- 2 Kullanıcının Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Dişabet Türü, Kimlik Numarası ve Atanmış Bakım Sağlayıcısı gibi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
- 3 Kullanıcıya bağlı sensörden en son glikoz değeri bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
- 4 Rapor için bir reçete oluşturmak üzere  simgesine tıklayın.
- 5 Raporları görüntüleme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "[3.3 Raporları görüntüleme](#)".

4.6 Alıcı kullanıcılarını seçme

Alıcı verilerini yönetmek için bir kullanıcı atanmalıdır.

Alıcı



Cihaz Bilgileri

Ürün Adı	CareSense Air Alıcısı	Güncel Yazılım Sürümü	1.0.0
Seri Numarası	123456	En Son Yazılım Sürümü	1.0.1
Model Adı	CGM-R-001		

Eşitleme Zamanı

Alıcın Sıfırla

Yazılım Güncelleme

Hakkında

Kullanıcı belirtilmedi.

Kullanıcı Seç

Veri Yönetimi

Ayarlar

Kullanıcı belirtilmedi.

Lütfen veri yüklemek için sensör kullanıcısını seçin.

- 1 "Alıcı" ekranında **Kullanıcı Seç**'e tıklayın.
Alıcının nasıl bağlanacağına ilişkin talimatlar için bkz. "3.5 Alıcıyı bağlama".
- 2 Açılır pencere görüntülendiğinde, grup içinde bağlı sensör kullanıcıları arasından alıcı için seçmeye uygun bir kullanıcı seçebilirsiniz.

Ek A Etkin olmayan hesap politikası

Sens365 etkin olmayan hesap politikası

Sens365, hizmeti 1 yıldır kullanmamış kullanıcıları etkin olmayan hesaplara dönüştürür. Bu işlem sırasında kişisel bilgiler ayrı ve güvenli bir şekilde saklanır. Ayrı olarak saklanan kişisel bilgiler 1 yıl süreyle saklanır ve yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe imha edilebilir.

i-SENS, hesaplarının devre dışı bırakılması planlanan üyelere, e-posta gibi yöntemler aracılığıyla, hesap durumunun değiştirilmesinden en az 30 gün önce planlanan devre dışı bırakma tarihi ve ayrı olarak saklanan kişisel veriler hakkında bilgi verir.

Hesabınızın etkin olmayan hesaba dönüştürülmesini istemiyorsanız dönüştürme işleminden önce hizmette oturma açın. Ayrıca, hesabınız devre dışı bırakıldıktan sonra kişisel bilgileriniz henüz imha edilmemişse oturma açabilir, onay verebilir, etkin olmayan hesabınızı kurtarabilir ve hizmeti her zamanki gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sensör kullanıcılarının verilerinin korunması

- Sens365'te saklanan kişisel ve hassas bilgiler şifrelenir. Veri aktarımı sırasında güvenli yuva katmanı (SSL) şifreleme protokolü, verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü garanti altına alarak gizlice dinlemeye ve değişikliklere karşı korur.
- Bir gruba eklenen bir sensör kullanıcısının verilerini yalnızca o gruba ait bakım sağlayıcıları görüntüleyebilir.

Ek B Teknik bilgiler

B.1 Performans

Web Tarayıcısı: HS-FE-01

Ürün adı	Sens365
Uyumlu tıbbi cihazlar	CareSens Air CGM Sistemi
İletişim ortamı	İletişim protokolü: HTTPS
Çalışma ortamı	- Önerilen tarayıcı: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari - İşletim Sistemi Sürümü: Windows 10 veya üzeri, Mac OS 11 veya üzeri - Çözünürlük: 1280 x 800 piksel veya üzeri
İletilen ve alınan veriler	- Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının sürekli glikoz değerleri, kullanıcı girdi verileri (yemekler, insülin, egzersiz vb.) - Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının glikoz seviyelerini de içeren kullanıcı verisi istatistikleri ve raporları
Temel performans	- Uygulamayı kullanan bakım sağlayıcılar (aile üyeleri, vasiler, tıbbi kurumlar), uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısıyla web'de bağlantı kurarak paylaşılan verileri alabilir. - Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının veri istatistiklerini görüntüler ve raporları kaydeder. - Uyumlu bir tıbbi cihaz kullanıcısının sürekli glikoz değerlerini ve kullanıcı giriş verilerini görüntüler.
Yazılım sürümü	Sürüm: 1.1.x

B.2 Siber Güvenlik

Siber tehditlerle ilgili uyarılar

- İster Windows veya Mac OS kullanıyor olun, kötü amaçlı programların cihaz bilgilerine erişmesini önlemek için akıllı cihazınıza bir virüs koruma veya antivirüs programı yükleyin.
- Paylaşım kodunu girmenize rağmen sensör kullanıcılarından glikoz verilerini alamıyorsanız altı haneli paylaşım kodunun doğru girildiğinden emin olun. Doğru paylaşım kodu girilmesine rağmen aynı sorun devam ederse caresensair.com adresindeki ürün web sitesinden Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
- Başka bir cihazda oturum açılması nedeniyle oturumunuzun kapatılması durumunda, oturum açmaya çalışan kişi siz değilseniz şifrenizi değiştirin.
- Beş kereden fazla yanlış şifre girerseniz şifrenizi sıfırlayın.
- Hesabınızı 1 yıldan uzun bir süre kullanmazsanız hesap devre dışı kalır. Hesabınız devre dışı kalırsa hesabı yeniden etkinleştirmeniz gerekir.
- Sens365 ile ilgili bir siber güvenlik olayı meydana gelirse en yakın yetkili distribütör ve yetkili makamla iletişime geçin.
- Sens365'i kullanırken güvenli internet erişimi için lütfen güvenilir bir Wi-Fi ağı (ev veya iş yeriniz gibi) veya saygın bir VPN hizmeti üzerinden güvenli bir bağlantı kullanın.
Ev, restoran, okul, kütüphane, otel, havaalanları veya uçaklar gibi yerlerdeki misafir ağları da dahil olmak üzere güvenli olmayan halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmaktan kaçınin. Bu ağlar, uygun güvenlik önlemlerine sahip olmayabilir ve Sens365'inizi kötü amaçlı yazılım veya yetkisiz erişim gibi siber güvenlik risklerine maruz bırakabilir.

Siber tehditlere ilişkin güvenlik

- Kimlik bilgileri geçerli olarak doğrulandıktan sonra kullanıcıya bir belirteç verilir.
- Her bir talep için belirtecin geçerliliği doğrulanır ve ardından kimlik doğrulama işlenir.
- SSL iletişim yöntemi veri göndermek için kullanılır.
- AES kodlaması, kişisel bilgi verilerini şifrelemek için kullanılır ve veriler bir DB'ye kaydedilir.

i·sens



i-SENS, Inc.

43, Banpo-daero 28-gil
Seocho-gu, Seoul 06646
Republic of Korea
CareSensAir.com



**Medical Technology Promedt
Consulting GmbH**

Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert, Germany